



Comfeel® Podstawowy

Ochrona i gojenie ran o małym i średnim wysięku

Doskonałe warunki gojenia

Comfeel Podstawowy jest opatrunkiem hydrokoloidowym zapewniającym optymalne, wilgotne środowisko gojenia się rany. Jest stosowany w leczeniu ran ze średnim i małym wysiękiem.

Sposób działania

W kontakcie z wysiękiem z rany opatrunek Comfeel Podstawowy tworzy lepki żel wchłaniający wysięk, jednocześnie nie przylegający do rany.

Podczas wchłaniania wysięku na powierzchni rany formuje się białawy żel. Kiedy wypełni on górną część opatrunku, Comfeel zmieni swój kolor na marmurkowy lub biały. Wtedy powinna nastąpić zmiana opatrunku.

