



Abbott

Panbio™

COVID-19 Antigen Self-Test

Szybki, łatwy i wiarygodny test, który zapewnia wyniki w ciągu 15 minut w warunkach domowych. Dostępne są różne wielkości zestawu dostosowane do potrzeb indywidualnych osób i rodzin.

Test do samodzielnego wykonywania wykrywa aktywne zakażenie COVID-19



Obrazkowe instrukcje krok po kroku



Prosta procedura badania z użyciem wymazówki wprowadzanej do nosa na 2 cm



Wyniki w ciągu 15 minut bez konieczności czekania na lekarza



Brak ograniczeń wiekowych — dzieci poniżej 14. roku życia powinny wykonać test z pomocą osoby dorosłej




Dowody kliniczne uzyskane u osób objawowych i bezobjawowych

ŁATWA PROCEDURA KOMFORTOWEGO POBIERANIA WYMAZU Z NOSA


Przed wykonaniem testu należy zapoznać się z pełną instrukcją użycia, która znajduje się w pudełku z zestawem produktu.

1

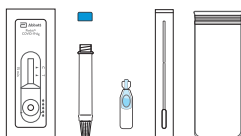


PRZYGOTUJ MATERIAŁY*

2

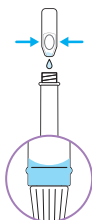


NAPEŁNIJ PROBÓWKĘ

3

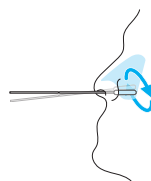


POBIERZ WYMAZ Z NOSA

4

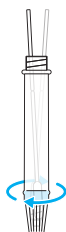


ZAMIESZAJ PRÓBKĘ

5

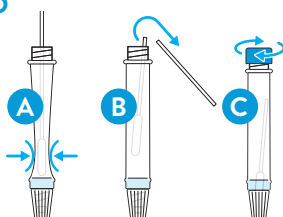

ŚCIŚNIJ PROBÓWKĘ (A), ZŁAM
WYMAZÓWKĘ (B), ZAŁÓŻ
NIEBIESKĄ ZATYCZKĘ
NA PROBÓWKĘ (C)

6

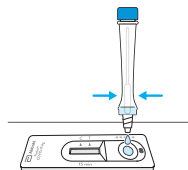


DODAJ 5 KROPLI

7



ODCZEKAJ 15 MINUT

8

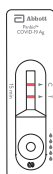

ODCZYTAJ WYNIK

* Przedstawiona instrukcja stanowi procedurę testowania umożliwiającą wykonanie pojedynczego testu.
Liczba elementów zestawu może być inna.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Co to jest antygen?

Antygeny to białka, które są częścią wirusa wywołującego COVID-19. Wynik testu wskazujący na wykrycie antygenów w próbce z nosa oznacza, że w organizmie testowanej osoby obecny jest aktywny wirus wywołujący COVID-19.

Jak dokładny jest ten test?

W badaniach klinicznych test antygenowy Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test prawidłowo rozpoznał 100% próbek ujemnych i 95,2% próbek dodatnich.

Czy ten test może być stosowany u dzieci?


Test nie ma ograniczeń wiekowych. Dzieci poniżej 14. roku życia powinny wykonać test z pomocą osoby dorosłej.

Co oznacza wynik dodatni?

Dodatni wynik testu oznacza, że w wymazie z nosa wykryto białka wirusa wywołującego COVID-19. Prawdopodobnie konieczna będzie samoizolacja w domu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu COVID-19. Należy postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi zachowywania dystansu społecznego, aby ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa, i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub lokalną placówką opieki zdrowotnej.

Co oznacza wynik ujemny?

Ujemny wynik testu oznacza, że jest mało prawdopodobne, aby w czasie wykonywania testu dana osoba była chora na COVID-19. Test nie wykrył żadnych antygenów w próbce wymazu z nosa. Jeśli objawy nie ustępują, należy powtórzyć test po 1 lub 2 dniach, ponieważ koronawirus może nie być wykrywalny na bardzo wczesnych etapach zakażenia. Zaleca się również dalsze przestrzeganie lokalnych wytycznych dotyczących samoizolacji i skonsultowanie się z lekarzem.

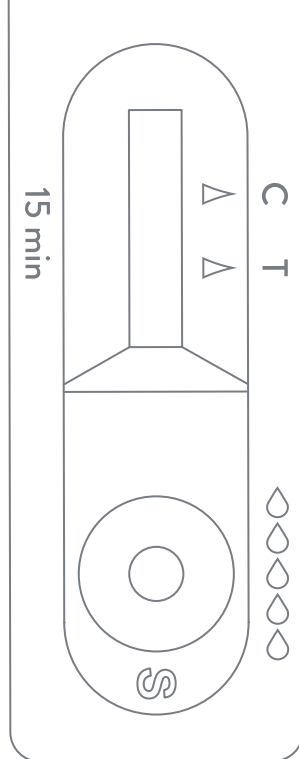

Czy ten test wykrywa nowe warianty COVID-19?

Podobnie jak w przypadku wielu innych wirusów firma Abbott uważnie monitoruje nowe mutacje wirusa wywołującego COVID-19 w celu zagwarantowania, że nasze testy mogą je wykrywać. Przeprowadziliśmy dokładną analizę znanych wariantów, które byliśmy w stanie zbadać, i mamy pewność, że nasze testy skutecznie rozpoznają te szczepy.

Kto może mi pomóc w razie problemu lub pytania dotyczącego produktu?

Pomoc techniczna jest dostępna pod numerami telefonów podanymi w instrukcji użycia dołączonej do zestawu.

WIĘCEJ INFORMACJI NA **SELFTEST.ABBOTT**

Produkt może być niedostępny w niektórych krajach. Jest dostępny dla konsumentów na wybranych rynkach. Nie został dopuszczony do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.

© 2021 Abbott. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe użyte w tekście stanowią własność firm z grupy Abbott albo odpowiednich właścicieli. Wszelkie pokazane zdjęcia służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. COL-03630-01 07/21

