

INSTI®

Samodzielne badanie na obecność wirusa HIV

Instrukcja użytkownika


PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

Ten test zawiera:



Przygotowanie

Film szkoleniowy dostępny jest na stronie: www.INSTI.com

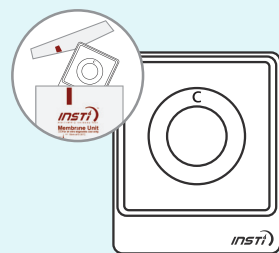

- Otwórz pokrowiec z urządzeniem testowym.

WAŻNE: Oczyszczyć i osuszyć ręce.



- Umieść urządzenie testowe na płaskiej powierzchni.




- Zdejmij zakrętkę z pojemnika nr 1. Umieść go na płaskiej powierzchni.


OSTRZEŻENIE: Pojemnik nr 1 zawiera płyn. Należy obchodzić się z nim ostrożnie.

Krok 1: Pobierz krew


Jeśli masz problemy podczas pobierania krwi, przejrzyj rozdział Najczęściej zadawane pytania na odwrocie.

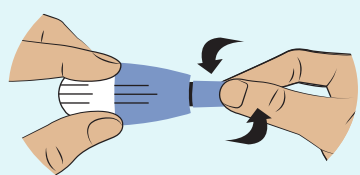


- Przekręć i wyciągnij końcówkę lancetu. Usuń końcówkę.

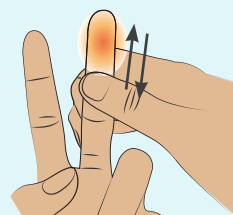


- Potrzyj palec i dłoń, aby zwiększyć przepływ krwi.

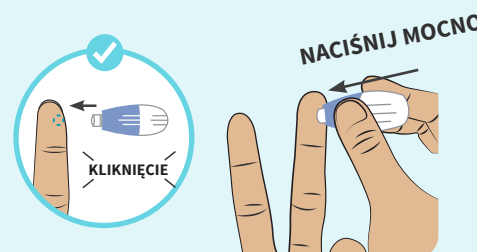


- Umieść lancet z boku opuszki palca.

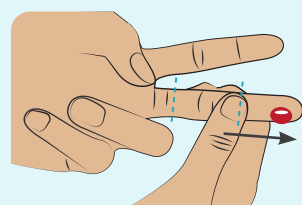

- Potrzyj palcem, aby wytworzyć **DUŻĄ** kroplę krwi.

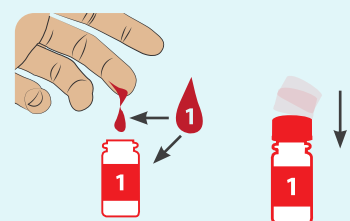


- Pozwól, aby 1 kropla **PRZEPEŁYNEŁA** do pojemnika nr 1. Zakręć nakrętkę pojemnika nr 1.

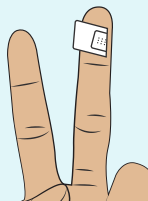


- Nałóż samoprzylepny plaster.

Krok 2: Test

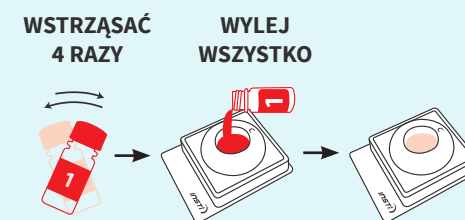


- Wstrząśnij i wlej cały płyn. Poczekaj, aż ciecz zniknie.

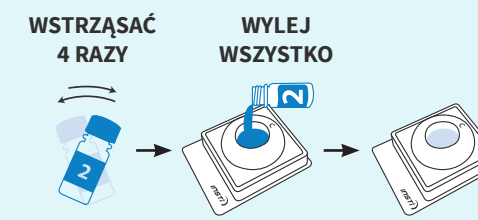

- Wstrząśnij i wlej cały płyn. Poczekaj, aż ciecz zniknie.

WSKAZÓWKA: Może być konieczne delikatne stuknięcie pojemnika nr 2, aby wydobyć całą ilość płynu.

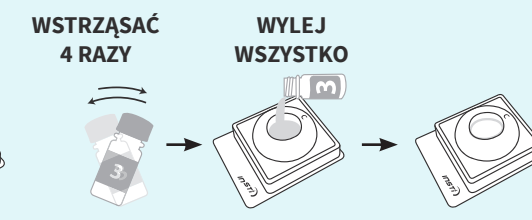

- Wstrząśnij i wlej cały płyn. Poczekaj, aż ciecz zniknie.


Krok 3: Odczytaj wynik

Odczytaj wynik natychmiast do **maksymalnie 1 GODZINY**.



Negatywny

Twój wynik testu jest negatywny.

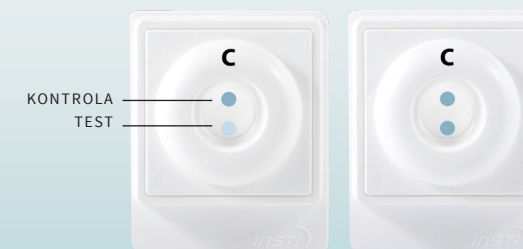

Pozytywny

Dwie kropki oznaczają, że wynik testu jest pozytywny. Prawdopodobnie jesteś nosicielem wirusa HIV. Pozytywne wyniki **MUSZĄ** zostać potwierdzone przez lekarza.



Wynik jest nieważny

Twój test nie zadziałał. Musi pojawić się kropka kontrolna wskazująca, że test został wykonany poprawnie.

WSKAZÓWKA: Jedna z kropek może być ciemniejsza od drugiej. W rzadkich przypadkach słaby pierścień tła może pojawić się wokół kropli testowej. Nie należy tego interpretować jako wynik dodatni.

Wynik ujemny

Podobnie jak w przypadku wielu testów, istnieje szansa uzyskania fałszywych wyników. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia fałszywych wyników, postępuj zgodnie z instrukcjami i poprawnie przeprowadź test. Jeśli Twój wynik jest ujemny, ale w ciągu ostatnich 3 miesięcy byłeś zaangażowany w aktywność, która mogła narazić Cię na zakażenie wirusem HIV, możesz znajdować się w tak zwanym „okresie okienka serologicznego”. W takim wypadku zaleca się powtórzenie badania w późniejszym terminie.

Pozytywny wynik

Jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem i poinformuj go, że wykonałeś samodzielny test na obecność wirusa HIV. Wszystkie pozytywne wyniki muszą zostać potwierdzone badaniem laboratoryjnym.

Co dalej po uzyskaniu pozytywnego wyniku?

Posiadanie wirusa HIV nie oznacza, że masz AIDS. Przy wczesnej diagnozie i leczeniu jest mało prawdopodobne, że rozwinie się u Ciebie AIDS.

Usuwanie

Usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Umieść wszystkie przedmioty z powrotem do zewnętrznego opakowania. Wyrzuć do kosza na śmieci.



