

ARGENTIN-T

S P R A Y D O G A R D Ł A

WSKAZANIA:

Preparat wspomagający leczenie stanów zapalnych gardła, spowodowanych przez infekcje bakteryjne i wirusowe.

ZASTOSOWANIE:

ARGENTIN-T może być stosowany wspomagająco w leczeniu:

- Zapalenia migdałków podniebiennych,
- Zapalenia błony śluzowej gardła,
- Zapalenia błony śluzowej jamy ustnej,
- Stanu po usunięciu migdałków podniebiennych.

SKŁAD:

Nanokoloid Ag, mentol, wyciąg z irlandzkich glonów morskich, sole mineralne (chlorki), sorbitol, gliceryna.

MECHANIZM DZIAŁANIA:

ARGENTIN-T pokrywa błonę śluzową gardła ochronnym filmem. Obecne w preparacie nanocząstki srebra ograniczają rozwój drobnoustrojów. Zawartość mentolu łagodzi objawy zapalenia, takie jak ból i pieczenie.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I INTERAKCJE:

Nie stwierdzono.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

PRZECIWSKAZANIA:

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Nie należy używać po upływie terminu ważności. Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

PRZECZYSZCZANIE:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić od światła.

Rys.1

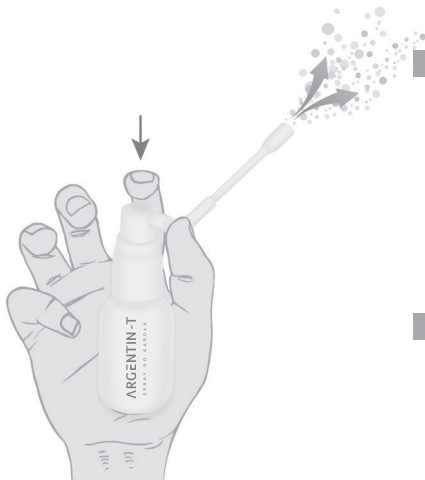

SPOSÓB UŻYCIA I DAWKOWANIE:

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem (Rys.1). Następnie umieścić aplikator możliwie jak najgłębiej w ustach i naciskając rozpylić 3-4 dawki w kierunku gardła (Rys.2). Aplikację powtarzać wielokrotnie, w zależności od potrzeb.

POSTAĆ I OPAKOWANIE:

Preparat dostępny jest w postaci sprayu (płynu z dozownikiem) o pojemności 20ml.

Rys.2



ARGENTIN-T

S P R A Y D O G A R D Ł A

WYTWÓRCA:

ARKONA Trade and Science Sp. Jawna
Nasutów 99 C, 21-025 Niemce
Polska



DYSTRYBUTOR:

SOLINEA

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn
Polska



Data ostatniej aktualizacji ulotki: 27/09/2021