

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu wyrobu medycznego Katarek nawilżająca maść do nosa z prebiotykiem, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.

INSTRUKCJA UŻYWANIA

katarek

MAŚĆ DO NOSA

nawilżająca z prebiotykiem

REF ENT10

1. CO TO JEST KATAREK NAWILŻAJĄCA MAŚĆ DO NOSA Z PREBIOTYKIEM?

Katerek nawilżająca maść do nosa z prebiotykiem to wyrób medyczny o właściwościach nawilżających oraz wspomagających utrzymanie odpowiedniej wilgotności błon śluzowych nosa oraz skóry wokół nosa. Zawarte w maści składniki tworzą ochronną barierę, zabezpieczającą przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, a tym samym chroniącą przed podrażnieniami. Zawarty w wyrobie olej z ogórecznika, bogaty w kwasy tłuszczowe, wzmacnia ochronne działanie wyrobu oraz intensywnie nawilża wysuszoną śluzówkę lub skórę nosa. Maść Katarek wzbogacona jest dodatkowo o prebiotyk Biolin P, który wspomaga rozwój fizjologicznej flory bakteryjnej, tym samym zapobiegając rozwojowi drobnoustrojów patogennych.

2. W JAKIM CELU STOSUJE SIĘ KATAREK NAWILŻAJĄCA MAŚĆ DO NOSA Z PREBIOTYKIEM?

Suchość nosa jest powszechnie występującym problemem zarówno u dzieci jak i dorosłych. Może się ona pojawiać w wyniku zbyt długiego przebywania w klimatyzowanych pomieszczeniach czy innych miejscach o zbyt niskiej wilgotności np. w czasie sezonu grzewczego. Suchość nosa towarzyszy także wielu chorobom, alergii oraz jest wynikiem stosowania niektórych leków. Problem ten dotyka również osoby starsze oraz narażone na działanie substancji chemicznych lub drażniących (np. w miejscu pracy).

Katerek nawilżająca maść do nosa z prebiotykiem nie tylko nawilża, ale także utrzymuje odpowiedni poziom wilgotności błon śluzowych

przez dłuższy czas, tym samym łagodząc nieprzyjemne odczucia związane z ich suchością.

Śluzówka nosa jest szczególnie narażona na działanie czynników zewnętrznych zwłaszcza podczas infekcji lub stanów alergicznych, powodujących jej podrażnienie, pieczenie czy ból. Zastosowanie Katarek nawilżającej maści do nosa z prebiotykiem zmniejsza odczucie dyskomfortu, poprzez wytworzenie warstwy ochronnej, ograniczającej dostęp czynników drażniących do błony śluzowej. Dodatkowo wyrób medyczny może być także stosowany na popękane i podrażnione okolice nosa, spowodowane częstym dmuchaniem nosa podczas infekcji czy alergii.

3. SPOSÓB UŻYWANIA

Należy stosować zgodnie z instrukcją używania. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Katarek nawilżająca maść do nosa z prebiotykiem należy dokładnie umyć ręce. Niewielką ilość maści rozprowadzić równomiernie na błony śluzowe nosa lub skórę wokół nosa. Stosować kilka razy dziennie w miarę potrzeby.

4. PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na składniki wyrobu.

Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Nie stosować wyrobu w razie uszkodzenia

opakowania bezpośredniego – tuby.
Produkt donosowy, unikać kontaktu z oczami.

5. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. SKŁAD PRODUKTU KATAREK NAWILŻAJĄCA MAŚĆ DO NOSA Z PREBIOTYKIEM

Woda, wazelina, gliceryna, olej parafinowy, uwodornione monoglicerydy oleju kokosowego, 1,2-heksanodiol, estry gliceryny i kwasu tłuszczowego, stearynian gliceryny SE, oliwa z oliwek, olej z ogórecznika lekarskiego, octan tokoferylu, Biolin P, karbomer, alkohol cetearylowy, stearynian gliceryny, benzooesan sodu, guma ksantanowa, wodorotlenek sodu, EDTA.

7. OPIS OPAKOWANIA

Katarek nawilżająca maść do nosa z prebiotykiem pakowana jest w plastikową tubę zawierającą 15 g wyrobu. Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, zadrukowaną tubę oraz instrukcję używania.

Katarek nawilżająca maść do nosa z prebiotykiem jest wyrobem medycznym.



Objaśnienie symboli użytych na opakowaniu:



Dane wytwórcy



Data ważności




Numer serii



Zajrzyj do instrukcji używania



Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone

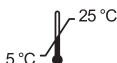

Temperatura przechowywania



Numer katalogowy



Wytwórca:

Gofarm Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Górników 21/26
30-819 Kraków
www.gofarm.pl

Wyprodukowano dla:

DUNA Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13/1
30-701 Kraków
www.katarek.pl

Data ostatniej aktualizacji instrukcji używania:
styczeń 2021

KNMN2/IU/01/2021