



katarek standard

aspirator kataru

INSTRUKCJA UŻYCIA

Katar często pojawia się u niemowląt i małych dzieci. Problemem jednak jest to, że małe dzieci i niemowlęta nie potrafią wydymać nosa i potrzebują czasu, aby nauczyły się oddychać przez usta. Zatkany nos blokuje oddychanie, powoduje złe samopoczucie, a także dalsze powikłania: stany zapalne uszu, zatok jak również zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc. Dlatego istotne jest oczyszczanie nosa. Katarek Standard aspirator do nosa jest na to zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Badanie lekarskie jest oczywiście niezbędne, ponieważ tylko lekarz jest w stanie zdiagnozować powód kataru. Usuwanie wydzieliny z jamy nosowej przyspiesza leczenie, poprawia oddychanie i ogólne samopoczucie, a także wspiera zapobieganie chorobom.

Stosowanie: Urządzenie służy do usunięcia wydzieliny z jamy nosowej u dzieci! Nie wolno stosować do innych celów!

UWAGA

Pierwsze użycie: Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przepłukać urządzenie gorącą, pitną wodą. Nie należy moczyć w wodzie z detergentem.

Czyszczenie: Po każdym użyciu urządzenie należy oczyścić. Najlepiej natychmiast przepłukać wodą z kranu z dodatkiem detergentu odpowiedniego dla dzieci/niemowląt. Przepłukać gorącą lub ciepłą wodą. Wyrzec zewnętrzną stronę głowicy ssącej miękką ściereczką lub wacikami kosmetycznymi nawilżonymi alkoholem etylowym dostępnym w aptekach.

Nie należy stosować żadnego innego detergentu, żadnych innych chemikaliów, ani materiałów ściernych!

OSTRZEŻENIE

W przypadku hemofilii lub krwawienia z nosa należy skonsultować się z lekarzem!

Jeżeli po zastosowaniu urządzenia pojawi się wysypka alergiczna lub zaczerwienienie na nosie dziecka, należy przestać używać urządzenia! Należy skonsultować się z lekarzem!

W przypadku stosowania urządzenia dla kilkorga dzieci zalecane jest używanie więcej głowic ssących i ich oznaczenie. Jeżeli jest to niemożliwe, należy przed użyciem w wyżej wymieniony sposób dokładnie oczyścić głowicę ssącą.

OSTRZEŻENIE


- Do używania nadaje się odkurzacz, którego moc wynosi 800-1800 W (bezpieczne stosowanie jest potwierdzone przez sprawozdanie z badań.) Należy sprawdzić instrukcję odkurzacza.
- Katerek Standard nie jest zabawką dla dzieci. Osoba dorosła powinna stosować urządzenie po uprzednim zapoznaniu się z instrukcją.
- Nie wolno używać urządzenia do innych celów, niż jest to określone w zakresach stosowania.
- Nie używać urządzenia z uszkodzoną lub brakującą częścią.
- Należy oczyścić końcówkę głowicy ssącej **A** czystą ściereczką, lub wacikiem nawilżonym alkoholem etylowym dostępnym w aptekach. Nie wolno używać innych chemikaliów!

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ciepłych.

MONTAŻ

- Włożyć głowicę ssącą **A** do cylindra pojemnika **B**.
- Włączyć odkurzacz.
- Podłączyć złącze odkurzacza **C** do rury odkurzacza.

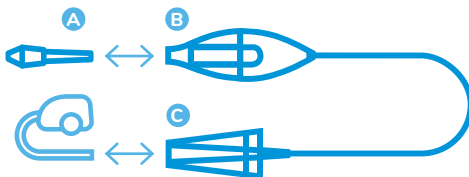


DZIAŁANIE

1. Odpowiednią wydajność stosowanego urządzenia uzyskuje się w naturalnej pozycji ciała. Zaleca się wziąć niemowlaka w ramiona, lub posadzić dziecko na kolanach.
2. Należy umieścić głowicę ssącą **A** w ten sposób, aby szczelnie zablokowała jedno nozdrze i tak przytrzymać przez kilka sekund, w międzyczasie obserwować usuniętą wydzielinę w głowicy ssącej.
3. Powtórzyć te same czynności na drugim nozdrzu.
4. Ostrożnie poruszać głowicą w trakcie drugiej i trzeciej czynności, aby przyspieszyć proces.
5. Ssanie powinno potrwać po ok. 5 sekund dla każdego nozdrza.
6. Po zakończeniu procesu należy wyłączyć odkurzacz i oczyścić urządzenie wyżej określonym sposobem.
7. Powtórzyć proces 2-3 razy dziennie, lub według potrzeby.

Okres zdatności użytkowej urządzenia wynosi 3 lata. Można je bezpiecznie używać przestrzegając zalecenia instrukcji urządzenia.

- A** Głowica ssąca
- B** Pojemnik
- C** Złącze do odkurzacza

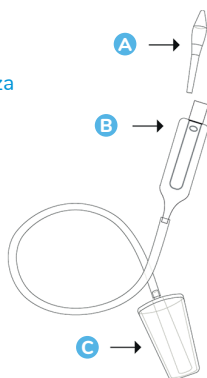

DEMONTOWANIE I CZYSZCZENIE



1. Odłączyć złącze odkurzacza **C** od odkurzacza.
2. Wyłączyć odkurzacz.
3. Wypłukać części **A** i **B** bieżącą gorącą wodą z kranu natychmiast po użyciu i umyć je według wyżej wymienionych instrukcji.
4. Wysuszyć na powietrzu.

	Nazwa i adres producenta
	Należy zapoznać się z instrukcją obsługi!
	Ostrzeżenie!
	Numer seryjny
	Chronić przed światłem słonecznym
mm.yyyy v0x	Data wydania i numer wersji obecnej instrukcji użycia

V01

01.2020

CE 0123

Osoba zatwierdzająca:

Anna Illés Csók Dyrektor zarządzający

Nazwa i adres producenta:

Illés Csók és Társa Kft.

Budapest H-1146 , Ajtósi Dürer sor 35.