

KERATOSTILL SINE



Krople do oczu o charakterze powlekającym, nawilżającym i łagodzącym
Nie zawiera substancji konserwujących

Opis działania preparatu oraz wskazania do stosowania

KeratoStill SINE to jałowy roztwór wodny hydroksypropylometylocelulozy o stężeniu 0,3% do stosowania na tkanki oka o działaniu powlekającym, nawilżającym oraz wspomagającym proces reepitelizacji rogówki po jej nadmiernych obciążeniach, łagodzi uczucie suchości i lekkiego podrażnienia oczu spowodowane warunkami środowiskowymi (klimatyzacja, kurz, promieniowanie słoneczne), zmęczeniem, długotrwałą pracą przed monitorami komputerowymi.

KeratoStill SINE charakteryzuje się następującymi właściwościami fizykochemicznymi: jest doskonale przejrzysty, rozpuszcza się w wodzie w dowolnych proporcjach, nie tworzy nierozpuszczalnych osadów z solami metali lub pozostałościami organicznymi które mogą znajdować się w płynie łzowym. KeratoStill SINE posiada odczyn w pełni zgodny z tkankami oka i płynem łzowym przez co jest doskonale tolerowany.

Skład: hydroksypropylometyloceluloza 0,3%, dekspantenol 5%, disodowy wersenian (EDTA), sodu fosforan dwuzasadowy, potasu fosforan jednozasadowy, woda oczyszczona.

Sposób użycia: Należy zakropić 1-2 krople wyrobu medycznego KeratoStill SINE do dolnego woreczka spojówkowego, ściskając lekko butelkę. W przypadku gdy jest to konieczne można stosować częściej niż raz na dobę.

Środki ostrożności:

- Nie należy stosować na założone miękkie soczewki kontaktowe. W przypadku gdy jest to konieczne, należy odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewki kontaktowej.
- Nie dotykać powierzchni oka końcówką zakraplacza.
- Nie stosować w przypadku infekcji oka.
- Nie zakraplać jednocześnie z innymi lekami do oczu przeznaczonymi do stosowania zewnętrznego.
- Nie stosować w przypadku znanej nietolerancji na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie daty ważności oznaczonej symbolem EXP na pudełku i etykiecie.
- Należy stosować nie dłużej niż 8 tygodni po pierwszym otwarciu opakowania. Po tym czasie otwarte opakowanie należy wyrzucić.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie: Butelka z zakraplaczem 10 ml

KeratoStill Sine jest wyrobem medycznym



Wytwórca:
BRUSCHETTINI s.r.l.
Via Isonzo, 6
16147 Genua (Włochy)

Dystrybucja w Polsce:
Pharm Supply Sp. z o.o.
ul. Marconich 2/9
02-954 Warszawa

STERILE | A



CE
0373