

GranuSEPT®

ROZTWÓR DO PRZEMYWANIA RAN

GranuSEPT® to roztwór do oczyszczania, przemywania i nawilżania ran. Jest przeznaczony do stosowania w przypadku: drobnych otarć skóry, niewielkich skaleczeń, podrażnień, rozcięć, oparzeń. Można stosować również na nieuszkodzoną skórę. Zapobiega powstawaniu biofilmu.

1. Opis, skład i stosowanie

GranuSEPT® roztwór do przemywania ran posiada łątwą w stosowaniu płynną formułę w sprayu. Jest elektrolizowanym roztworem wody utleniającej oraz kwasu podchlorawego. Produkt został przetestowany dermatologicznie.

- Oczyszczanie ran oraz zapobieganie infekcjom
- Do stosowania w przypadku drobnych otarć skóry, skaleczeń, rozcięć, poparzeń oraz na nieuszkodzoną skórę
- Przemywanie ran
- Nawilżanie ran
- Do stosowania na podrażnioną i zainfekowaną skórę
- Zapobiega powstawaniu biofilmu
- Może być stosowany do nawilżenia opatrunku rany i samej rany, a także do rozmiękczenia zaschniętego opatrunku
- Wypłukuje substancje drażniące odpowiadające za nieprzyjemny zapach z rany.

Mechanizm działania

Roztwór do przemywania ran **GranuSEPT®** to elektrochemicznie zmodyfikowany roztwór wody, stabilizowany kwasem podchlorawym. Służy przede wszystkim zmianie środowiska rany: mechanicznie usuwa ciała obce, które mogą powodować podrażnienia i infekcje skóry oraz zapewnia optymalne nawilżenie, wilgotność, dotlenienie oraz pH, wspierając w ten sposób proces gojenia.

Nie zawiera alkoholu

Może być stosowany u noworodków

Nie wymaga spłukiwania

Skład:

Każda butelka wyrobu **GranuSEPT®** zawiera:

- 0,016% kwasu podchlorawego
- Substancje pomocnicze: woda jonizowana, chlorek sodu

2. Opakowanie

Wyrób medyczny dostępny w następujących opakowaniach:

butelki: 60ml, 100ml, 150ml, 250ml z pompką dozującą bądź z aplikatorem lub butelki 500ml, 1000ml z rozpylaczem ręcznym lub zakrętką.

3. Dawkowanie i sposób użycia

Nanieść **GranuSEPT®** roztwór na dotknięty obszar, aby przemyć ranę i usunąć z niej zanieczyszczenia. Stosować według potrzeb, aby zapewnić optymalne warunki gojenia.

Dla optymalnego efektu, po nałożeniu należy poczekać aż naturalnie wyschnie.

4. Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach może wystąpić niewielkie mrowienie.

5. Interakcje

Brak znanych interakcji.

6. Warunki przechowywania

Wyrób medyczny GranuSEPT® roztwór należy przechowywać w temperaturze pokojowej do maksymalnie 25°C, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i światła słonecznego. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4°C. Nie przenosić do innego opakowania. Zamykać po każdym użyciu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

7. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Wyrobu **GranuSEPT®** roztwór nie należy stosować w przypadku rozpoznanej reakcji alergicznej lub nietolerancji na którykolwiek z jego składników.

W przypadku wątpliwości można stosować w innych ranach, po konsultacji z lekarzem.

Nie należy połykać.

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

Przeznaczony do ciągłego stosowania do 30 dni bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Produkt może być stosowany równocześnie z innymi lekami wyłącznie po konsultacji lekarskiej.

8. Data ważności

Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Data ważności dotyczy roztworu **GranuSEPT**[®] znajdującego się w oryginalnym, nienaruszonym przy przechowywaniu opakowaniu.

9. Utylizacja

Po upływie daty ważności wyrób należy zutylizować zgodnie z zasadami gospodarki odpadami.

Nie należy wyrzucać **GranuSEPT**[®] ani jego opakowania do środowiska naturalnego.

Producent:

CF Pharma Ireland Ltd.
Unit 73B, Hebron Industrial Estate
Kilkenny, Irlandia

Dystrybutor:

Hexanova Sp. z o.o.
Brukowa 36
05-092 Łomianki
www.hexanova.pl

PK1812-02

Ostatnia aktualizacja ulotki: październik 2021

Wyrób medyczny  0426

