

## Treść oznakowania opakowania zewnętrznego (kartonik)

### Entil Oparzenia, żel

30 g

Leczenie oparzeń słonecznych

Leczenie innych oparzeń I<sup>o</sup> i II<sup>o</sup>

Łagodzi ból i szybko chłodzi

Zmniejsza zapalenia

Zmniejsza obrzęki

Nawadnia

### Skład:

KARBOMER, GLIKOL OKTYLENOWY, GLICEROL, GLIKOL POLIETYLENOWY, WODOROTLENEK SODU, WODA OCZYSZCZONA.

### Zastosowanie:

Entil Oparzenia jest hydrożelem opartym na bazie fizycznej aktywności osmotycznej, przeznaczonym do leczenia i łagodzenia oparzeń powierzchniowych I<sup>o</sup> i II<sup>o</sup> (ból, zaczerwienienie i pojawianie się pęcherzy na ograniczonej powierzchni): oparzenia domowe, oparzenia słoneczne. Łagodzi miejscowe objawy zapalne skóry powstałe w wyniku skaleczeń, otarć, zadrapań.

### Opis działania:

- Łagodzi ból (szybko chłodzi tkanki skóry, łagodzi i ogranicza rozprzestrzenianie się rany)
- Zmniejsza zapalenia skórne
- Pomaga uniknąć infekcji • Ponownie nawadnia (ponownie nawadnia powierzchowne warstwy skóry i wspomaga gojenie się uszkodzeń skóry)
- Zmniejsza obrzęki

### Sposób postępowania z wyrobem

Stosować na skórę. Nanieść Entil Oparzenia na całą oparzoną powierzchnię, lekko wmasowując. Pozostawić do wchłonięcia. Powtarzać 2 do 3 razy dziennie.

**Tylko do użytku zewnętrznego. Przed użyciem zapoznaj się z dołączoną ulotką.**

### Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności

Podczas nanoszenia wyrobu może towarzyszyć uczucie ściągania.



Unikać kontaktu z oczami.

Nie stosować na otwarte rany. Nie stosować wyrobu w połączeniu z innymi produktami o podobnym zastosowaniu.

### Miejsce i warunki przechowywania

**Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**

Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu. Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie, pod warunkiem, że po każdorazowym użyciu wyrobu opakowanie jest ponownie szczelnie zamykane.

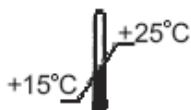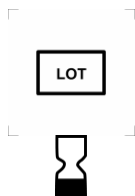



**AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.**

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151