



---

**ŻEL**  
nawilżająco-ochronny

---

## INSTRUKCJA UŻYWANIA

### 1. Co to jest *Vagical* PROTECT nawilżająco-ochronny żel intymny?

Nawilżająco-ochronny żel intymny *Vagical* PROTECT przeznaczony jest do stosowania na zewnętrzne narządy płciowe kobiet (wargi sromowe, przedsionek pochwy). Zawiera kwas hialuronowy, kwas mlekowy, ekstrakt z kwiatów nagietka lekarskiego oraz ekstrakt z aloesu.

*Vagical* PROTECT żel łagodzi objawy towarzyszące nadmiernej suchości pochwy takie jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego *Vagical* PROTECT nawilża okolice błon śluzowych przedsionka pochwy i warg sromowych oraz tworzy warstwę ochronną zapobiegającą podrażnieniom i otarciom. Zawarty w żelu kwas mlekowy sprzyja utrzymaniu odpowiedniego pH okolic intymnych oraz tworzy środowisko sprzyjające rozwojowi korzystnej flory bakteryjnej. Ekstrakty roślinne (aloes, nagietek lekarski) działają łagodząco na podrażnienia oraz wspomagają regenerację nabłonka zewnętrznych okolic intymnych po przebytych stanach zapalnych.

---

### 2. W jakim celu stosuje się *Vagical* PROTECT nawilżająco-ochronny żel intymny?

Żel intymny *Vagical* PROTECT może być stosowany:

- w suchości okolic intymnych, w tym związanej z przyjmowaniem doustnej antykoncepcji hormonalnej oraz w przebiegu menopauzy;
- jako profilaktyka i ochrona przed infekcjami (zwłaszcza po korzystaniu z basenu, sauny, w trakcie i po zakończeniu antybiotykoterapii, podczas przewlekłego stresu);
- po przebytych infekcjach i stanach zapalnych okolic intymnych;
- w przypadku bolesnych kontaktów intymnych;
- w przypadku odczuwania dyskomfortu, pieczenia oraz świądu okolic intymnych;
- w podrażnieniach i otarciach okolic intymnych.

### 3. Skład

Sodium Hyaluronate, Lactic Acid, Calendula Officinalis Flower Extract, Aloe Vera Gel, Glycerin, Aqua Purificata, Carbomer, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Triethanolamine.

---

### 4. Sposób użycia

Niewielką ilość żelu nanieść na błonę śluzową przedsionka pochwy i warg sromowych. Stosować 1-3 razy dziennie w zależności od potrzeb.

---

### 5. Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

U kobiet w ciąży i matek karmiących przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

---

### 6. Przechowywanie

Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

---

### 7. Opakowanie

Opakowanie zawiera 50g żelu.

Data aktualizacji instrukcji używania: 03.2020

