

Instrukcja używania wyrobu medycznego

CANDITON® emulsja

Emulsja medyczna do higieny intymnej dla osób ze skłonnościami do infekcji grzybiczych

Opis:

Canditon® emulsja to wyrób medyczny do higieny intymnej, który wspomaga miejscowe leczenie infekcji intymnych, w szczególności u osób ze skłonnościami do infekcji o charakterze grzybiczym. Opracowana formuła ogranicza nawroty infekcji, łagodzi objawy takie jak: świąd, pieczenie, podrażnienie okolic zewnętrznych narządów płciowych. Likwiduje nieprzyjemny zapach. Przywraca fizjologiczne pH stref intymnych. Dzięki zawartości aktywnej miedzi-aXonnite®MED i olejku z drzewa herbacianego tworzy barierę ochronną i hamuje rozwój patogenów wywołujących infekcje bakteryjne lub grzybicze. Emulsja medyczna Canditon® zalecana jest dla osób ze skłonnościami do infekcji grzybiczych.

- Specjalna formuła przeciwgrzybicza z aktywną miedzią
- Przywraca fizjologiczne pH 4,5
- Testowany dermatologicznie i ginekologicznie

Wskazania:

Wspomaga leczenie infekcji grzybiczych pochwy u kobiet oraz dziewcząt od 12 r.ż.
Chroni przed nawrotami infekcji grzybiczych oraz bakteryjnych.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Produktu nie należy używać do celów innych niż wskazane w instrukcji używania wyrobu;
- Przed nałożeniem produktu należy dokładnie umyć ręce;
- Po nałożeniu produktu należy go delikatnie spłukać wodą;
- Unikać kontaktu emulsji z oczami. W przypadku dostania się do oczu należy natychmiast przemyć je wodą;
- Nie używać produktu po dacie ważności wydrukowanej na opakowaniu;
- Nie zamrażać;
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci;
- Do użytku miejscowego;
- Nie stosować doustnie;
- Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte;
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników;
- Zaprzestać stosowania w przypadku nietypowych reakcji skórnych;
- W przypadku braku poprawy należy skontaktować się z lekarzem

Stosowanie u kobiet w ciąży

W trakcie ciąży stosować emulsję Canditon® jedynie na zalecenie i pod bezpośrednią kontrolą lekarza.

Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem kilkakrotnie nacisnąć pompkę do pojawienia się emulsji. Dawkę emulsji 1-2 aplikacji nanieść na czystą dłoń, rozcieńczyć wodą i umyć miejsca intymne a następnie spłukać wodą.
Stosować raz dziennie, najlepiej podczas higieny przed snem. Stosować do całkowitego ustąpienia objawów, maksymalnie 30 dni, dłuższe stosowanie należy skonsultować z lekarzem.
Wyrób medyczny Canditon® emulsja można stosować z wyrobem medycznym Canditon® globulki dopochwowe.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze 5-25 st. C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład:

woda, kokamidopropylobetaina, poliglucozyd laurylowy, gliceryna, chlorek sodu, polisorbit 20, kwas borowy, kwas mlekowy, glikol kaprylowy, benzoesian sodu, pantenol, alantoina, sorbinian potasu, olejek z drzewa herbacianego, miedź aXonnite®MED, wodorotlenek sodu.

- Produkt hipoałergiczny
- Produkt testowany dermatologicznie i ginekologicznie
- Produkt nie zawiera SLS, SLES, parabenów.

Opakowanie:

Butelka z dozownikiem 100 ml

Wytwórca:

Hexanova Sp. z o.o.
ul. Brukowa 36
05-092 Łomianki



100 ml

LF-CIE.5.11.21

Data zatwierdzenia: 11/2021