



Product/ Product:	<b>ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:</b>	
Wzór/Artwork:	<b>ULT-006162_3</b>	
Preparat/ Product:	<b>SOFTEYE BLEPHA+ CHUSTECZKI DO OCZU Z KOMPRESEM</b>	
Czcionki/ Fonts:	Tekst/Text: Arial 8 pt Nazwa/Name: -	
Farmakod/ Pharmacode:	<b>XXX</b>	
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 150 x 210 mm	
Kolorystyka/ Colours:		
Opracował/ Prepared by:	24.06.2021 M.Pytlik	



SOFTEYE<sup>®</sup>  
BLEPHA+

ULT-006162\_3

BEZ KONSERWANTÓW

**CHUSTECZKI OKULISTYCZNE DO CODZIENNEJ HIGIENY POWIEK DLA OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI W ZESTAWIE Z OGRZEWALNYM KOMPRESEM NA OKO**

#### WSKAZANIA:

**SOFTEYE BLEPHA+** to jednorazowe chusteczki z naturalnej bawełny, nasączone roztworem zawierającym Hy-Ter<sup>®</sup> (hialuronian sodu i naturalny ekstrakt z drzewa herbacianego) i aloes - o działaniu oczyszczającym, zmiękczającym, kojącym i udrażniającym.

Formuła **SOFTEYE BLEPHA+** opiera się na naturalnych składnikach przeciwzapalnych i odkażających, dzięki czemu produkt ten przynosi szybką ulgę.

Właściwa higiena powiek jest kluczowa w przypadku potencjalnego i trwającego stanu zapalnego i infekcji.

Dzięki zastosowaniu formuły Hy-Ter<sup>®</sup> wyrób medyczny **SOFTEYE BLEPHA+** jest wskazany do higieny powiek i rzęs, a także pomocniczo:

- jako środek odkażający przed i po zabiegach chirurgicznych,
- w leczeniu bakteryjnego i alergicznego zapalenia spojówek,
- w zapaleniu powiek i spojówek.

W tylnym zapaleniu brzożów powiek dochodzi do zablokowania ujść gruczołów Meiboma. Są one zlokalizowane na wewnętrznej stronie powiek; ich wydzielina zapobiega parowaniu filmu łzowego. Zastosowanie ciepłego kompresu na oko w połączeniu z masażem powieki umożliwia odblokowanie i oczyszczenie ujść tych gruczołów, dzięki czemu mogą one wznowić naturalną produkcję lipidów niezbędnych do utrzymania w dobrym stanie filmu łzowego.

#### SKŁAD:

Woda, PEG / PPG – 20/15 dimetikon, wyciąg z aloesu zwyczajnego, Hy-Ter<sup>®</sup> (hialuronian sodu, 4-terpineol), glicyryzian amonu, glukozyd kaprylowo-kaprynowy, sól sodowa kokoiloaminokwasów pszenicy, etyloheksylogliceryna, alkohol fenyloetylowy, chlorek sodu, fosforan sodu, wodorofosforan sodu, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 uwodorniony olej rycynowy.

#### OPAKOWANIE

14 jednorazowych chusteczek + 1 ogrzewalny kompres

#### SPOSÓB UŻYWANIA:



1. Rozgrzej kompres do momentu zmiany barwy z pomarańczowej na żółtą. Zmiana zabarwienia na żółte oznacza, że kompres osiągnął temperaturę odpowiednią do wykonania skutecznego masażu oka.

#### JAK ROZGRZAĆ KOMPRES

Kompres można rozgrzać następującymi sposobami:

1. Trzymaj kompres pod bardzo gorącą wodą z kranu do momentu zmiany zabarwienia.
2. Trzymaj za skrzydełko kompres zanurzony w gorącej wodzie, aż jego barwa zmieni się z pomarańczowej na żółtą.

Przed wykonaniem masażu oka zawsze sprawdź temperaturę kompresu, przykładając go do wewnętrznej strony swojego nadgarstka. Jeśli jest zbyt gorący, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

Jeśli barwa nie jest jednorodna, potrząśnij kompresem przed użyciem.

2. Trzymaj ciepły kompres za skrzydełko, przez 3-5 minut masuj powiekę z lekkim naciskiem.
3. Zaraz po zaaplikowaniu kompresu na oko otwórz saszetkę korzystając z nacięcia i wyjmij chusteczkę.
4. Rozłóż chusteczkę i delikatnie oczyść powieki i rzęsy w kierunku od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego, cały czas trzymając oko zamknięte.

Po użyciu opłucz kompres wodą i umieść z powrotem w opakowaniu. Jeśli kompres nie powróci do pierwotnego koloru, schowaj go na noc do lodówki. Przed ponownym użyciem sprawdź, czy kompres nie jest uszkodzony.

Używaj jednej chusteczki na jedno oko. Po użyciu umyj ręce.  
Nie przemywaj oka po zastosowaniu produktu.

#### MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem wyrobu medycznego.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego należy skontaktować się z lekarzem.

#### OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Do użytku zewnętrznego: do stosowania wyłącznie w okolicach oka, przy zamkniętych oczach. Nie stosować produktu w przypadku zdiagnozowanej nadwrażliwości na dowolny jego składnik. W razie utrzymującego się uczucia pieczenia należy przerwać stosowanie.

Należy uważnie przestrzegać instrukcji dotyczących ogrzewania kompresu i sprawdzania jego temperatury.

Nie stosować ponownie częściowo zużytej chusteczki, aby uniknąć zanieczyszczenia produktu i osłabienia jego skuteczności.

Każda saszetka jest przeznaczona do jednorazowego użytku; należy otworzyć ją bezpośrednio przed zastosowaniem.

Nie stosować, gdy saszetka jest niedomknięta i/lub opakowanie jest uszkodzone.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie przebiegać kompresu i/lub połykać produktu.

Po wykorzystaniu ostatniej chusteczki należy wyrzucić kompres.

#### PRZECHOWYWANIE

Nie należy stosować wyrobu medycznego **SOFTEYE BLEPHA+** po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej i unikać kontaktu z wodą.

Termin ważności odnosi się do nienaruszonego i właściwie przechowywanego produktu.

Puste opakowanie wyrobu medycznego powinno być zutylicowane zgodnie z lokalnymi przepisami. Dotyczy to również niewykorzystanego przeterminowanego produktu.

#### OPIS SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA OPAKOWANIU:



= wyrób jednorazowego użytku



= dołączona ulotka



= nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



= po użyciu wyrzucić do kosza na śmieci



= temperatura przechowywania



= producent



= numer partii



= termin ważności

#### WYRÓB MEDYCZNY

CE 0477



NTC Srl  
Via Luigi Razza, 3  
20124 Mediolan  
Włochy

#### DYSTRYBUTOR

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA  
ul. Pelplińska 19  
83-200 Starogard Gdański



SOFTEYE®  
BLEPHA+

Data ostatniej weryfikacji ulotki: 05.2020