

ULOTKA
INFORMACYJNA

HEXATIAB®

kapsułki dopochwowe **SOFTGEL**

Przeznaczenie:

Hexatiab® SOFTGEL kapsułki dopochwowe o działaniu wspomagającym:

- w leczeniu zakażeń bakteryjnych, grzybiczych (takich jak kandydozy) i wirusowych (kłykciny)
- w leczeniu zmian poporodowych
- w zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej typu 2 (HSV-2)

Wyrób nie ma działania plemnikobójczego ani antykoncepcyjnego.

Wyrób medyczny Hexatiab® SOFTGEL kapsułki dopochwowe jest w postaci kapsulek żelatynowych o szybkim rozpuszczaniu. Dzięki właściwościom swoich składników wyrób zapewnia barierę ochronną wspomagającą leczenie zakażeń bakteryjnych i wirusowych, takich jak zapalenie sromu i pochwy, opryszczka narządów płciowych i brodawki oraz zmiany poporodowe. Tworzy barierę ochronną wokół zmiany, izolując i chroniąc tkanki przed zewnętrznymi czynnikami drażniącymi i ułatwiając prawidłowy fizjologiczny proces tworzenia blizny i gojenia.

Wyrób medyczny Hexatiab® SOFTGEL kapsułki dopochwowe posiada podwójny mechanizm działania:

- izoluje miejsce zastosowania przed atakiem zewnętrznych drobnoustrojów
- ogranicza kolonizację drobnoustrojów w miejscu aplikacji, tworząc idealne warunki do przywrócenia naturalnych warunków fizjologicznych w tkankach.

Instrukcja stosowania:

1. Dokładnie umyć okolice zewnętrznych narządów płciowych przed użyciem kapsułki.
2. Wprowadzić miękką kapsułkę głęboko do pochwy.
3. Powtarzać aplikację raz na dobę przez co najmniej siedem kolejnych dni.

Wyrób medyczny należy stosować po wystąpieniu pierwszych objawów (świądu, pieczenia, dyskomfortu, itp.). Nie ma konieczności stosowania odstępu czasu po leczeniu miejscowym.

Ostrzeżenia:

- Nie stosować produktu w innych wskazaniach niż podane w ulotce informacyjnej.
- Należy dokładnie umyć ręce przed aplikacją.
- Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.
- Nie zamrażać.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Do stosowania miejscowego – nie potykać.
- Nie stosować, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
- Nie stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek za składników.
- Przerwać leczenie w razie wystąpienia nieprawidłowej reakcji skórnej.
- W przypadku długotrwałego stosowania skonsultować się z lekarzem.
- W trakcie ciąży i karmienia piersią, stosować wyrób jedynie na zalecenie i pod bezpośrednią kontrolą lekarza.
- Używać wyrób na nieuszkodzony nabłonek.
- Wyrób nie jest produktem plemnikobójczym ani antykoncepcyjnym.

Przeciwwskazania:

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania.

Potwierdzona nadwrażliwość na składniki wyrobu.

Nie stwierdzono interakcji z lekami ani substancjami leczniczymi.

Warunki przechowywania:

Przechowywać z dala od wilgoci i źródeł ciepła.

Produkt wystawiony na działanie światła słonecznego może przybrać lekko żółty kolor, ale nie wpływa to na jego działanie ani trwałość.

Skład:

TIAB (jony srebra związane kowalencyjnie z mikrokryształkami dwutlenku tytanu), hialuronian sodu, wyciąg z Aloe Barbadensis, trigliceryd kaprylowo-kaprynowy, stearynian PEG-6 (i) stearynian glikolu (i) stearynian PEG-32, stearynian glicerylu.

Opakowanie:

Kartonik zawiera 10 kapsulek dopochwowych

Data aktualizacji: 11/2019



Producent: NTC S.r.l.
Via Luigi Razza, 3
20124 Mediolan, Włochy

Dystrybutor w Polsce:
HEXANOVA Sp. z o.o.
ul. Brukowa 36, 05-092 Łomianki

LFTIA03301

