

NOWOŚĆ!

roztwór do płukania nosa



ISONASIN
wyrób medyczny

katar wodnisty i gęsty
septo

Zahamuj infekcję **USUŃ KATAREK Z NOSKA MALUSZKA**

ISONASIN septo katar wodnisty i gęsty

Niezbędny w każdej apteczce roztwór do płukania nosa przy przeziębieniu i zapaleniu błony śluzowej. Dla niemowląt, dzieci i dorosłych.

Porady dla rodziców

Dlaczego ważne jest właściwe oczyszczanie noska maluszka podczas infekcji?

Katar wodnisty i gęsty nie tylko utrudnia oddychanie maluszka. Wydzielina z noska zawiera liczne drobno-ustroje (wirusy i bakterie) i może stać się przyczyną rozwoju infekcji i jej rozprzestrzeniania wewnątrz organizmu. Wirusy i bakterie mogą rozmnażać się i wędrować w obrębie dróg oddechowych powodując zapalenie gardła, oskrzeli, a nawet ucha środkowego!

Ponieważ noworodki i niemowlęta nie potrafią wydmuchać noska, oczyszczanie i wyplukiwanie wydzieliny jest bardzo ważne.

Co to jest ISONASIN septo i jak działa?

ISONASIN SEPTO katar wodnisty i gęsty to roztwór do płukania nosa stosowany przy przeziębieniach i zapaleniu śluzówki nosa i gardła. Zawiera kompleks upłynniający – chlorek sodu (obecny w wodzie morskiej, a w stężeniu 0,9% zwany jest solą fizjologiczną), tymianek znany ze swoich właściwości antybakteryjnych oraz jony miedzi pomagające usuwać bakterie oraz zapobiegają ich namnażaniu.

Płukanie preparatem **ISONASIN septo** pozwala na:

- zmniejszenie niedrożności nosa
- usunięcie śluzu oraz czynników powodujących infekcje
- zmniejszenie objawów związanych z przeziębieniem – dzięki zawartości miedzi.

Dzięki temu **ISONASIN septo** pomaga usprawnić oddychanie i przyspiesza ustępowanie infekcji.

Czy każdy preparat do płukania noska noworodków, niemowląt i dzieci jest tak samo bezpieczny?

Oczyszczając noskę z użyciem sprayu istnieje ryzyko uszkodzenia noska przez końcówkę aplikatora lub ciśnienie wody wyrzucanej z pojemnika. Dlatego roztwory takie jak **ISONASIN septo** są bezpieczniejsze dla noska maluszka.



Jakie zalety ma ISONASIN septo w postaci plastikowych ampulek?

ISONASIN septo jest przygotowany w postaci jednorazowych plastikowych ampulek, aby ułatwić bezpieczne i higieniczne płukanie noska maluszka. Ampułka **ISONASIN septo** jest wygodna w użyciu nawet podczas spaceru lub w podróży.



Już od 1. dnia życia!

Porady dotyczące stosowania **ISONASIN septo**:

Preparat **ISONASIN septo** należy stosować przed podaniem leku, a nie po jego podaniu - dotyczy leczenia z aplikacją donosową z użyciem preparatów leczniczych. Otwarta ampulka jest narażona na zanieczyszczenie drobnoustrojami. Przechowywać z dala od źródła światła i nadmiernej temperatury. Ampulka JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. NIE WSTRZYKIWAĆ. NIE UŻYWAĆ tej samej ampulki dla kilku osób. NIE UŻYWAĆ do oczu.



Otwórz ampulkę zawierającą pojedynczą dawkę.


Uchwyć końcówkę i przekręć ją do momentu całkowitego jej oderwania od ampulki.

Delikatnie naciśnij ampulkę w celu aplikacji roztworu.




Instrukcja użycia do nosa **ISONASIN septo**:

- u noworodków, niemowląt i dzieci:

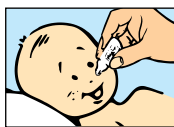

Połóż dziecko na plecach, z głową odchyloną na jedną stronę. Delikatnie wsuń końcówkę ampulki do otworu nosa. Delikatnie ściśnij ampulkę w celu zaaplikowania wymaganej dawki preparatu. Powtórz ten sam zabieg w odniesieniu do drugiego otworu nosa. W przypadku niemowląt, zawsze należy aplikować preparat przy zastosowaniu minimalnego ciśnienia w celu uniknięcia wystąpienia ryzyka zanieczyszczenia ucha środkowego.

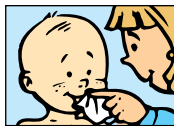

Odczekaj chwilę, pozwalając na to, aby roztwór zaczął działać, następnie unieś głowę dziecka. Delikatnie osusz nadmiar płynu.

W przypadku niemowląt, o ile jest to konieczne, nadmiar płynu można również odciągnąć za pomocą aspiratora do nosa.

Zobacz film: jak stosować **ISONASIN septo**: www.isonasin.pl

Dawkowanie: Dwa do trzech płukań dziennie. Preparatu nie należy stosować przez okres dłuższy niż kilka dni.

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją użycia, która zawiera istotne informacje dotyczące sposobu i warunków jego stosowania.

Skład: Chlorek sodu 0,9 g, Polisorbat 80, Wyciąg z tymianku, Pentahydrat siarczanu miedzi, Glicerol, Woda oczyszczona q.s. do 100 ml. Preparat nie zawiera środków konserwujących.

Zawartość opakowania: 20 ampulek

Dystrybutor: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice, www.tactica.pl

Wytwórca: Gifer Barbezat, 8 -10 rue Paul Bert, 69150 DECINES CHARPIEU – FRANCJA



W/isonsep/07/07-2014

