

COLPOFIX®

10 | APLIKATORÓW
DOPOCHWOWYCH

INFORMACJA

Colpofix® jest innowacyjnym preparatem pod względem formuły i sposobu użycia. To żel o właściwościach tiksotropowych, który w czasie dozowania pod wpływem mechanicznej kompresji zamienia się w płyn, a po aplikacji ponownie przekształca się w żel. Cecha ta pozwala na równomierne i efektywne rozprowadzenie preparatu mukoadhezyjnego, bezpośrednio i dogłębnie na błonę śluzową szyjki macicy i pochwy, bez wycieków, dzięki ergonomicznej kaniuli.

Colpofix® zawiera następujące substancje czynne: polikarbofil i karboksymetylo-beta-glukan.

Colpofix® to skuteczny żel dopochwowy o wielokierunkowym działaniu:

- tworzy mukoadhezyjną powłokę ochronną, która chroni błonę śluzową pochwy przed zewnętrznymi czynnikami mikrobiologicznymi,
- wspomaga gojenie ran i cofanie się zmian w szyjce macicy oraz przyczynia się do utrzymania i kontroli warunków fizjologicznych błony śluzowej poprzez jej nawilżenie,
- utrzymuje oraz przywraca mikroflorę pochwy poprzez regulację jej pH i działania prebiotyczne.

WSKAZANIA

Zapobieganie i leczenie zmian szyjki macicy wywołanych przez HPV dzięki możliwości kontroli i utrzymywania warunków fizjologicznych obszaru zmian błony śluzowej szyjki macicy i pochwy.

SKŁAD

Woda, sorbitol, karboksymetylo-beta-glukan, usieciowany polimer akrylowy (polikarbofil), mocznik imidazolidynowy, dehydrooctan sodu.

UWAGA

Kolor żelu może ulec zmianie ze względu na zastosowanie naturalnych składników, które mogą się zmieniać bez wpływu na jakość produktu. Produkt do stosowania dopochwowego. Produktu nie należy spożywać. Jeśli jesteś lub możesz być w ciąży lub jesteś poddawana równoczesnej terapii lekami miejscowymi, roztwór ginekologiczny może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Długotrwałe stosowanie produktu, podobnie jak wszystkich produktów miejscowych, może powodować miejscowe uczulenia lub podrażnienia; w razie ich wystąpienia należy przerwać kurację i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie używać produktu, jeśli opakowanie lub kaniula są uszkodzone lub noszą ślady użytkowania przy pierwszym otwarciu. Produkt należy stosować zgodnie z jego instrukcją użycia. Kaniula jest przeznaczona do jednorazowego użytku i nie powinna być ponownie używana.


PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła. Podana data ważności dotyczy produktu w stanie nienaruszonym i prawidłowo przechowywanego.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Nie wstrząsać produktu przed użyciem.

Wyciągnąć aplikator dopochwowy z jego osłony ochronnej. Odkręcić zakrętkę buteleczki. Umieścić aplikator w dyszy dozującej buteleczki. Uruchomić dozowanie, wciskając kilkakrotnie przycisk, aż do pojawienia się produktu. Włożyć aplikator głęboko do pochwy, leżąc na plecach, ze zgiętymi kolanami. Wykonać 5 przyciśnień dozownika w czasie jednej aplikacji. Po użyciu aplikator należy wyrzucić. Zamknąć buteleczkę nakrętką.

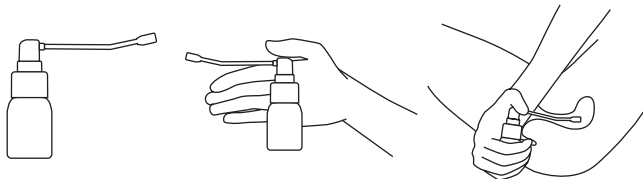

SPOSÓB UŻYCIA

Zaleca się wykonanie jednej aplikacji (5 przyciśnień dozownika) dziennie, przez 10 dni, na noc. Wznowić stosowanie zgodnie ze wskazaniami lekarza.

1 buteleczka wystarcza na 10 dni kuracji.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Żelu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu. Dotychczasowe badania produktu nie wykazały żadnych uczuleń ani innych skutków ubocznych. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu, należy skonsultować się z lekarzem.

OPAKOWANIE

Pudełko zawiera butelkę o pojemności 20 ml i 10 jednorazowych aplikatorów w pojedynczych opakowaniach. Nie zawiera substancji zapachowych.

Colpofix® jest wyrobem medycznym klasy IIa zgodnym z przepisami dyrektywy 93/42/EWG i jej późniejszymi aktualizacjami.

Produktu nie wolno wyrzucać do kanalizacji ani przydomowych pojemników na odpadki. W celu ochrony środowiska należy zapytać farmaceutę o sposób jego utylizacji.

Data ostatniej aktualizacji: wrzesień 2020 r.


Uriach Italy S.r.l. A SOCIO UNICO
Assago Milanofiori Strada 1,
Palazzo F6 - 20057 Assago (MI)

Dystrybutor:

SOLINEA

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska

 0373

17855/2104