

INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU

FEMINUM®

nawilżający żel intymny

z kwasem mlekowym

Przeznaczenie wyrobu:

FEMINUM® żel to specjalny środek eliminujący niedobory wydzielania śluzu w pochwie.

Preparat ułatwia stosunki płciowe w przypadku suchości pochwy (także z użyciem prezerwatywy), przeprowadzanie badań ginekologicznych, ultrasonograficznych, aplikowanie tamponów, tabletek dopochwowych oraz pomiar temperatury.

FEMINUM® żel jest preparatem chroniącym przed otarciami prowadzącymi często do infekcji pochwy i zewnętrznych narządów płciowych.

FEMINUM® żel może być stosowany wiele razy dziennie, bez ograniczeń wieku, regularnie i odpowiednio do potrzeb, zarówno przez kobiety w ciąży, jak i matki karmiące piersią.

FEMINUM® żel jest obojętny dla skóry, a jego długotrwałe stosowanie nie zaburza równowagi hormonalnej organizmu. Używanie innych przypadkowych środków zawierających tłuszcze lub substancje nierozpuszczalne w wodzie jak kremy, mleczka kosmetyczne oraz oliwki powoduje podrażnienie, zaczerwienienie i ból.

FEMINUM® jest dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe.

Nawilżający żel intymny dla kobiet FEMINUM® to klarowny, lekki żel o fizjologicznym, lekko kwaśnym odczynie (pH ok. 4,0), który sprawia, że skóra krocza nabiera dawnej elastyczności, przez co staje się bardziej odporna na otarcia i zadrapania.

FEMINUM® żel jest preparatem zupełnie neutralnym, nie pozostawiającym plam na bieliźnie.

Sposób użycia:

Należy umyć ręce przed zastosowaniem wyrobu.

Niewielką ilość żelu (w zależności od potrzeb) należy nałożyć na miejsca narażone na otarcia – także przed kontaktem intymnym lub badaniem. W razie potrzeby użyj większej ilości żelu.

Po użyciu zamknij szczelnie tubę oraz ponownie umyj ręce.

FEMINUM® żel może być aplikowany również bezpośrednio na prezerwatywę, w przeciwieństwie do innych preparatów opartych na bazie oleju.

Uwaga:

FEMINUM® żel nie jest środkiem antykoncepcyjnym.

Zaleca się ograniczyć stosowanie preparatu podczas podejmowania prób poczęcia.

Ze względów higienicznych to samo opakowanie wyrobu nie powinno być użytkowane jednocześnie przez inne osoby.

Środki ostrożności:

Stosowanie żelu należy przerwać w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

W przypadku zastosowania żelu na uszkodzoną skórę lub błony śluzowe mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, takie jak pieczenie, podrażnienie. Działania te zazwyczaj ustępują samoistnie po wygojeniu rany.

W razie utrzymywania się tego rodzaju dolegliwości może zaistnieć konieczność odstawienia wyrobu.


Unikać kontaktu z oczami ze względu na możliwość podrażnienia.

Preparatu nie należy stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu, także w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że opakowanie było wcześniej otwarte lub uszkodzone.

Niewykorzystany lub przeterminowany wyrób należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na odpady medyczne znajdującego się w aptece.

Składniki wyrobu:

gliceryna, hydroksyetyloceluloza, kwas mlekowy, hydroksybenzoesan metylu, hydroksybenzoesan propylu, woda oczyszczona.

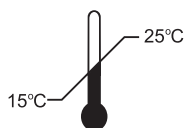

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. 15°C – 25°C.

Chronić przed światłem i wysoką temperaturą.

Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętej tubie w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dostępne opakowania: saszetka 4 g,
tuba 10 g, 40 g, 45 g, 60 g.

Wytwórca: masters[®] Sp. z o.o.

Wysogotowo, ul. Skórzewska 30

62-081 Przeźmierowo

tel. +48 61 872 15 17

www.masterspharm.pl

WYRÓB MEDYCZNY  2460

Pytania i uwagi dotyczące wyrobu prosimy kierować na adres wytwórcy lub za pośrednictwem ankiety umieszczonej na stronie www.masterspharm.pl

Data opracowania instrukcji: wrzesień 2017

Polecamy także inne wyroby medyczne z linii FEMINUM[®].

**Feminum[®]
AKTIV**

(zawiera dodatkowo kwas hialuronowy,
który wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy)

- w nawracających podrażnieniach i otarciach okolic intymnych;
- przy suchości śluzówki pochwy spowodowanej m.in. stresem, wiekiem i niedoborem estrogenów;
- po leczeniu, któremu towarzyszy suchość pochwy;
- w okresie menopauzy;
- po porodzie i zabiegach ginekologicznych.

**Feminum[®]
fit**

(zawiera dodatkowo fitoglikogen, będący źródłem
substancji odżywczych dla bakterii kwasu mlekowego)

- pomocniczo w leczeniu i zapobieganiu infekcjom intymnym, np. bakteryjnemu zapaleniu pochwy;
- podczas antybiotykoterapii doustnej oraz po zakończeniu antybiotykoterapii doustnej i dopochwowej;
- w przypadku uczucia dyskomfortu okolic intymnych (nieprzyjemny zapach i nieprawidłowa wydzielina z pochwy);
- w nawracających podrażnieniach i otarciach okolic intymnych;
- pomocniczo przy suchości pochwy.

www.feminum.pl