

Wartix

Środek do szybkiego usuwania kurczaków / z dłoni i stóp

PL

- Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką informacyjną - Wyłącznie do użytku zewnętrznego
- Wyrób przeznaczony do zastosowania u dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia

ZAWARTOŚĆ

Opakowanie WARTIX zawiera:

- Dozownik z aplikatorem zawierający dimetyloeter
- Ulotkę informacyjną
- Plastry ochronne (8 szt.)
- Gaziki czyszczące (16 szt.)

Zawartość dozownika: 20 ml

Opakowanie WARTIX zawiera 15 dawek.

1. KURZAJKI I ICH LECZENIE

Kurczajki stanowią częsty problem. Niemalże każdy miał kurczawkę w jakimś momencie swojego życia. Kurczajki są wywoływane przez ludzkiego wirusa brodawczaka (HPV), który występuje powszechnie w naszym środowisku. Istnieje wiele różnych typów kurczaków. Zdecydowana większość z nich występuje na rękach i stopach. Kurczajki występujące na rękach, kolanach i twarzy mają zwykle twardą i szorstką powierzchnię i wyglądają jak „kalefior”. Kurczajki występujące na stopach, nazywane także brodawkami, mają zazwyczaj twarde krawędzie i czarne plamki w środku. Występują na przedniej części podeszwy, pod główkami kości śródstopia, na podstawie pięty i na palcach.

Kurczajki wyglądają nieestetycznie, mogą być niewygodne a nawet bolesne. Mają także tendencję do nawracania, dlatego należy je leczyć możliwie najszybciej i jak najskuteczniej. Za najskuteczniejszą metodę leczenia kurczaków powszechnie uznaje się wymrażanie (nazywane także krioterapią).

WARTIX wykorzystuje tę metodę, jest skuteczny a dodatkowo wyjątkowo bezpieczny oraz łatwy w użyciu. Płyn zamrażający aplikowany jest bezpośrednio na kurczawkę, która ulega wymrożeniu aż po rdzeń. Proces wymrażania może spowodować zaczerwienienie lub pojawienie się pęcherzyków na skórze, co jest zupełnie normalnym zjawiskiem. Zazwyczaj wystarcza pojedyncze zastosowanie WARTIX. Po 10 – 14 dniach od wymrożenia, kurczawka odpada, pozostawiając zdrowy, zregenerowany naskórek.

2. SPOSÓB UŻYCIA

NIE należy zdejmować plastikowego aplikatora z dozownika!



1 Zwrócić kurczawkę ku górze tak, aby zmieściła się w komorze aplikatora (skierowanego ku dołowi). Następnie przyłożyć aplikator tak, by krawędzie komory szczelnie przylegały do skóry wokół kurczajki.



2 Trzykrotnie przycisnąć dozownik kciukiem, aby uwolnić płyn zamrażający. Przytrzymać aplikator na kurczawce przez co najmniej 10 sekund.



3 Zdjąć aplikator z kurczajki. W tym momencie może wystąpić uczucie mrowienia lub niewielkiego bólu.



Po zastosowaniu należy oczyścić aplikator gazikiem czyszczącym, znajdującym się w opakowaniu WARTIX.

Jeżeli po zastosowaniu WARTIX kurczawka jest uniesiona i/ lub bardzo wrażliwa, można zakleić ją plasterem ochronnym znajdującym się w zestawie.

UWAGA!

W większości przypadków pojedyncze zastosowanie WARTIX jest wystarczające. Jeżeli kurczawka nie odpadnie w ciągu dwóch tygodni od wymrażania, zabieg można powtórzyć. Czasami pomocne jest, przed zastosowaniem WARTIX, namoczyć kurczawkę w wodzie, żeby ją zmiękczyć. Jedną kurczawkę można wymrażać maksymalnie cztery razy (przy czym należy zachować dwutygodniowy odstęp czasu między kolejnymi zabiegami). Jeżeli po czterech próbach kurczawka nie odpadnie, najlepiej zgłosić się do lekarza. W przypadku małej grupy brodawek położonych blisko siebie, najlepiej wymrozić każdą z osobna, zachowując dwutygodniowy odstęp czasu między kolejnymi zabiegami.

Jeżeli nie są Państwo pewni, czy zmiana skórna jest kurczawką, najlepiej skonsultować się z lekarzem.

3. PO LECZENIU

- W trakcie lub bezpośrednio po wymrażeniu kurczajki może wystąpić uczucie mrowienia lub niewielkiego bólu.
- Po zabiegu może powstać pęcherzyk. **NIE NALEŻY GO PRZEKŁUWAĆ!**
- Pęcherzyk zazwyczaj jest oznaką skutecznego leczenia.
- Proszę nie skubać ani nie drapać zamrożonej kurczajki.
- Po zabiegu kurczawka powinna pozostać czysta - należy unikać jej zainfekowania.
- Można normalnie pływać, myć się i kąpać.
- Zamrożoną kurczawkę można zakleić plasterem ochronnym zawartym w opakowaniu.

4. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Proces wymrażania może prowadzić do miejscowego występowania białych plamek na skórze (zmniejszenie pigmentacji skóry). Plamki te stopniowo znikną. **Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej ulotce może prowadzić do odmrożenia, uszkodzenia lub powstania blizn na skórze.** Jeżeli dojdzie do stanu zapalnego i/ lub jakichkolwiek innych powikłań, należy zgłosić się do lekarza.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie wolno stosować WARTIX:

- U dzieci poniżej 4. roku życia.
- U chorych na cukrzycę lub z zaburzeniami krążenia.
- W przypadku podrażnienia lub zapalenia skóry.
- Jeżeli nie są Państwo pewni, że dana zmiana jest kurczawką.
- W miejscach, w których można wykonać delikatną skórą, takich jak: twarz, szyja, pachy, biust i pośladki.
- W leczeniu brodawek na narządach płciowych.
- W leczeniu znamion, (owłosionych) pieprzyków ani żadnych innych zmian skórnych mających dziwny wygląd.
- U osób, które są uczulone na zimno.
- W skojarzeniu z żadną inną metodą leczenia kurczaków.

UWAGA

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zbiornik pod ciśnieniem: chronić przed światłem słonecznym i nie ekspozować na temperatury przekraczające 50°C. Nie przekłuwać, nie palić - nawet po zużyciu. Skrajnie łatwopalny. Nie rozpylać na otwarty płomień ani na rozżarzone materiały. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią, przed zastosowaniem WARTIX powinny skonsultować się z lekarzem.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem!

CE
0344

Rev. 01/2019/PL