

Ulotka informacyjna produktu

ARGOTIAB[®]



Z MIKROZĄSTECZKAMI AKTYWNEGO SREBRA

ARGOTIAB[®] SPRAY 125 ml

Wyrób medyczny wspomagający ochronę ran i otarć na skórze. Do użytku zewnętrznego.

Wskazania do stosowania: wyrób medyczny **ARGOTIAB[®] spray** to proszek, który dzięki swoim właściwościom pełni funkcję bariery ochronnej, zapobiegając maceracji ran, w szczególności w przypadku ran sączących oraz pomagając w przywróceniu prawidłowych warunków fizjologicznych potrzebnych do spontanicznej regeneracji skóry. Dzięki składnikom produktu, na skórze nie powstają infekcje, które często pojawiają się w obecności ran z wysiękiem, w przebiegu stopy cukrzycowej, stopy atlety oraz w przypadku odleżyn i niewielkich ran ciętych. Działanie ochronne wynika z połączenia kaolinu z kwasem hialuronowym o właściwościach hydrofilowych. Każdy z tych składników ma określone działanie: kaolin, nazywany białą gliną, działa jak materiał wchłaniający w przypadku ran sączących, kwas hialuronowy działa nawilżająco. TIAB – kompleks dwutlenku tytanu połączonego kowalencyjnie z mikrocząsteczkami aktywnego srebra, wchodzi w skład bariery utworzonej przez kaolin i kwas hialuronowy, zapewnia odporność tej bariery na ataki ze strony drobnoustrojów, wspomaga w ten sposób ochronę rany.

ARGOTIAB[®] spray jest proszkiem do stosowania miejscowego tworzącym skuteczną barierę ochronną i wspomagającym naturalne procesy odnowy tkanki poprzez podwójne działanie:

- izoluje miejsce zastosowania proszku, tworzy mikrośrodowisko rany sprzyjające jej szybkiemu i spontanicznemu gojeniu;
- chroni przed infekcjami, zabezpiecza przed tworzeniem się flory bakteryjnej w miejscu zastosowania, tworząc w ten sposób lepsze warunki do regeneracji tkanek skóry.

Sposób użycia:

1. Przed nałożeniem umyć skórę i dokładnie ją osuszyć.
2. Zaaplikować cienką warstwę proszku na chore miejsce.
3. Nie masować.
4. Powtarzać czynność dwa razy dziennie.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki wyrobu. Nie stwierdzono działań niepożądanych w przypadku przedawkowania. Nie są znane interakcje z lekami i substancjami medycznymi.

Skład:

TIAB (kompleks dwutlenku tytanu połączonego kowalencyjnie z mikrocząsteczkami aktywnego srebra), kaolin, hialuronian sodu, krzemionka, gaz: N-butan.

Termin ważności:

Termin ważności odnosi się do wyrobu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia:

- Po nałożeniu produktu nie masować; proszek musi utworzyć warstwę ochronną.
- Zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu z oczami, w razie dostania się produktu do oczu natychmiast przemyć wodą.
- Unikać zbyt długiego stosowania produktu.
- Do użytku zewnętrznego, nie połykać.
- Nie stosować produktu, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
- Nie sterylizować.
- Po użyciu opakowanie dokładnie zamknąć.
- Nie stosować produktu po upływie terminu ważności.
- Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- Przerwać stosowanie produktu w przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych na skórze.
- W przypadku długiego stosowania skonsultować się z lekarzem.
- Zastosowanie produktu nie wymaga pomocy innych osób.

UWAGA:

Aerozol łatwopalny. Łatwopalne pojemniki z aerozolem pod ciśnieniem mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wyrób medyczny CE 0477

Wytwórca:

NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3, 20124 Mediolan, Włochy

Dystrybutor:

HEXANOVA® Sp. z o.o., ul. Brukowa 36, 05-092 Łomianki