

INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU

Feminum® AKTIV

nawilżający żel intymny

z solą sodową kwasu hialuronowego

Przeznaczenie wyrobu: Feminum® AKTIV żel przeznaczony jest do nawilżania i ochrony nadwrażliwej błony śluzowej przed agresywnymi czynnikami środowiska w przypadku suchości pochwy. Żel zawiera hialuronian sodu (sól sodową kwasu hialuronowego), który wspomaga regenerację błony śluzowej w pochwie.

Feminum® AKTIV w wyniku równoległego działania łagodzi skutki suchości pochwy poprzez:

- działanie poślizgowe, nawilżające – ogranicza możliwość wystąpienia otarć narządów płciowych,
- działanie środowiskowe – przywrócenie kwaśnego odczynu pH pochwy (3,8-4,2) i powstrzymanie rozwoju mikroorganizmów odpowiedzialnych za jej zakażenie. Żel łagodzi otarcia i wspomaga regenerację błony śluzowej narządów rodnych.

Żel Feminum® AKTIV wskazany jest do stosowania przy wszelkiego rodzaju suchości pochwy wywołanej np. niedoborem estrogenów. Może być stosowany zarówno przez kobiety w ciąży, jak i matki karmiące piersią. Feminum® AKTIV w bezpieczny sposób zastępuje osobiste nawilżenie, ułatwiając kontakty intymne. Żel można stosować przy użyciu prezerwatyw w przeciwieństwie do innych preparatów opartych na bazie oleju. Feminum® AKTIV ułatwia aplikowanie tamponów, przeprowadzanie badań USG oraz pomiar temperatury.


Sposób użycia: Niewielką ilość żelu (w zależności od potrzeb) należy nałożyć na miejsca narażone na otarcia – także przed kontaktem intymnym lub badaniem. Zastosowanie dopochwowe ułatwia założony aplikator. Feminum® AKTIV może być naniesiony bezpośrednio na prezerwatywę lub skórę. W razie potrzeby użyj większej ilości żelu. Po użyciu zamknij szczelnie tubę. W celu użycia aplikatora należy przykryć aplikator do tuby, zdjąć nakładkę ochronną i wycisnąć żel do wypełnienia aplikatora. Włożyć aplikator do pochwy, ponownie nacisnąć tubę tak, aby żel przedostał się do kanału pochwy. Po użyciu aplikator należy oczyścić (najlepiej przez wyciśnięcie niewielkiej ilości żelu przez otwór i wytarcie jej miękkim papierem) i nałożyć nakładkę ochronną. W przypadku zastosowania opakowania 4 g należy je opróżnić jednorazowo a opakowanie wyrzucić.

Uwaga: Feminum® AKTIV nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Stosowanie żelu należy przerwać w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Unikać kontaktu z oczami.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami. Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. 15°C-25°C. Ze względów higienicznych zaleca się stosowanie jednego opakowania wyrobu przez jedną osobę.

Składniki wyrobu: gliceryna, hydroksyetyloceluloza, hialuronian sodu (sól sodowa kwasu hialuronowego), kwas mlekowy, octan chlorohexydy, woda oczyszczona.

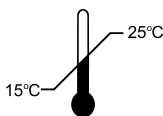

Preparatu nie należy stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu, także w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że opakowanie było wcześniej otwarte lub uszkodzone.

Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętej tubie w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Chronić przed światłem i wysoką temperaturą.

Dostępne opakowania: saszetka 4 g,
tuby 4 g, 10 g, 30 g, 45 g, 60 g z aplikatorem.

Wytwórca: masters® Sp. z o.o.

61-345 Poznań, ul. Masztowa 3

tel. +48 61 872 15 17

www.masters.poznan.pl

WYRÓB MEDYCZNY

CE 0434

Pytania i uwagi dotyczące wyrobu prosimy kierować na adres wytwórcy lub za pośrednictwem ankiety umieszczonej na stronie www.masters.poznan.pl

Data opracowania ulotki: lipiec 2011