

HydroNasin

ksylitol

Ulotka zawiera informacje dotyczące preparatów z grupy **HydroNasin ksylitol**, do których należą:

- **HydroNasin ksylitol** zestaw **podstawowy**, który zawiera butelkę do płukania nosa i zestaw saszetek do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok,
- **HydroNasin ksylitol** zestaw **uzupełniający**, który zawiera tylko saszetki do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok.

HydroNasin ksylitol to system do płukania nosa i zatok, który dzięki ciągłemu strumieniowi roztworu skutecznie przepłukuje, oczyszcza i łagodzi podrażnienia błon śluzowych nosa oraz zatok. Nawilża błony śluzowe, rozluźnia śluz, usuwa wszystkie rodzaje wydzielin, skrzepów i ogranicza gromadzenie czynników powodujących:

- zapalenie błony śluzowej nosa i zatok,
- katar infekcyjny,
- alergiczny nieżyt nosa.

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie systemu obronnego układu oddechowego (ruch migawkowy rzęsek i oczyszczanie błony śluzowej).

WSKAZANIA:

HydroNasin ksylitol w postaci przygotowanego roztworu, służy do prewencyjnej, objawowej lub pooperacyjnej pielęgnacji nosa i zatok, w szczególności:

- w zapaleniu zatok przynosowych,
- w niezycie nosa różnego pochodzenia,
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok,
- po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu,
- dla utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyrób może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci mogą stosować zestaw tylko pod kontrolą osoby dorosłej. Stosowanie wyrobu u dzieci poniżej 4 roku życia należy skonsultować z lekarzem. Płukanie nosa i zatok należy wykonywać 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.


Do płukania należy używać wyłącznie butelki dostępnej w zestawie podstawowym **HydroNasin ksylitol** (butelka i 10 saszetek). Nie stosować w przypadku uszkodzenia butelki.

Do płukania stosować roztwór **HydroNasin ksylitol**, przygotowany krótko przed użyciem.

Nie przygotowywać roztworu na zapas.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU DO PŁUKANIA NOSA I ZATOK

1. Przed przystąpieniem do sporządzenia roztworu umyj ręce.
2. Wsyp zawartość 1 saszetki do butelki **HydroNasin ksylitol**.
3. Uzupełnij butelkę przegotowaną i ostudzoną do temperatury pokojowej wodą do zaznaczonej linii (240 ml).
4. Dokładnie zakręć butelkę.
5. Zakryj palcem otwór na zakrętce i wstrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku w wodzie.

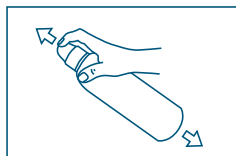

PŁUKANIE NOSA I ZATOK

1. Stań w pozycji lekko nachylonej nad umywalką.
2. Przyłóż ściśle kończówkę butelki do jednego z otworów nosowych. Oddychaj swobodnie przez usta.
3. Ściśnij butelkę płynnym ruchem tak, aby roztwór dostał się do nosa i wypłynął drugim otworem nosowym.
4. Nie polykaj roztworu.
5. Powtórz czynność dla drugiego otworu nosowego.
6. Po płukaniu delikatnie wydmuchaj nos.
7. Niewykorzystany roztwór wylej. Butelkę i nakrętkę dokładnie umyj i osusz.

Nie stosować później niż na godzinę przed snem.

Godzinę po płukaniu nie należy wychodzić na zewnątrz (przy temp. poniżej 19°C).



BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA:

Wyrób nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przypadkowe połknięcie roztworu **HydroNasin ksylitol** podczas płukania nosa i zatok nie jest szkodliwe.

OSTRZEŻENIA I SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Nie stosować w przypadku:

- całkowitej blokady nosa,
- zapalenia ucha lub uczucia zatkania ucha,
- nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

Stosowanie u pacjentów po przebytej operacji ucha należy skonsultować z lekarzem.

Dzieci mogą stosować zestaw tylko pod kontrolą osoby dorosłej.

Stosowanie wyrobu u dzieci poniżej 4 roku życia należy skonsultować z lekarzem.

Jedna butelka przeznaczona jest dla jednego użytkownika.

MIEJSCE I WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić od wilgoci i światła.

Wszystkie elementy zestawu należy przechowywać czyste i suche. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA PREPARATU:

HydroNasin ksylitol zestaw **podstawowy** do płukania nosa i zatok zawiera:

- 10 saszetek HydroNasin ksylitol z proszkiem do sporządzenia roztworu 5,6 g każda
- butelkę o pojemności około 240 ml z rurką i nakrętką nosową
- instrukcję używania
- masa netto 56 g (10 szt. po 5,6 g)

HydroNasin ksylitol zestaw **uzupełniający** do płukania nosa i zatok zawiera:

- 20 saszetek HydroNasin ksylitol z proszkiem do sporządzenia roztworu 5,6 g każda
- instrukcję używania
- masa netto 112 g (20 szt. po 5,6 g)

SKŁAD SASZETEK:

- saszетка jednorazowego użycia 5,6 g
- mieszanina 3 składników: ksylitol, chlorek sodu, wodorowęglan sodu
- kontrolowane fizjologiczne ciśnienie osmotyczne prawidłowo przygotowanego roztworu
- bez konserwantów
- łatwo rozpuszczalna formuła

Dodatkowe informacje

- **HydroNasin ksylitol** jest wyrobem medycznym klasy I zgodnym z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC.
- Należy zachować instrukcję, by w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Data ostatniej aktualizacji instrukcji używania: 27-07-2018



Wytwórca:

Axfarm Sp. z o.o.

ul. Koziutelskiego 36, 85-657 Bydgoszcz

