

Fitonasal Spray

- **Udrażnia nos i rozrzedza wydzielinę**
- **Chroni i sprzyja regeneracji błony śluzowej**

EFEKT ODŚWIEŻAJĄCY

Bez konserwantów

Bez gazów nośnych.

Nadaje się również do długotrwałego stosowania.

Niefarmakologiczne działanie udrażniające

WYRÓB MEDYCZNY Klasy IIa



Z
Tannisal-FL

Naturalny kompleks molekularny
tanin, flawonoidów i halitu

SKONCENTROWANY SPRAY

Fitonasal skoncentrowany spray jest **ochronnym preparatem udrażniającym nos** do stosowania we wszystkich przypadkach **przeziębienia, alergii**, a także w razie występowania **niedrożności i podrażnienia jam nosowych, związanych zarówno ze schorzeniami przewlekłymi, jak i ostrymi**.

Fitonasal skoncentrowany spray jest wyrobem medycznym, którego działanie wynika ze wszystkich składników formuły. Szczególne właściwości posiada **TANNISAL-FL**, naturalny kompleks molekularny, składający się z tanin, flawonoidów i halitu.

Wraz z gliceryną roślinną odpowiada on za następujące działanie produktu:

1. niefarmakologiczne działanie udrażniające, związane z:

- **miejsowym działaniem ściągającym**, powstającym dzięki niespecyficznym interakcjom między produktem a białkami, między innymi bradykininą, mediatorem stanu zapalnego, obecnym w wydzielinie nosowej, zarazem pozwalającej na ich usuwanie.
- **zbilansowaną i standaryzowaną osmolalnością** (750 mOsm/Kg) sprzyjającą przenikaniu wydzieliny z niedrożnej błony śluzowej oraz rozrzedzającą śluz i pomagającą w jego usuwaniu, również dzięki fizycznemu działaniu oczyszczania jamy nosowej, bez wywoływania podrażnienia i suchości.

2. działaniem ochronnym

dzięki działaniu mukoadhezyjnemu i antyoksydacyjnemu, sprzyjającemu utrzymaniu bariery nabłonka i procesowi regeneracji błony śluzowej.

Naturalne aromaty eukaliptusa i mięty zapewniają przyjemne uczucie świeżości.

Fitonasal skoncentrowany spray nie zawiera udrażniających substancji wazokonstrykcyjnych, dzięki innowacyjnemu, niefarmakologicznemu mechanizmowi działania nie powoduje uzależnienia, nie wysusza i nie podrażnia błony śluzowej nosa, może być stosowany wielokrotnie w ciągu dnia, także przez dłuższy czas.

Konserwacja produktu zapewniana jest przez sam proces produkcji dzięki systemowi sterylizującego filtrowania i pakowaniu w środowisku kontrolowanym mikrobiologicznie, bez użycia konserwantów.

OPAKOWANIE

Roztwór do nosa Fitonasal to skoncentrowany spray dostępny w szklanych buteleczkach z atomizerem, z **technologią APF** (Advanced Preservative Free), systemem wielokrotnego dawkowania z membraną filtrującą, gwarantującym:

- **rozpylony strumień z dawkowaniem wstępnym** - dozownik z pompką i atomizerem uwalnia odpowiednią ilość substancji przy każdym naciśnięciu, zapewniając jednorodną dawkę
- **jakość i brak konserwantów** - membrana filtrująca zachowuje mikrobiologiczną jakość produktu podczas każdego dozowania, filtrując powietrze na wejściu. Cecha ta sprawia, że z produktu można korzystać aż do końca daty ważności, bez konieczności zastosowania sztucznych konserwantów
- **ochrona środowiska** - produkt nie zawiera żadnych gazów nośnych, nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko

WSKAZANIA

Fitonasal skoncentrowany spray polecany jest we wszystkich przypadkach **niedrożności i podrażnienia jam nosowych** spowodowanych przeziębieniem, również w połączeniu z objawami grypy i alergii (sezonowej i całorocznej).

Produkt jest przydatny również w przypadku objawów występujących w związku z katarem

pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego oraz z nieżytem nosa wywołanym przez czynniki mechaniczno-blokujące (skrzywienie przegrody nosowej).

Ze względu na swoje właściwości produkt może być stosowany wielokrotnie w ciągu dnia oraz przez dłuższe okresy.

Produkt może być stosowany począwszy od 6. roku życia.

SPOSÓB UŻYCIA



Dawkowanie dla dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia:

rozpylić produkt dwukrotnie do każdej jamy nosowej, wydmuchać nos i powtórzyć aplikację.

Dawkowanie dla dzieci od 6 do 12 roku życia:

rozpylić produkt po jednym razie do każdej jamy nosowej, wydmuchać nos i powtórzyć aplikację.

Po każdym użyciu wyczyścić atomizer za pomocą czystej, wilgotnej szmatki i dokładnie wysuszyć.

Zaleca się stosowanie Fitonasal skoncentrowany spray kilkakrotnie w ciągu dnia, również w krótkich odstępach czasu oraz powtórzenie aplikacji przed snem.

OSTRZEŻENIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników. Stosować wyłącznie do nosa. Unikać kontaktu z oczami, w razie kontaktu przemyć oczy wodą.

W przypadku nieustąpienia objawów należy skonsultować się z lekarzem.

SKŁAD

TANNISAL-FL: naturalny, standaryzowany kompleks molekularny, złożony z frakcji taninowej i frakcji flawonoidów (z oczaru wirginijskiego i tymianku), halitu (sól wydobywana ze złóż kopalin, nieprzetworzona chemicznie).

Woda, gliceryna roślinna, naturalny aromat eukaliptusa i naturalny aromat mięty.

Produkt jest w 100% naturalny i nie zawiera konserwantów, emulgatorów i innych sztucznych substancji.

OKRES WAŻNOŚCI

Patrz data ważności podana na opakowaniu. Nie używać po upływie podanej daty ważności.

Okres ważności podany na opakowaniu nie zmienia się również po pierwszym rozpyleniu produktu.

OPAKOWANIE W SPRZEDAŻY: Butelka szklana 30 ml z atomizerem

Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, chronić od źródeł ciepła i światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci. Okres ważności dotyczy produktu w nienaruszonym stanie i właściwie przechowywanego. Dbaj o czystość, wyrzuć do kosza.

Data ostatniej aktualizacji: 12/2019



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Spółka posiada certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 13485 oraz systemy zarządzania środowiskiem ISO 14001.

JGL ITEM CODE

POLEAFITAD-B