

UWAGI OGÓLNE:

Wątroba jest niezbędnym narządem organizmu, który odgrywa kluczową rolę dla zdrowia. Pomaga trawić pokarmy, oczyszcza krew, produkuje białka oraz magazynuje energię. W przypadku problemów z wątrobą może wystąpić wiele objawów, takich jak: ciemne zabarwienie moczu, jasny stolec, brak apetytu, żółćnienie oczu lub skóry (żółtaczka), obrzęk brzucha, osłabienie lub uczucie zmęczenia. Istnieje wiele przyczyn pojawienia się problemów z wątrobą, takich jak zapalenie wątroby, działanie niepożądane niektórych leków, marskość z powodu nadużywania alkoholu, nadwaga - szczególnie w przypadku cukrzycy lub wysokiego ciśnienia krwi. Do oceny stanu wątroby można wykorzystać wiele testów, jednak najczęściej stosowanym badaniem jest oznaczenie ALT oraz AST. Enzymy te są uwalniane do krwi w odpowiedzi na uszkodzenie lub chorobę wątroby. LIVER-Screen® jest szybkim testem immunodiagnostycznym do immunologicznego badania podwyższonej aktywności transaminaz (zarówno ALT, jak i AST) z próbki krwi pełnej uzyskanej z nakłucia palca. Test posiada dwie wyraźne strefy do wykrywania transaminaz (kolor czerwony, gdy jest pozytywny) oraz jedną strefę kontrolną (kolor niebieski).

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Opakowanie zawiera materiały niezbędne do wykonania badania:
- 1 aluminiowa, szczelna torebka zawierająca
 - 1 płytkę testową, 1 plastikową pipetę oraz 1 saszetkę z pochłaniaczem wilgoci
 - Test powinien pozostać w szczelnie zamkniętym opakowaniu do momentu użycia. Nie używaj saszetki z pochłaniaczem wilgoci.
 - 1 butelka z zakraplaczem zawierająca 1 ml diluentu (rozcieńczalnika)
 - 1 sterylny lancet (nakłuwacz) do pobierania krwi
 - 1 ulotka z instrukcją użytkowania

