

INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO




Należy uważnie przeczytać całą poniższą instrukcję, ponieważ zawiera ona ważne informacje. **PROCTINUM CZOPKI** jest wyrobem medycznym, który wydaje się bez przepisu lekarza. W celu osiągnięcia właściwej skuteczności, powinien być stosowany zgodnie z opisanymi wskazaniami.

- Należy zachować niniejszą instrukcję na wypadek konieczności zapoznania się z nią powtórnie.
- W celu uzyskania dalszych informacji, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Proctinum[®]

Wyrób medyczny

czopki

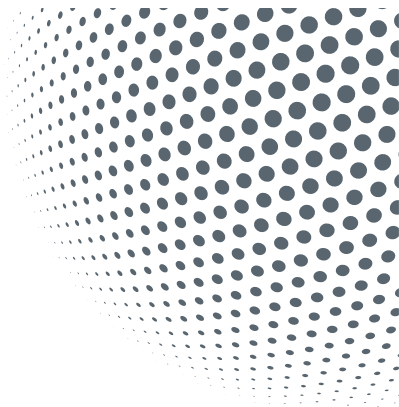

- czopki doodbytnicze z kwasem hialuronowym
10 mg kwasu hialuronowego

Opis Produktu :

PROCTINUM CZOPKI to wyrób medyczny przeznaczony do miejscowego stosowania w odbytnicy. Czopki umieszczone są w gniazdach z folii z tworzywa sztucznego. Każde gniazdo oddzielone jest perforacją umożliwiającą oderwanie jednego gniazda z czopkiem od pozostałej części blistra. Wyjęcie czopka z gniazda następuje poprzez rozciągnięcie listków folii. Po założeniu czopka do odbytu ulega on stopieniu tworząc żel o właściwościach nawilżających i barierowych.

Skład:

1 czopek zawiera: 10 mg kwasu hialuronowego w postaci soli sodowej oraz tłuszcz obojętny, jako substancję pomocniczą.

Opis działania:

Po wprowadzeniu czopka przez odbyt do odbytnicy, pod wpływem temperatury ciała ulega on roztopieniu i rozpuszczeniu w środowisku odbytnicy. Uwolniony kwas hialuronowy pęcznieje na skutek kontaktu z wilgotną wydzieliną i tworzy na powierzchni błony śluzowej żelową powłokę. Stanowi ona barierę ochronną i stwarza odpowiednie warunki do aktywacji naturalnych mechanizmów regeneracyjnych i obronnych. Film ochronny utworzony z kwasu hialuronowego przywraca naturalną wilgotność, łagodzi stany zapalne, ułatwia i przyspiesza procesy gojenia uszkodzonej śluzówki kanału odbytu i odbytnicy.

Wskazania:

PROCTINUM CZOPKI przeznaczony jest do stosowania doodbytniczego, w celu nawilżenia i ochrony błony śluzowej, w stanach wymagających pobudzenia naturalnych procesów regeneracji i gojenia się błony śluzowej odbytnicy oraz kanału odbytu. Sytuacje takie występują szczególnie w następujących przypadkach:

- po zabiegach lub operacjach chirurgicznych, także podczas radioterapii,
- w stanach zapalnych, z towarzyszącym świądem, obrzękiem, zaczerwienieniem,
- w żylakach odbytu,
- w pęknięciach i szczelinach odbytu powstałych na skutek zaparcí.

Sposób użycia:

Czopki przeznaczone są wyłącznie do stosowania doodbytniczego. Przed założeniem czopka należy dokładnie umyć ręce. Jeśli czopek jest zbyt miękki, przed wyjęciem z blistra należy na kilka minut włożyć go do lodówki. Oderwać z blistra jedno gniazdo z czopkiem. Obiema dłońmi chwycić po jednej warstwie folii (pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym) i powoli oddzielić je od siebie. Ostrożnie wyjąć czopek z folii. Delikatnie wepchnąć czopek w odbyt. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zakładać jeden czopek przed snem. Czopki stosować nieprzerwanie przez 5-10 kolejnych dni. W razie potrzeby stosowanie można wydłużyć do 20 dni. W pojedynczej kuracji nie stosować dłużej niż 20 dni.

Ostrzeżenia:

- Czopki przeznaczone są do podawania doodbytniczego – nie stosować w inny sposób.
- Nie połykać!
- Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu.
- Nie przekraczać zalecanego czasu podawania.
- Jeśli po zastosowaniu produktu wystąpiło nasilenie zmian lub pojawiły się dodatkowe objawy chorobowe, należy przerwać stosowanie i zwrócić się do lekarza.
- Jeśli po zastosowaniu produktu nastąpi złagodzenie dolegliwości, a następnie nastąpi powrót nieprawidłowości, nie należy wznowiać stosowania, lecz zwrócić się do lekarza.
- Nie stosować produktu z innymi preparatami podawanymi doodbytniczco.
- Nie stosować wyrobu medycznego po upływie terminu ważności.
- Nie używać, jeżeli opakowanie bezpośrednio jest uszkodzone.

Przechowywanie:

Produkt przechować w temperaturze pokojowej (15-25 °C), w suchym miejscu. Nie narażać produktu na nagrzanie przez ekspozycję na słońce lub inne źródła ciepła. Wyrób medyczny należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Opakowanie:

Opakowanie zawiera 10 czopków (2 blistry po 5 czopków) lub 5 czopków (1 blister po 5 czopków).
Masa jednego czopka – 1,9 g.



Wytwórca:
Biofaktor Sp. z o.o.
ul. Czysta 4
96 – 100 Skierniewice

Dystrybutor:

Natur Produkt Zdovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa

Numer serii (LOT): wytłoczony na blistrze
Data ważności: MM.RRRR wytłoczona na blistrze

Data ostatniej aktualizacji: 01.2020



Objaśnienia użytych symboli na opakowaniu zewnętrznym

SYMBOL	OZNACZENIE SYMBOLI
	Termin ważności
	Nie używać повторно
	Numer serii
	Dane wytwórcy
	Ostrzeżenia
	Zajrzyj do instrukcji użycia
	Chronić przed światłem słonecznym
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Ograniczenie dopuszczalnej temperatury przechowywania – wartości najwyższej i najniższej dopuszczalnej temperatury wskazane w sąsiedztwie górnej poziomej linii i dolnej poziomej linii
	Przechowywać w suchym miejscu