

RINOPANTEINA®

PL

MAŚĆ I KROPLE DO NOSA

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z treścią ulotki.

1. Co to jest Rinopanteina i w jakim celu się ją stosuje?

Rinopanteina® jest wyrobem medycznym (maść i krople do nosa), który powleka błonę śluzową nosa i utrzymuje jej nawilżenie oraz wspomaga proces regeneracji nabłonka.

Rinopanteina® wskazana jest:

- Po zabiegach chirurgicznych w celu ograniczenia powstawania strupów;
- W przypadku suchości i/lub atrofii błony śluzowej nosa spowodowanej: niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi, stosowaniem aerozoli do nosa, innymi terapiami aerozolowymi, innymi schorzeniami takimi jak polekowy lub alergiczny nieżyt nosa, ozena;
- W celu ograniczenia skutków krwotoków z nosa, również pourazowych;
- Do przeprowadzania badań endoskopowych i/lub zakładania tamponady nosa.

Maść jest skuteczna w profilaktyce i leczeniu popękanej skóry w okolicy nosa, spowodowanej przeziębieniem.

2. Co należy wiedzieć zanim zastosuje się preparat Rinopanteina®?

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu (wymienionych w punkcie 6).

3. Jak stosować preparat Rinopanteina®?

Maść: Stosować 1-3 razy dziennie. Wprowadzić niewielką ilość maści do każdego otworu nosowego. Rozprowadzić równomiernie maść na błonę śluzową nosa, delikatnie masując skrzydełka nosa.

Krople: Przed użyciem energicznie wstrząsnąć butelką, a następnie zaaplikować 2-3 krople do każdego otworu nosowego 4-5 razy dziennie.

4. Środki ostrożności

- W przypadku wystąpienia reakcji niepożądej należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Przed zastosowaniem należy upewnić się czy opakowanie nie jest uszkodzone.
- Preparatu nie należy używać po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do nieuszkodzonego i prawidłowo przechowywanego produktu.
- Po użyciu należy dokładnie zamknąć opakowanie.

5. Sposób przechowywania preparatu Rinopanteina®

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Zaleca się przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej.
- Krople: w niższej temperaturze krople mogą gęstnieć. Zmiany konsystencji nie obniżają jakości preparatu. Krople powracają do pierwotnej postaci po wstrząśnięciu i umieszczeniu w temperaturze pokojowej (nie niższej niż 15°C).

6. Informacje dodatkowe

Skład maści: Palmitynian witaminy A (0,05%), D-pantenol (5,0%), hydrolizat proteinowy z owsa zwyczajnego (Avena sativa extr.), hialuronian sodu (0,1%), Cetareth-20, benzoosan sodu, BHA, olej mineralny, wazelina, woda oczyszczona.

Skład kropli: Palmitynian witaminy A (0,05%), D-pantenol (0,1%), BHA, olej mineralny, wazelina.

Opakowania

Maść: tuba 10 g

Krople: butelka 30 ml

Rinopanteina® jest wyrobem medycznym zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42 / EWG

Wyłącznie dystrybutor na Polskę:

Vitamed
Pharmaceuticals

VITAMED

ul. Ostrowskiego 24
97-213 Smardzewice

www.vitamed.pl, www.vitamedlive.pl

Wyprodukowano we Włoszech



DMG Italia srl

via Laurentina Km. 26,700
Pomezia (Rome) - ITALIA
www.dmgit.com

CE
0373

Aktualizacja: 05/2016.