


# Raniseptol

Wyrób medyczny

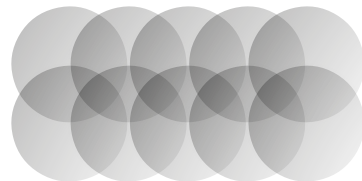

## Spray na rany

125 ml

### Instrukcja użycia

Należy uważnie przeczytać całą instrukcję użycia, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące prawidłowego stosowania produktu.

Wyrób medyczny Raniseptol jest dostępny bez recepty.

Należy zachować instrukcję użycia, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W przypadku jakichkolwiek pytań, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

#### 1. Co to jest wyrób medyczny Raniseptol i w jakim celu się go stosuje

##### MECHANIZM DZIAŁANIA:

Nanosrebro znane jest z silnego antybakteryjnego i antyseptycznego działania. Swą skuteczność zawdzięcza wysokiemu stosunkowi powierzchni nanocząsteczek do ich masy oraz ich dużej powierzchni aktywnej, posiadającej zdolność oddziaływania na mikroorganizmy. Składniki zawarte w wyrobie medycznym Raniseptol tworzą na powierzchni skóry ochronny, antybakteryjny film, przeciwdziałający czynnikom zewnętrznym, nawilżający i zabezpieczający przed nadmierną utratą wody. W ten sposób wyrób medyczny zapewnia korzystne środowisko gojącym się ranom. Pomaga on także chronić skórę przed infekcjami bakteryjnymi oraz pomaga zapobiegać powstawaniu zakażeń skórnych.

##### WSKAZANIA:

Wsparcie w leczeniu infekcji skóry i błon śluzowych o podłożu bakteryjnym oraz niewielkich mechanicznych uszkodzeniach naskórka (takich jak otarcia, skaleczenia, oparzenia). Przyspieszanie regeneracji skóry oraz umożliwianie odpowiedniej pielęgnacji skóry wrażliwej i podrażnionej.

**Przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 7 roku życia.**

##### **Skład:**

woda, gliceryna, nanosrebro aXonnite, hialuronian sodu, kwas cytrynowy

##### ZASTOSOWANIE:

##### **Raniseptol**

spray na rany:

- działa antybakteryjne
- wspomaga regenerację naskórka i błon śluzowych
- zapobiega powstawaniu zakażeń zmian skórnych
- łagodzi stany zapalne skóry
- wspomaga leczenia poparzeń, odleżyn, skaleczeń, zadrapań

#### 2. Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego Raniseptol

##### DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I INTERAKCJE:

Nie stwierdzono.

##### PRZECIWWSKAZANIA:

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne.

##### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania.

Nie należy używać po upływie terminu ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Stosowanie wyrobu medycznego w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem.

## **PRZECHOWYWANIE:**

Przechowywać w temperaturze pokojowej.  
Chronić od światła.  
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## **3. Jak stosować wyrób medyczny Raniseptol**

Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe stosowanie wyrobu medycznego

### **Raniseptol:**

## **SPOSÓB UŻYCIA:**

- Dokładnie oczyścić i osuszyć uszkodzone miejsce przed aplikacją;
- Przed użyciem wstrząsnąć;
- Aplikować z odległości ok. 10 cm;
- Pryskać bezpośrednio na uszkodzoną skórę lub przecierać zwilżonym wacikiem kosmetycznym;
- Stosować 2-3 razy dziennie po 2-4 dawki lub w zależności od potrzeb.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Stosować max przez 7 dni. Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 7 roku życia.

W przypadku dzieci poniżej 7 roku życia, wyrób medyczny może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem.

Czas stosowania wyrobu medycznego Raniseptol zależy od okresu utrzymywania się dolegliwości, jednakże nie powinien być dłuższy niż 7 dni.

## **4. Zastosowanie większej niż zalecana dawka wyrobu medycznego Raniseptol**

Nie stosować wyższych dawek niż zalecane.

Nie odnotowano przypadków przedawkowania lub zatrucia wyrobem medycznym Raniseptol.

## **5. Jak przechowywać wyrób medyczny Raniseptol**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce, w opakowaniu zewnętrznym.

Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C.

Nie stosować wyrobu medycznego **Raniseptol** po upływie terminu ważności, zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

## **6. Inne informacje**

Jak wygląda wyrób medyczny Raniseptol i co zawiera opakowanie.

**Raniseptol** to klarowny, bezzapachowy płyn, koloru bezbarwnego do srebrzystego.

### **Opakowanie:**

spray o poj. 125 ml, w tekturowym pudełku z dołączoną instrukcją użycia.



### **Wytwórca:**


Natur Produkt Zdrowit Sp. z o.o.  
ul. Nocznickiego 31  
01-918 Warszawa, Polska

Wyrób medyczny



Data wydania instrukcji użycia: 06/2018

Oznaczenie symboli na opakowaniu:

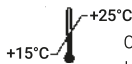

ograniczenie dopuszczalnych temperatur  
temperatura przechowywania od  
15°C do 25°C



numer serii



termin ważności



zajrzyj do instrukcji użycia



wytwórca