

Gynotal – żel położniczy

Pomaga dzieciom bezpiecznie przyjść na świat

- 2 x strzykawki do fazy A
- 1 x strzykawka do fazy B
- 3 x aplikatory



GYNOTAL®

Informacje o produkcie:

Do użytku przez personel medyczny (położne i lekarzy) specjalizujący się w położnictwie.

Przed użyciem Gynotal – żelu położniczego, należy zapoznać się z ulotką informacyjną.

Zastosowanie i zawartość opakowania

Zestaw Gynotal – żel położniczy: do jednorazowego użytku, zestaw do wstrzykiwania zawierający 12 ml żelu położniczego:

- 2x strzykawki do fazy A
- 1x strzykawka do fazy B
- 3x aplikatory

Specyfikacje

Gynotal – żel położniczy jest produktem sterylnym, do jednorazowego użytku. Nie uczula, jest bioadhezyjny, ma właściwości elektroprzewodzące, ma odczyn lekko kwasowy, nie zawiera lateksu ani konserwantów i nie podrażnia błon śluzowych ani oczu. Gynotal – żel położniczy nie zawiera substancji czynnych. Nie posiada zapachu i jest bezbarwny. Pakowany w strzykawki jednorazowego użytku. Żel jest nieco lepki, nieznacznie kwasowy, o wartości pH 5,5-6,5.

Inne specyfikacje

Gynotal faza A: wysoco bioadhezyjny

Gynotal faza B: średnio bioadhezyjny

Skład

Żel położniczy 12 ml w strzykawce jednorazowej zawiera:

Woda demineralizowana, glikol propylenowy, karbomer, hydroksyetyloceluloza, wodorotlenek sodu

Wskazania i użycie

Gynotal żel położniczy został opracowany z przeznaczeniem do porodu naturalnego. Ma właściwości wysoco bioadhezyjne i wiążące wodę. Gynotal żel położniczy ma na celu ułatwienie akcji porodowej matce i dziecku oraz chroni kroczce w trakcie porodu. Gynotal żel położniczy może być używany zarówno u pierworódek jak i wieloródek a także po cięciu cesarskim.

Gynotal żel położniczy jest wykorzystywany w następujących sytuacjach:

- ułatwia poród naturalny i zmniejsza tarcie, które spowalnia poród u pierworódek.
- ułatwia poród naturalny i chroni matkę i dziecko redukując tarcie, które spowalnia poród u wieloródek, podczas porodów w wodzie oraz u kobiet po cięciu cesarskim w wywiadzie.
- zapobiega przedłużającym się czy trudnym porodom (na podstawie obserwacji).
- ułatwia wykonywanie procedur okołoporodowych (prózniciąg/ kleszczy).
- chroni kroczce i pochwę w trakcie porodu naturalnego.
- redukuje uczucie pieczenia okolicy pochwowo-moczowej po porodzie.

Szczególne uwagi co do stosowania:

Tylko do użytku miejscowego w kanale rodnym.

Gynotal faza A: do użytku w pierwszej fazie porodu.

Gynotal faza B: do użytku w drugiej fazie porodu oraz w trakcie manualnego usunięcia łożyska.

Dozowanie i aplikacja

Gynotal żel położniczy jest przeznaczony do użytku podczas badania pochwowego w trakcie porodu, począwszy od pierwszego badania. Każdorazowo przy badaniu pochwy należy nałożyć ok. 3 ml żelu do kanału rodnego używając sterylnej rękawiczki a następnie równomiernie rozsmarować. Można zastosować elastyczny aplikator dopochwowy, należy zastosować ok. 3 ml żelu u uścia uwidocznionego odcinka. Aby osiągnąć najlepszy efekt lubrykacyjny należy się upewnić, że żel został nałożony na suchą powierzchnię pochwy. W tym celu można użyć standardowych środków takich jak chlorek sodu czy płyn antyseptyczny. Kolejną porcję żelu należy nałożyć 15 do 30 minut po przzerwaniu pęcherza płodowego. Gynotal żel położniczy przyspiesza zarówno pierwszą jak i drugą fazę porodu. Dlatego Gynotal żel położniczy powinien być używany podczas całej akcji porodowej. Gynotal faza A jest zalecany do pierwszej fazy porodu, natomiast Gynotal faza B do drugiej fazy. Przeciętne na jeden poród należy zużyć od 10 do 30 ml Gynotalu żelu położniczego. Najnowsze doświadczenia pokazują, że należy używać maksymalnie 30 ml Gynotalu żelu położniczego. Preparat powinien być aplikowany jedynie przez wykwalifikowany personel medyczny, przeszkolony w zakresie położnictwa.

Środki ostrożności

Preparat zachowuje sterylność do momentu otwarcia opakowania. Nie należy używać Gynotalu żelu położniczego w przypadku naruszenia ciągłości opakowania ani po terminie ważności. Po otwarciu blistra, w celu zachowania sterylności strzykawkę, należy postępować zgodnie z zasadami posługiwania się materiałami sterylnymi. Po pojawieniu się główek dziecka, należy wytrzeć mu buzię (w tym oczy i nos) czystą szmatką. W razie konieczności, należy przetrzeć również okolice ust/nosa. Należy używać suchej szmatki w momencie wylania się dziecka aby zapobiec ślizganiu. Ponieważ Gynotal żel położniczy ma właściwości elektroprzewodzące, w każdej chwili można zastosować procedury elektrochirurgiczne, na przykład w trakcie cięcia cesarskiego lub do hemostazy przy ustawianiu kanału rodnego, po aplikacji żelu. Dlatego nie należy używać Gynotalu żelu położniczego w połączeniu z innymi żelami, ponieważ mogą one odwrócić przewodnictwo elektryczne Gynotalu żelu położniczego.

Biokompatybilność i użycie w trakcie ciąży.

Gynotal żel położniczy został przetestowany zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi pod względem biokompatybilności. Na podstawie tych testów stwierdzono, iż żel nie ma szkodliwego działania na organizm matki ani noworodka.

Skutki uboczne: Na dzień dzisiejszy preparat nie ma stwierdzonych skutków ubocznych.

Interakcje: Na dzień dzisiejszy nie są znane żadne interakcje.

Przeciwwskazania

Gynotal żel położniczy nie może być używany u kobiet z alergiami na składniki preparatu w wywiadzie.

Przechowywanie i okres trwałości. Okres trwałości Gynotalu żelu położniczego wynosi 3 lata. Należy go przechowywać w temperaturze pomiędzy 5 i 30 stopni Celsjusza i unikać ekspozycji na światło słoneczne. Data ważności jest umieszczona na zewnętrznym opakowaniu. **Nie używać produktów po terminie ważności.**



turkuaz

Turkuaz Sağlık Hizmetleri, Medikal, Temizlik
Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Yakuplu Mahallesi Birlik Caddesi No: 32/1
34524 Beylikdüzü / İstanbul / TÜRKİYE
T +90 212 428 68 48 Pbx F +90 212 428 68 53
info@turkuazsaglik.com.tr / www.turkuazsaglik.com.tr

Made in
Turkey
Discover
the potential



STERILE R

CE 1014