

# Regerhin

MAŚĆ DO NOSA

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z poniższymi informacjami. Należy zachować niniejszą ulotkę, gdyż zawiera ona ważne informacje. W razie wątpliwości dotyczących użytkowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub wytwórcą.

**REGERHIN** jest wyrobem medycznym w postaci maści, który dzięki zawartości takich składników jak D-pantenol wykazuje działanie powlekające, nawilżające oraz wspomagające regenerację błony śluzowej nosa.

## ZASTOSOWANIE:

- przewlekły zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa
- suchość błony śluzowej nosa spowodowana stosowaniem preparatów do nosa
- ochrona błony śluzowej przed niekorzystnymi czynnikami środowiska
- łagodzenie podrażnienia i stanu zapalnego błony śluzowej nosa
- długotrwałe nawilżenie błony śluzowej nosa
- wspomaganie i regeneracja błony śluzowej nosa po zabiegach chirurgicznych

## SKŁAD:

D-pantenol, witamina A, Crodamol IPIS, gliceryna, Softisan 649, Euxyl PE9010, woda.

## PRZECIWWSKAZANIA:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Nie stosować na uszkodzoną skórę.

## OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności. Termin ważności i numer partii znajdują się na zgrzewie tuby oraz kartoniku. Termin ważności odnosi się do nieuszkodzonego i prawidłowo przechowywanego produktu. Unikać kontaktu z oczami. Nie połykać. Po operacjach i zabiegach chirurgicznych, przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. Ze względów higienicznych oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji, jedno opakowanie powinno być stosowane przez jedną osobę.

## PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

## POSTAĆ PREPARATU:

Preparat Regerhin jest dostępny w postaci maści w tubie o poj. 15 ml.


## SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować 2-4 razy dziennie do każdego otworu nosowego. W celu równomiernego rozprowadzenia preparatu, po aplikacji należy delikatnie rozmasować płatki nosa. Przed i po użyciu Regerhin należy dokładnie umyć ręce.


Zaaplikować maść bezpośrednio do nozdry.



Nałożyć małą ilość maści na patyczek kosmetyczny i wprowadzić do nozdry.

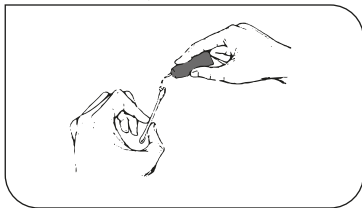

Nałożyć niewielką ilość maści na palec i zaaplikować do nozdry.

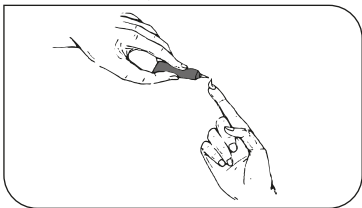

W celu równomiernego rozprowadzenia maści na powierzchni śluzówki należy delikatnie pomasażyć płatki nosa



termin ważności



numer partii



przed użyciem zapoznać się z instrukcją użytkownika



wytwórca



WYTWÓRCA:

**SOLINEA**

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.  
Elizówka 65, Hala L  
21-003 Ciecierzyn, Polska  
[www.solinea.pl](http://www.solinea.pl)

CE

Stan informacji: 04.2020