

crossvi[®]

intense

CROSSVI intense to sterylny roztwór oftalmiczny o fizjologicznym pH, oparty na opatentowanej technologii usieciowania kwasu hialuronowego (HA) za pomocą mocznika, która poprawia i wzmacnia specyficzne właściwości mechaniczne liniowego HA, wykazując znacznie dłuższą odporność na działanie hialuronidazy niż liniowy HA, a poprzez to zwiększone i dłuższe działanie lubrykacyjne i nawilżające w porównaniu do liniowego HA.

Uwodniona struktura usieciowanego HA jest w stanie zapewniać wodę przez dłuższy czas, przez co poprawia właściwości lubrykacyjne liniowego HA, jednocześnie wzmacniając jego działanie nawilżające, a tym samym zalecana jest jako środek wspomagający w zespole suchego oka.

Usieciowany HA nadaje produktowi właściwości lubrykujące, nawilżające i regenerujące, przynosząc ulgę w stanach suchości oczu wywołanych zespołem suchego oka, podrażnieniem i zmęczeniem oczu w przypadku stanów zapalnych lub czynników środowiskowych.

Formulacja została opracowana w celu zapewnienia maksymalnego komfortu od pierwszego zastosowania. Polecana jest do codziennego użytku, w ciągu dnia i w nocy.

Nie zawiera konserwantów i/lub cząsteczek o działaniu przeciwzapalnym i zwężającym naczynia krwionośne.

CROSSVI intense nadaje się do stosowania z soczewkami kontaktowymi.

WSKAZANIA

CROSSVI intense jest zalecany:

- w celu przywrócenia i poprawy stabilności filmu łzowego w zespole suchego oka;
- po chirurgii refrakcyjnej;
- w celu łagodzenia zaczerwienienia, zmęczenia i uczucia dyskomfortu oczu lub błony śluzowej oka z powodu:
 - czynników środowiskowych (klimatyzacja, nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne, wiatr, dym, zanieczyszczenia, woda morska lub basenowa i morskie powietrze);
 - suchości oczu spowodowanej nadmiernym zmęczeniem związanym z długotrwałą pracą przy komputerze, nauce;
 - nieprawidłowości w łzawieniu po przebytych stanach zapalnych, przewlekłym zapaleniu powiek;
 - nieprawidłowości w łzawieniu po operacjach okulistycznych o różnym podłożu lub chirurgii estetycznej powiek;
 - noszenia miękkich lub półtwardych soczewek kontaktowych.

SKŁAD

Wodny roztwór usieciowanego polimeru hialuronianu sodu (w tym 0,4% usieciowanego polimeru hialuronianu sodu), trometamol, kwas chlorowodorowy 2N, chlorek sodu, woda do iniekcji. Bez konserwantów.

INSTRUKCJA UŻYWANIA

- Dokładnie umyj ręce;
- Przed pierwszym użyciem usuń uszczelkę zabezpieczającą;
- Zdejmij nasadkę zabezpieczającą i otwórz butelkę;
- Odwróć butelkę do góry dnem i delikatnie wyciśnij po 2 krople do każdego oka, chyba że zalecono inaczej;
- Po aplikacji każdej kropli odczekaj parę sekund bez ściskania butelki. Umożliwi to powrót wystarczającej ilości powietrza do sterylnego systemu filtrów powietrza, w przeciwnym razie wyciśnięcie kropli będzie trudniejsze;
- Stopniowe opróżnianie butelki może wiązać się z koniecznością wywierania większego nacisku, aby umożliwić podanie produktu. Wynika to z właściwości systemu zamknięcia, utrzymującego sterylność oraz właściwości chemiczne i fizyczne roztworów wolnych od środków konserwujących. Niewielka ilość roztworu zawsze pozostaje w butelce;
- Po użyciu należy strząsnąć kroplę pozostałą na końcówce;
- Po użyciu natychmiast zamknij butelkę zatyczką;

- Nie zakładaj ponownie zatyczki ochronnej, gdy pojemnik jest nadal ściśnięty;
- Nie dotykaj niczym końcówki aplikatora, włączając w to oko oraz palce;
- Zawartość opakowania należy zużyć w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów okulistycznych.
- Produkt jest przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta.
- Nie należy używać produktu w przypadku uszkodzonego lub niedokładnie zamkniętego pojemnika przed pierwszym otwarciem.
- Nie używać, jeśli w roztworze widoczne są cząsteczki i/lub zmiany koloru;
- Podczas aplikacji nie dotykać oka ani innych powierzchni końcówką dozownika.
- Nie używać produktu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu i etykiecie.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas używania należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować produktu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- Nie zgłaszano żadnych interakcji z lekami ani innymi kroplami do oczu; należy jednak zachować co najmniej 15-minutowy odstęp między podaniem jakichkolwiek innych kropli do oczu;
- Po zużyciu preparatu należy właściwie zutylizować pojemnik.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci;
- Przed użyciem tego produktu należy zasięgnąć porady lekarza w przypadku ciąży lub karmienia piersią;
- Do użytku zewnętrznego, nie połykać;
- Nie należy manipulować dozownikiem butelki ani zdejmować go z niej;
- Konieczne jest zgłaszanie każdego poważnego incydentu, który wystąpił w związku z używaniem produktu, producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym zamieszkujez.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bezpośrednio po zakropleniu produkt może powodować lekkie przejściowe zamglenie widzenia ze względu na charakterystyczną lepkość roztworu. Stąd też wskazane jest odczekanie kilku sekund przed jakąkolwiek czynnością wymagającą wyraźnego widzenia.

OPAKOWANIE

Opakowanie zawiera butelkę z systemem OSD (Oftalmiczny Dozownik do Wyciskania), o pojemności 10 ml produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 30°C w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego. Zdatny do użycia 3 miesiące po pierwszym otwarciu.

DATA WAŻNOŚCI

Jeżeli produkt nie został otwarty nie należy go używać po dacie ważności podanej na opakowaniu i etykiecie.

 **C.O.C. Farmaceutici S.r.l.**

Via Modena, 15
40019 – Sant'Agata Bolognese (BO)
Włochy

STERILE **A** **#** DT/01/DT/010

Adres dystrybutora:

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice
www.tactica.pl

 **0051** 