

Należy uważnie przeczytać całą ulotkę znajdującą się w opakowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. VITAgyn C[®] jest wyrobem medycznym, który wydaje się bez przepisu lekarza. Jednakże w celu osiągnięcia lepszej skuteczności, powinien on być stosowany zgodnie z opisanymi wskazaniami.

- Należy zachować niniejszą ulotkę na wypadek konieczności zapoznania się z nią powtórnie.
- W celu uzyskania dalszych informacji, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
- Jeśli objawy utrzymują się po pewnym czasie stosowania, należy skonsultować się z lekarzem.

VITAgyn C[®]

globulki dopochwowe o kwaśnym pH

SKŁAD

Palmitynian askorbylu, maltodekstryny, glicerydy półsyntetyczne, izopropyl paraben, izobutyl paraben, butyl paraben, BHT.

W JAKIEJ POSTACI VITAgyn C[®] JEST DOSTĘPNY

VITAgyn C[®] jest dostępny w postaci globulek dopochwowych. Opakowanie zawiera 10 globulek dopochwowych po 2 g ∅.

CZYM JEST VITAgyn C[®] I KIEDY JEST ON STOSOWANY

VITAgyn C[®] globulki dopochwowe przywracają i utrzymują fizjologiczny kwaśny odczyn pochwy pomiędzy 3.8 a 4.4, który zarówno hamuje wzrost mikroorganizmów odpowiedzialnych za bakteryjne zakażenia pochwy, jak i pomaga wzrastać naturalnej florze bakteryjnej. Stwarza on niekorzystne środowisko dla kolonizacji bakteryjnej spowodowanej przez pałeczki okrężnicy (*Escherichia coli*), w wyniku czego zapobiega nawrotom infekcji układu moczowego. Ponadto kwaśne pH pochwy neutralizuje czynniki decydujące o zjadliwości rzęsistka pochwowego (*Trichomonas vaginalis*) i ogranicza rozprzestrzenianie drożdżaków z rodzaju *Candida* w nabłonku pochwy.

WSKAZANIA

Środek wspomagający odbudowę naturalnej flory bakteryjnej pochwy oraz środek wspomagający zapobieganie i leczenie zakażeń bakteryjnych pochwy i nawracających infekcji układu moczowego, w zapobieganiu zakażeń grzybiczych pochwy.

KIEDY NIE NALEŻY STOSOWAĆ GLOBULEK VITAgyn C[®]

W przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na jeden ze składników produktu.

Ciąża i okres karmienia piersią

VITAgyn C[®] globulki dopochwowe można stosować już od pierwszych miesięcy ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i zdolność obsługi maszyn i urządzeń

Nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności.


INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI

Interakcje z innymi produktami są nieznanne, dlatego przed użyciem globulek dopochwowych VITAgyn C[®] w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi lub lekami dopochwowymi zaleca się konsultację z lekarzem.

SPOSÓB UŻYCIA

Wyjąć globulkę pociągając za końce nadciętego blistra i włożyć ją głęboko do pochwy. Należy umyć ręce przed i po użyciu wyrobu medycznego.

Sposób wyjęcia globulki

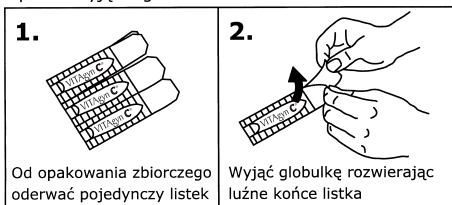

KIEDY I JAK DŁUGO

1 globulkę wieczorem przez 10 dni lub według wskazań lekarza. Dla utrzymania efektów kuracji stosować 1 globulkę 2 razy w tygodniu przez 12 tygodni lub dłużej. Czas stosowania zależy od rozwoju objawów. W razie konieczności VITAgyn C[®] globulki dopochwowe mogą być stosowane przez dłuższy czas.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Długotrwałe stosowanie wszystkich produktów przeznaczonych do użytku miejscowego może wywołać reakcję nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem celem zalecenia odpowiedniego leczenia. Przejściowe pieczenie nie jest wskazaniem do przerywania stosowania preparatu, ale oznacza osiągnięcie wysokiej kwasowości w pochwie. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, które nie zostały opisane w niniejszej ulotce, należy poinformować o tym fakcie lekarza lub farmaceuty.

OSTRZEŻENIA

Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. Nie połykać.

OKRES WAŻNOŚCI I PRZECHOWYWANIE

Data ważności została podana na opakowaniu (EXP) i odnosi się do produktu w oryginalnie zamkniętym i prawidłowo przechowywanym opakowaniu. Nie używać produktu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu lub w przypadku, gdy opakowanie było wcześniej otwarte lub uszkodzone. Szczelnie zamknięty wyrób medyczny najlepiej jest przechowywać w temperaturze od 4°C do 25°C, chroniąc go przed światłem i wysoką temperaturą.

WYRÓB MEDYCZNY **C** **€** 0373

Wytwórca:

FARMA-DERMA s.r.l.

Via dei Bersaglieri 10 - 40010 Sala Bolognese (BO), WŁOCHY (ITALY)

Dystrybutor:

MIRALEX Sp. z o.o.

ul. Św. Szczepana 25, 61-465 Poznań

tel: 61 832 90 74

miralex@miralex.pl