

Instrukcja używania

 SutriHeal[®] Forte 10%

Maść do miejscowego leczenia ran

1 tuba 2 g, 15 g, 30 g

Do gojenia wszelkich skaleczeń, otarć, pęknięć, oparzeń i owrzodzeń skóry u ludzi.

Przed zastosowaniem produktu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji używania.

Maść do stosowania zewnętrznego, do leczenia miejscowego.

Spis treści niniejszej instrukcji używania:

- Co to jest maść SutriHeal[®] Forte 10% i w jakim celu się ją stosuje
- Instrukcja stosowania maści SutriHeal[®] Forte 10%
- Składnik aktywny
- Wykaz składników (INCI)
- Warunki przechowywania i okres trwałości
- Możliwe działania niepożądane
- Dalsze informacje

Co to jest maść SutriHeal[®] Forte 10% i w jakim celu się ją stosuje:

Skuteczność maści SutriHeal[®] Forte 10% opiera się na biologicznym działaniu związków znajdujących się w żywicy świerku norweskiego (*Picea abies*). Maść SutriHeal[®] Forte 10% stosuje się do miejscowego leczenia zakażonych i niezakażonych ran w warunkach domowych lub ambulatoryjnych. Rany mogą być ostre lub przewlekłe: jak np. otarcia, pęknięcia, uszkodzenia skóry, rany oparzeniowe, odleżyny, rany cukrzycowe, powikłania ran pooperacyjnych lub rany powstałe na skutek otwarcia pęcherzy. Naturalna surowa żywica zawarta w maści SutriHeal[®] Forte 10% jest rafinowana w opatentowanym procesie oczyszczania zaprojektowanym przez Repolar Pharmaceuticals Oy.

Instrukcja stosowania maści SutriHeal[®] Forte 10%:

Otarcie, pęknięcie skóry lub rana powinny zostać oczyszczone wodą i osuszone. Maść SutriHeal[®] Forte 10% należy nakładać bezpośrednio na zmieniony obszar 1-2 razy dziennie. W razie potrzeby zabezpieczyć bandażem lub opatrunkiem przepuszczającym powietrze. Przetoki i rany powstałe na skutek otwarcia pęcherzy należy leczyć zgodnie z zaleceniami pielęgniarki lub lekarza. Maść SutriHeal[®] Forte 10% tworzy na powierzchni rany antybakteryjny film, który chroni ranę przed zanieczyszczeniem i wspomaga skuteczne gojenie. Unikać dostania się maści do oczu lub ust.

Składnik aktywny:

Rafinowana żywica świerku norweskiego (*Picea abies*).

Wykaz składników (INCI):

Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Norway Spruce (*Picea abies*) Resin, Alcohol Denat., Cera Microcrystallina, Sorbitan Oleate, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Stearic Acid.

Warunki przechowywania i okres trwałości:

Produkt przechowywany w temperaturze pokojowej jest stabilny przez rok. Data ważności podana jest na pudełku i tubce. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.



— po otwarciu użyć w ciągu 12 miesięcy

Ciąża i karmienie piersią:

Brak informacji na temat możliwych działań niepożądanych w okresie ciąży i karmienia piersią.

Maści SutriHeal® Forte 10% nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Interakcje:

Nie są znane żadne klinicznie istotne interakcje.

Prowadzenie pojazdów:

Stosowanie produktu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane:

Możliwe działania niepożądane obejmują reakcję alergiczną na składniki żywicy. Objawem reakcji alergicznej jest miejscowe podrażnienie skóry na leczonym obszarze (alergiczne kontaktowe zapalenie skóry). Szacuje się, że około 1-3% populacji ma alergię na żywice. Jeśli w trakcie leczenia pojawią się objawy alergii należy natychmiast przerwać stosowanie maści z żywicy. Należy powiadomić wytwórcę o wszelkich zdarzeniach niepożądanych, interakcjach itp.

Jeśli nie jest znana nadwrażliwość na żywice, należy przetestować maść SutriHeal® Forte 10% na niewielkim obszarze skóry. Jeśli objawy alergiczne (swędzenie, rumień, obrzęk, pęcherze itp.) wystąpią w ciągu 3 dni, nie można stosować maści SutriHeal® Forte 10%. Jeśli objawy alergiczne wystąpią później, podczas leczenia, należy natychmiast przerwać stosowanie maści SutriHeal® Forte 10% i zastosować inne leczenie.

W nagłych przypadkach należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Data ostatniej wersji instrukcji użytkowania: 10/2022**Wytwórca:**

HELP SA
10 Valaoritou St.
14452 Metamorphosis, Attica,
Greece

T: +30 210 281 5353
F: +30 210 281 1850

Fabryka:

Pedini Ioanninon
45 500 Ioannina, Greece
info@help.com.gr
www.help.com.gr

Dystrybutor:

VERCO S.A.
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U
01-015 Warszawa

**Produkt na licencji
REPOLAR PHARMACEUTICALS OY**

REPOLAR
PHARMACEUTICALS



SHF10//011122