

DEXOFTYAL® — ŻEL —

Nawilżający żel do oczu zawierający deks pantenol 5%

Skład: Dekspantenol 5% (m/V), 20% roztwór wodorotlenku sodu, karbomer, sól dwusodowa kwasu wersenowego, cetrymid, woda do wstrzykiwań.

Czym jest preparat DEXOFTYAL® ŻEL?

Preparat **DEXOFTYAL® ŻEL** to jałowy żel do oczu zawierający deks pantenol w stężeniu 5%.

W jakiej postaci dostępny jest preparat DEXOFTYAL® ŻEL?

Preparat **DEXOFTYAL® ŻEL** ma postać żelu do oczu w tubie 10 g.

Kiedy należy stosować preparat DEXOFTYAL® ŻEL?

Preparat **DEXOFTYAL® ŻEL** stosowany jest do ochrony powierzchni oczu u pacjentów z zaburzeniami filmu łzowego. Obecność deks pantenolu w składzie preparatu umożliwia utrzymanie nawilżenia i ochronę powierzchni oczu, co zapewnia długotrwale złagodzenie objawów suchości oczu, takich jak: podrażnienie, pieczenie i uczucie obecności ciała obcego, pojawiających się w wyniku działania czynników środowiskowych (wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, światło, klimatyzacja, ogrzewanie), w wyniku długotrwałej pracy przy komputerze, okulistycznych zabiegów chirurgicznych, zapalenia spojówek lub stosowania soczewek kontaktowych.

Obecność karbomeru jako środka zagęszczającego umożliwia uzyskanie lepkości odpowiadającej lepkości łez.

W jaki sposób należy stosować preparat DEXOFTYAL® ŻEL?

Odkręcić tubę, odchylić głowę do tyłu i odciągnąć w dół dolną powiekę, formując kieszonkę. Powoli ścisnąć tubę do momentu pojawienia się na jej końcówce małej kropli, podać kroplę do oka, a następnie, mrugając dwa do trzech razy, rozprzodzić równomiernie kroplę po powierzchni oka, po czym zetrzeć nadmiar żelu z okolic powiek. Należy pamiętać o zamknięciu tuby.

Jedna kropla do jednego oka, raz dziennie lub częściej, chyba że lekarz lub farmaceuta zaleci inny schemat dawkowania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Preparat **DEXOFTYAL® ŻEL** przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego we wskazaniach okulistycznych.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.
- Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
- Nie dotykać oka końcówką tuby.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia tuby lub plomby zabezpieczającej.
- Zamknąć tubę zakrętką po użyciu preparatu.
- Przed użyciem preparatu należy usunąć soczewki kontaktowe. Po zastosowaniu preparatu należy zachować odstęp co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem soczewek.
- W rzadkich przypadkach przejściowo może wystąpić niezbyt nasilone nieostre widzenie z powodu lepkości żelu, dlatego zaleca się odczekanie do ustąpienia nieostrego widzenia przed podjęciem czynności wymagających dobrej ostrości wzroku.
- W przypadku stosowania jakiegokolwiek dodatkowego preparatu okulistycznego należy zachować odstęp co najmniej 15 minut między aplikacjami poszczególnych produktów, przy czym **DEXOFTYAL® ŻEL** powinien być ostatnim aplikowanym preparatem.
- Wyrzucić pozostałą zawartość po 8 tygodniach od pierwszego otwarcia tuby.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia oczu należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Żel można stosować w sposób ciągły przez 30 dni. Jeżeli objawy będą się utrzymywać, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Produktu nie wolno połykać.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

 Pozostałości po użyciu produktu należy zutylizować w odpowiedni sposób.

 Wytwórca: Farmigea S.p.A.— Via G.B. Oliva, 6/8 — 56121 Piza, Włochy.

Data ostatniej zmiany tekstu ulotki: Marzec 2021 r.

OFTA
JAKOŚĆ W OKULISTYCE

Dystrybutor: Verco S.A.
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U
01-015 Warszawa

STERILE A

CE 0546

DEK10/W1010521