


ECTO RESPIRA

Instrukcja używania

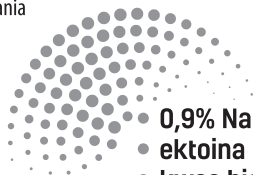

- 0,9% NaCl
- ektoina
- kwas hialuronowy

ZASTOSOWANIE

ECTO RESPIRA - to roztwór 0,9% soli fizjologicznej z dodatkiem ektoiny i kwasu hialuronowego, w postaci pojedynczej dawki niezawierający konserwantów, przeznaczony do nebulizacji, działa w oparciu o różne mechanizmy, aby usunąć wydzielinę z dróg oddechowych poprzez oczyszczenie struktur śluzowo-rzęskowych, stabilizację komórek nabłonka, poprawę funkcji surfaktantu płucnego i zmniejszenie procesów zapalnych, ułatwiając dzięki temu oddychanie:

- Formuła EctoIn Hydro-Complex fizycznie stabilizuje śluzówkę, błony komórkowe, białka zewnątrzkomórkowe oraz inne makromolekuły i zmniejsza procesy zapalne w płucach.
- rozbijanie wiązań jonowych wydzieliny śluzowej, dzięki czemu zmniejsza się lepkość i elastyczność wydzieliny;
- pobudzanie odruchu kaszlu i wykrztuszania jako mechanizmów wspomagających usuwanie śluzu zalegającego w oskrzelach, co prowadzi do udrożnienia dróg oddechowych.

WSKAZANIA

ECTO RESPIRA w terapii wziewnej jest wskazany zwłaszcza do łagodzenia objawów u pacjentów z zapaleniem oskrzelików, ostrym zapaleniem oskrzeli, mukowiscydozą, astmą (o podłożu alergicznym i niealergicznym), przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP) i reakcjami alergicznymi dróg oddechowych wywołanymi przez wdychanie alergenów takich jak kurz lub pyłki.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaleca się stosowanie produktu za pomocą pneumatycznego nebulizatora (kompresora), który pozwala na uzyskanie optymalnych efektów działania. Zaleca się postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi sporządzoną przez producenta urządzenia. W terapii wziewnej w nebulizatorze umieszcza się zazwyczaj dawkę 5 ml roztworu, chyba że lekarz zalecił inaczej.

OSTRZEŻENIA LUB ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt nie zawiera konserwantów. Po otwarciu ampułki należy natychmiast zużyć jej zawartość, a po użyciu pozbyć się ampułki celem uniknięcia zanieczyszczeń mogących stanowić źródło infekcji.
- Nie stosować w skojarzeniu z innymi preparatami bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
- U pacjentów bardzo wrażliwych, preparat należy podawać zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ w pierwszej kolejności może być konieczne podanie leku rozszerzającego oskrzela.
- W przypadku skurczu oskrzeli lub uporczywego kaszlu należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia ampułki.
- Nie przechowywać w temperaturze przekraczającej 25°C.
- Nie stosować preparatu w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.

ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE

- skurcze oskrzeli
- uporczywy kaszel

Wszelkie poważne zdarzenia, które wystąpiły w związku ze stosowaniem wyrobu, należy zgłosić zarówno producentowi, jak i właściwemu organowi krajowemu.

SKŁAD

Jałowy roztwór chlorku sodu 0,9%, ektoina, hialuronian sodu



STERILE A



CE 0123

Rev. 2019/DIC/20

WYTWÓRCA

UNOLAB MANUFACTURING, S.L.
Av/ De las flores 6, 28970
Humanes de Madrid (Madryt),
Hiszpania

300628

DYSTRYBUTOR



Solinea Sp. z o.o.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn

ECTO

RESPIRA