

Wyrób medyczny

Jasnum sensi

50 ml
ŻEL INTYMNY
LUBRYKANT

Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta dotyczące zastosowania wyrobu. Instrukcję używania należy zachować, aby w razie konieczności móc ponownie ją przeczytać.

Jasnum sensi, żel intymny – ulga i nawilżenie

OPIS WYROBU MEDYCZNEGO

Lubrykant wodny **Jasnum sensi** to specjalistyczny, wysokiej jakości żel intymny, zapewniający dodatkowe nawilżenie okolic intymnych podczas stosunków płciowych.

SKŁAD

Glicerol, kwas cytrynowy, hydroksyetyloceluloza, fenyletanol, glikol kaprylowy, woda oczyszczona.

INFORMACJE OGÓLNE I WSKAZANIA

Wyrób medyczny **Jasnum sensi** jest zalecany w celu:

- ułatwienia stosunków płciowych przy utrudnionej penetracji (m.in. w przypadku suchości pochwy), także z użyciem prezerwatyw;
- łagodzenia dolegliwości bólowych w obrębie narządów płciowych w trakcie stosunku płciowego;
- łagodzenia objawów suchości pochwy prowadzącej do tarć i uszkodzeń nabłonka miejsc intymnych w trakcie stosunku płciowego;
- wspomagania przeprowadzenia badań ginekologicznych oraz dopochwowego pomiaru temperatury.

Nie brudzi bielizny.

Jasnum sensi jest:

- niehormonalny
- hipoalergiczny
- bez dodatku substancji zapachowych
- wegański i nietestowany na zwierzętach
- nie zawiera PEG, parabenów, detergentów, w tym SLS, SLES

MECHANIZM DZIAŁANIA WYROBU

Po aplikacji wyrobu **Jasnum sensi** na zewnętrzną powierzchnię narządów płciowych, w trakcie stosunku płciowego lub wykonywania badań ginekologicznych, następuje wytworzenie nawilżającej powłoki ochronnej, utrzymującej się w miejscu aplikacji, co znacznie redukuje tarcie i wpływa na **zmniejszenie bólu i ochronę nabłonka** w przypadku suchości błony śluzowej. Zastosowanie lubrykantu wpływa na ochronę błony śluzowej podczas stosunku oraz wykonywanie badań ginekologicznych poprzez wspieranie **naturalnego nawilżenia**, co pozwala uniknąć mechanicznych mikrouszkodzeń, otarć i podrażnień naskórka oraz śluzówki.



USP Zdrowie

Dystrybutor:
USP Zdrowie Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa

WYRÓB MEDYCZNY

czcionka	wersja	data
≥ 1,2 mm	JasnSensi_leaf_v5	2022_03_17

Wyrób medyczny

Jasnum sensi

50 ml
ŻEL INTYMNY
LUBRYKANT

SPOSÓB UŻYCIA

Uwaga: Przed aplikacją żelu dokładnie umyć ręce.

Żel można stosować w ilości zależnej od potrzeb, kilka razy dziennie, regularnie, bez ograniczeń wiekowych. Produkt należy nałożyć na miejsce narażone na otarcia, przed stosunkiem lub badaniem.

Wyrób można stosować w kontakcie z prezerwatywami lateksowymi, poliuretanowymi i poliizoprenowymi.

Żel można aplikować bezpośrednio na prezerwatywę.

Uwaga! Wyrób medyczny **Jasnum sensi** nie jest środkiem antykoncepcyjnym i nie zawiera środków przeciwniepleniowych.

OSTRZEŻENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Jeżeli w trakcie użycia żelu pojawia się uczucie pieczenia, świąd lub zaczerwienienie, należy zaprzestać stosowania wyrobu i w przypadku braku ustąpienia objawów skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- W ciąży oraz w okresie karmienia stosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
- Żel może wpływać na ruchliwość plemników i zmniejszać zdolność do zajścia w ciążę.
- W przypadku utrzymującej się suchości pochwy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie stosować w czasie menstruacji.
- Należy unikać przypadkowego kontaktu żelu ze śluzówką oka.
- Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż wyrób może zmniejszać lub opóźniać ich działanie.
- Nie stosować w przypadku upływu terminu ważności.

Wyrób do stosowania na okolice intymne. Nie połykać!

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Chronić przed światłem i źródłami ciepła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonym na opakowaniu.

Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

Dostępne opakowania wyrobu:

Butelka o pojemnościach: 50 ml



Informacja na opakowaniu



WYTWÓRCA
LABORATOIRE L'IDEAL Parisien Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 8,
32-064 Niegoszowice
tel./fax +48 12/ 283 88 60
www.lideal.pl

Data opracowania instrukcji używania:

Wydanie 11 z dnia 15.02.2022