

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/Artwork:	ULT-005166_3		
Preparat/ Product:	Help4Skin Gojenie pęknięć skóry		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 100 x 210 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: - Tekst/ Text: Myriad Pro 7 pt		
Gramatura/ Weight:	xxx g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	XXX
Kolorystyka/ Colours:	■ Black	Opracował/ Prepared by:	10.09.2020 W. Terlicka



ULT-005166_3

Instrukcja używania

help 4 skin

GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY



plaster w żelu wspomagający gojenie

Na niewielkie pęknięcia skóry stóp i dłoni.

Wodoodporny



SYBKO ZMNIEJSZA BÓL, WSPOMAGA PROCES GOJENIA

Plaster w żelu Help4Skin Gojenie pęknięć skóry jest przeznaczony do wspomagania leczenia drobnych pęknięć skóry, spierzchniętej skóry dłoni i stóp oraz skaleceń.

WŁAŚCIWOŚCI

Dzięki specjalistycznej technologii po nałożeniu preparatu Help4Skin Gojenie pęknięć skóry na pękniętą skórę powstaje elastyczna i **przezroczysta warstwa ochronna odporna na działanie wody**, która szybko wysycha. Warstwa ta wspomaga leczenie pęknięć skóry spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, **szybko zmniejsza ból, zapobiega ponownemu otwarciu rany i wspomaga proces gojenia w ciągu 5 dni**.

Wyjątkowa formuła plastra w żelu Help4Skin Gojenie pęknięć skóry została wzbogacona o:

- **witaminę E** – doskonały przeciwutleniacz, który sprzyja regeneracji skóry,
- **olej rycynowy** – substancję o działaniu zmiękczającym oraz zwiększającym sprężystość warstwy ochronnej.

Jeżeli nie ma przeciwwskazań, produkt można również stosować do leczenia niewielkich pęknięć skóry powstałych w wyniku stopy cukrzycowej.

TESTOWANY DERMATOLOGICZNIE

INSTRUKCJE UŻYCIA

- Umyć i osuszyć ranę, aż przestanie krwawić.
- Nałożyć produkt odpowiednią szpatułką, równomiernie pokrywając ranę oraz obszar wokół rany.
- Pozostawić do wyschnięcia na kilka sekund.
- Aplikować kilka razy dziennie, jeżeli to konieczne, aż do całkowitego wyleczenia rany.
- Aby usunąć istniejącą warstwę, wystarczy ponownie nałożyć na nią odrobinę produktu i zetrzeć produkt za pomocą chusteczki.
- Po użyciu dokładnie zamknąć butelkę.
- Produkt zużyć w trakcie 6 miesięcy od momentu otwarcia opakowania.

OSTRZEŻENIA

- Nie używać produktu u dzieci poniżej 6 roku życia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Aplikować na niewielkie rany miejscowe.
- Po zastosowaniu może być odczuwalne delikatne i krótkotrwałe pieczenie, które po chwili ustępuje.
- W przypadku pojawienia się zaczerwienienia po zastosowaniu produktu należy przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Nie potykać.
- Nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Nie stosować produktu, jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
- Produkt wysoce łatwopalny.
- Produkt działa drażniąco na oczy.





ULT-005166_3

PRZECIWSKAZANIA I SKUTKI UBOCZNE

Nie aplikować na:

- Rany krwotoczne
- Zakażone rany
- Oparzenia
- Błony śluzowe (wargi, odbyt)
- Piersi
- Okolice oczu

Nie używać w przypadku stwierdzonego uczulenia na jakikolwiek składnik produktu.

SKŁAD

Alkohol denat., alkohol izopropylowy, hydroksypropyloceluloza, nitroceluloza, octan etylu, octan tokoferylu, olej rycynowy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

OPAKOWANIE PRODUKTU

Help4Skin Gojenie pęknięć skóry.

Butelka 7 ml ze szpatułką ułatwiającą aplikację.

Wystarcza na 80 aplikacji.

Produkt wyposażony w zatyczkę bezpieczeństwa.

WYRÓB MEDYCZNY



Pasquali S.r.l.

V.le Belfiore 41

50144 Florencja – WŁOCHY

Dystrybutor: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
83-200 Starogard Gdański
ul. Pełplińska 19, Polska

Legenda:



Nie uwalniać do środowiska naturalnego



Trzymać z dala od promieni słonecznych



Uwaga! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia



Należy zapoznać się z instrukcją użycia



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



Rev00.0-POL01 - maj 2019

