



katarek plus

aspirator kataru

INSTRUKCJA UŻYCIA

Katar w miarę często się pojawia u małych dzieci i u niemowląt. Jeden z największych problemów polega na tym, że małe dzieci i niemowlęta nie potrafią wydmuchać nosa i potrzebują czasu, aby nauczyły się oddychać przez usta. Wydzielina zalegająca w nosie utrudnia oddychanie, powoduje złe samopoczucie a także dalsze powikłania: stany zapalne uszu, zatok jak również zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc. Dlatego Katarek Plus aspirator do nosa jest na to zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Badanie lekarskie jest oczywiście niezbędne, ponieważ tylko lekarz jest w stanie zdiagnozować powód kataru. Usuwanie wydzieliny z jamy nosowej przyspiesza leczenie, poprawia oddychanie i ogólne samopoczucie, a także wspiera zapobieganie chorobom.

Stosowanie: Urządzenie służy do usunięcia wydzieliny z jamy nosowej u dzieci! Nie wolno stosować do innych celów!

UWAGA

Pierwsze użycie: Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przepłukać urządzenie gorącą wodą. Nie należy moczyć w wodzie z detergentem.

Czyszczenie: Po każdym użyciu urządzenie należy oczyścić. Najlepiej natychmiast przepłukać wodą z kranu z dodatkiem detergentu odpowiedniego dla dzieci/niemowląt. Przepłukać gorącą lub ciepłą wodą. Wyrzec zewnętrzną stronę głowicy ssącej miękką ściereczką lub wacikami kosmetycznymi nawilżonymi alkoholem etylowym dostępnym w aptekach.

Nie należy stosować żadnego innego detergentu, żadnych innych chemikaliów, ani materiałów ściernych!

OSTRZEŻENIE

W przypadku hemofilii lub krwawienia z nosa należy skonsultować się z lekarzem!

Jeżeli po zastosowaniu urządzenia pojawi się wysypka alergiczna lub zaczerwienienie na nosie dziecka, należy przestać używać urządzenia! Należy skonsultować się z lekarzem!

W przypadku stosowania urządzenia dla kilkorga dzieci zalecane jest używanie więcej głowic ssących i ich oznaczenie. Jeżeli jest to niemożliwe, należy przed użyciem w wyżej wymieniony sposób dokładnie oczyścić głowicę ssącą.

OSTRZEŻENIE


- Do używania nadaje się odkurzacz, którego moc wynosi 800-1800 W. (Bezpieczne stosowanie jest potwierdzone przez sprawozdanie z badań.) Należy sprawdzić instrukcję odkurzacza.
- Katarek Plus aspirator kataru to nie jest zabawka dla dzieci. Osoba dorosła powinna stosować urządzenie po uprzednim zapoznaniu się z instrukcją.
- Nie wolno używać urządzenia do innych celów, niż jest to określone w zakresach stosowania.
- Nie używać urządzenia z uszkodzoną lub brakującą częścią.
- Należy oczyścić końcówkę głowicy ssącej **A** czystą ściereczką, lub wacikiem nawilżonym alkoholem etylowym dostępnym w aptekach. Nie wolno używać innych chemikaliów!

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ciepłych.

MONTAŻ

1. Włożyć głowicę ssącą **A** do cylindra pojemnika **B**.
2. Włączyć odkurzacz.
3. Podłączyć złącze odkurzacza **C** do rury odkurzacza.

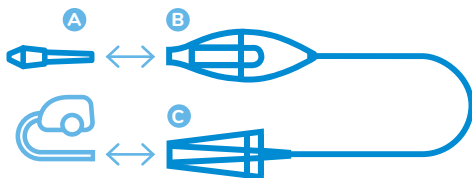


DZIAŁANIE

1. Odpowiednią wydajność stosowanego urządzenia uzyskuje się w naturalnej pozycji ciała. Zaleca się wziąć niemowlaka w ramiona, lub posadzić dziecko na kolanach.
2. Należy umieścić głowicę ssącą **A** w ten sposób, aby szczelnie zablokowała jedno nozdrze i tak przytrzymać przez kilka sekund, w międzyczasie obserwować usuniętą wydzielinę w głowicy ssącej.
3. Powtórzyć te same czynności na drugim nozdrzu.
4. Ostrożnie poruszać głowicą w trakcie drugiej i trzeciej czynności, aby przyspieszyć proces.
5. Ssanie powinno potrwać po ok. 5 sekund dla każdego nozdrza.
6. Po zakończeniu procesu należy wyłączyć odkurzacz i oczyścić urządzenie wyżej określonym sposobem.
7. Powtórzyć proces 2-3 razy dziennie, lub według potrzeby.

Okres zdatności użytkowej urządzenia wynosi 3 lata. Można je bezpiecznie używać przestrzegając zalecenia instrukcji urządzenia

- A** Głowica ssąca
- B** Pojemnik
- C** Złącze do odkurzacza

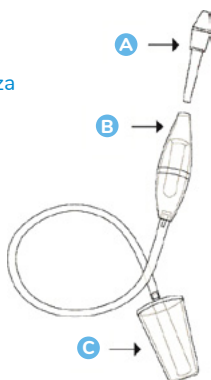

DEMONTOWANIE I CZYSZCZENIE



1. Odłączyć złącze odkurzacza **A** od odkurzacza
2. Wyłączyć odkurzacz
3. Wyplukać części **A** i **B** bieżącą gorącą wodą z kranu natychmiast po użyciu i umyć je według wyżej wymienionych instrukcji.
4. Wsuszyć na powietrzu.

| | |
|-------------|--|
| | Nazwa i adres wytwórcy |
| | Przeczytaj instrukcję użycia |
| | Ostrzeżenie |
| | Numer seryjny |
| | Chronić przed światłem słonecznym |
| mm.yyyy v0x | Data i numer wersji bieżącej instrukcji użycia |

V01

01.2020

CE 0123

Zatwierdzone przez:

Illés Csók Anna Dyrektor Zarządzający

Nazwa i adres wytwórcy:

Illés Csók és Társa Kft.

Budapest H-1146 , Ajtósi Dürer sor 35.