

INSTRUKCJA UŻYWANIA
VISOFTAN CARE
Chusteczki sterylne jednorazowego użytku
przeznaczone do higieny okolic oczu u dorosłych i dzieci
bez konserwantów
WYRÓB MEDYCZNY

WSKAZANIA

Visoftan Care to wyrób medyczny dla dorosłych i dzieci, przeznaczony do oczyszczania obszaru wokół oka, stosowany również przed i po zabiegach chirurgicznych oka. Wykazuje skuteczność w przypadku wystąpienia zapalenia oka, infekcji lub alergii, wydzieliny z oka, objawów infekcji lub alergii na skutek zmian patologicznych oraz do czyszczenia okolic oka.

WŁAŚCIWOŚCI

Sól sodowa kwasu hialuronowego jest jednym z głównych składników macierzy pozakomórkowej większości tkanek. Dzięki jej zdolności do zatrzymania wody oraz właściwościom błonotwórczym działa ona nawilżająco i ochronnie. Substancje zawarte w produkcie umożliwiają staranne oczyszczenie obszaru oka oraz okolic wokół oka, co sprawia, że Visoftan Care może być stosowany wspomagająco w trakcie leczenia oka zaleczonego przez lekarza. Składniki Visoftan Care wykazują właściwości oczyszczające, nawilżające, ochronne i łagodzące, dzięki czemu wyrób ten jest niezwykle delikatny i odpowiedni do wrażliwej skóry okolic oczu.

SKŁAD

Gaza ze 100-procentowej bawełny, nasączona 3 ml następującego roztworu: woda, PEG/PPG-20/15 poli(dimetylosiloksan) (dimetykon), wyciąg z kwiatów rumianku pospolitego (*Chamomilla recutita*), glikol propylenowy, wyciąg ze świetlika lekarskiego (*Euphrasia officinalis*), hialuronian sodu, sól amonowa kwasu glicyryzynowego, glukozyd kaprylowo-kaprynowy, sól sodowa kwasów tłuszczowych oleju kokosowego i aminokwasów z pszenicy, etyloheksylogliceryna, alkohol fenyloetylowy, chlorek sodu, wodorowęglan sodu.

SPOSÓB UŻYCIA

Dokładnie umyć ręce. Otworzyć saszetkę i wyjąć gazę.

Starannie oczyścić okolice oka za pomocą gazy w celu usunięcia wydzieliny lub wszelkich innych pozostałości (zanieczyszczeń, pyłków itp.) dzięki delikatnemu działaniu zmiękczającemu składników produktu.

W przypadku wystąpienia trudnych do usunięcia pozostałości lub zatkania kanalika łzowego zaleca się ogrzewać saszetkę w ciepłej wodzie (o temperaturze 40°C) przez kilka minut, a następnie użyć gazy jako ciepłego kompresu, jednocześnie wykonując nią delikatny masaż.

Dodatkowo można wycisnąć zawartość gazy na oko, delikatnie pochylając głowę, a następnie masować ten obszar gazą aż do całkowitego usunięcia pozostałości.

W przypadku zapalenia oka zaleca się włożyć szczelnie zamkniętą saszetkę na kilka godzin do lodówki, a następnie nałożyć schłodzoną gazę na oko i pozostawić ją na kilka minut.

OSTRZEŻENIA

Wyrób jednorazowego użytku. Przechowywać z dala od dzieci. Sterylność wyrobu jest gwarantowana jedynie wówczas, gdy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. Przechowywać w suchym, chłodnym

miejscu.

Do użytku zewnętrznego.

Przerwać stosowanie w razie wystąpienia wyraźnego podrażnienia lub nadwrażliwości na produkt.

Działanie i bezpieczeństwo produktu jest gwarantowane jedynie w przypadku nieuszkodzonego opakowania. Uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.

Wytwórca: Via Luigi Razza, 3 20124 Milano Włochy

Dystrybutor: Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

www.synoptispharma.pl

Data wydania: styczeń 2020 r.

