

CHUSTECZKI
OKULISTYCZNE

20 jednorazowych chusteczek sterylnych
do pielęgnacji okolic oczu dla dzieci i dorosłych.

WSKAZANIA: Chusteczki **Hyal-Drop™ Clean** przeznaczone są do miejscowej pielęgnacji powiek i rzęs u dorosłych i dzieci (od 36. miesiąca życia), nawet w przypadku pojawienia się wydzieliny o podłożu alergicznym, zapalnym i/lub wydzieliny związanej z zakażeniami, takimi jak różnego typu zapalenie powiek oraz zapalenie powiek i spojówek. Chusteczki te są szczególnie wskazane do pielęgnacji przed i (lub) po zabiegach chirurgii okulistycznej. Chusteczki **Hyal-Drop™ Clean** są również zalecane do codziennej pielęgnacji okolic oczu u osób z predyspozycjami do różnego typu zapalenia powiek oraz zapalenia powiek i spojówek. Szczególny skład produktu umożliwia jego stosowanie również przez użytkowników soczewek kontaktowych.

WŁAŚCIWOŚCI: Wszystkie składniki **Hyal-Drop™ Clean** pomagają zapewnić optymalną pielęgnację, nie zaburzając szczególnej fizjologii okolic oczu, które są wyjątkowo wrażliwym i delikatnym obszarem. Produkt zapewnia właściwą pielęgnację poprzez mechaniczne usuwanie wydzieliny, ciała obcych, kurzu itp.

SKŁAD: Chusteczka nasączona roztworem, w skład którego wchodzi: woda, poli-sorbat 20, hialuronian sodu, wersenian disodowy, cytrynian trójsodowy dwuwodny, żel Aloe vera w proszku, glicerol, diglukonian chloroheksydyny, kwas cytrynowy jednowodny, alantoina, hydroksymetyloglicynian sodu.

SPOSÓB UŻYCIA: Umyj dokładnie ręce, otwórz saszetkę i wyjmij chusteczkę. Przyłóż chusteczkę do okolicy powieki i przetrzyj ją delikatnie tak, aby odpowiednio ją oczyścić, usuwając z jej powierzchni wydzielinę z oka i inne rodzaje zanieczyszczeń (smog, pyłki, kurz, itp.). W przypadku szczególnie trudnej do usunięcia wydzieliny lub niedrożności kanalika łzowego wskazane jest ogrzanie zamkniętej saszetki przez kilka minut w ciepłej wodzie (ok. 40°C). Następnie należy użyć chusteczki

w formie ciepłego kompresu, masując przy tym delikatnie okolice oka. W przypadku stanu zapalnego należy pozostawić zamkniętą saszetkę na kilka godzin w lodówce, a następnie rozłożoną chusteczkę przyłożyć do oka i pozostawić na kilka minut jako zimny kompres.

OSTRZEŻENIA: Sterylność produktu jest zapewniona tylko wtedy, gdy saszetka jest nienaruszona. Chusteczka jest produktem jednorazowym. Ponowne użycie tej samej chusteczki może spowodować zakażenie. Produkt należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Do użytku zewnętrznego. W przypadku wystąpienia widocznego podrażnienia bądź nadwrażliwości na produkt należy przerwać jego stosowanie. W przypadku zakażenia nie wolno używać tej samej chusteczki do obojga oczu. Produkt jednorazowy. Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać uważnie instrukcję użycia.

W przypadku wystąpienia ciężkiego incydentu związanego z użyciem wyrobu medycznego, który dostarczamy, należy niezwłocznie poinformować o tym wytwórcę i właściwy organ w kraju członkowskim, w którym doszło do tego incydentu.

Hyal-Drop is a trademark of Fidia Farmaceutici S.p.A used under license. All other product brand names are trademarks of the respective owners.



Promeia Italia Srl
MIND Viale Decumano, 36
20157 Milano (MI), Italy
www.promeia.com



Dystrybutor:
Bausch & Lomb Poland sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa



Rev.01 03/2024
Segreguj odpady,
PUDEŁKO / PAPIER
P1PL01