

JAK KORZYSTAĆ Z LARIMAX[®] T ORANGE SPRAY?

INSTRUKCJA UŻYWANIA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA

Informacje dla użytkownika wyrobu
medycznego

Należy przeczytać uważnie całą instrukcję używania, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla użytkownika.

Należy zawsze stosować **LARIMAX[®] T ORANGE spray** dokładnie tak, jak to opisano w instrukcji używania lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.


SKŁAD

Olej roślinny, olej z rokitnika zwyczajnego, olejowy ekstrakt z kwiatu nagietka, olejek bergamotowy, aromat pomarańczowy.


DZIAŁANIE I ZASTOSOWANIE

LARIMAX[®] T ORANGE spray jest wyrobem medycznym opracowanym na bazie oleju i zawiera naturalne olejki, które powlekają jamę ustną i błonę śluzową gardła. Składniki aktywne pomagają w utrzymaniu wilgotności i elastyczności błony śluzowej, zmniejszą dolegliwości i ból, uczucie drapania i chropowatości w gardle, ułatwiając połykanie.


Wyrób medyczny stosowany jest w celu zmniejszenia podrażnienia jamy ustnej i błony śluzowej gardła po różnego rodzaju zabiegach lub w przypadku stanu zapalnego.

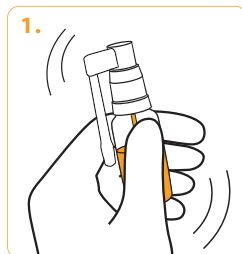


Wstrząśnij
butelkę.

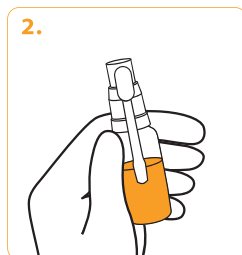

Weź do ręki
butelkę i skieruj
dyszę dozowni-
ka w stronę
jamy ustnej.

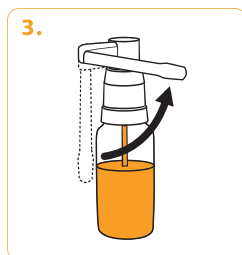

Obróć dyszę
dozownika o
90° w kierunku
przeciwnym
do kierunku
wskazówek
zegara.

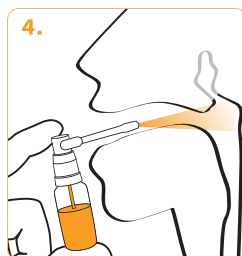

Umieść dyszę
dozownika w
jamie ustnej,
jak na rysunku.

Za pierwszym razem naciśnij dozownik **LARIMAX® T ORANGE spray** 2-3 razy. Trzymaj butelkę w pozycji pionowej. Przy jednorazowym naciśnięciu dozownika zostaje rozpylone około 200 mg produktu.

Po użyciu oczyść dyszę dozownika jednorazową chusteczką i obróć ją do pozycji wyjściowej.

Wyrób medyczny ze względów higienicznych jest przeznaczony do stosowania przez jednego użytkownika.

Wyrób medyczny należy stosować 3 razy dziennie. W celu zapewnienia przedłużonego efektu osłonowego, nie zaleca się stosowania produktu podczas spożywania posiłku lub w czasie picia.

Wyrób medyczny należy stosować do czasu ustąpienia objawów choroby, ale jeśli objawy (dyskomfort, ból gardła) nie ustąpią po tygodniu, należy zasięgnąć porady lekarza.

Uwaga! Wyrób medyczny może pozostawiać plamy na odzieży.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie należy stosować, jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek ze składników produktu. Unikać kontaktu z oczami! Jeżeli nastąpi przypadkowy kontakt z oczami, natychmiast przepłukać oczy bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem. Może być stosowany u dzieci powyżej 2. roku życia. Dzieci poniżej 6. roku życia powinny stosować produkt pod nadzorem osoby dorosłej.

Nie ma żadnych informacji na temat działań niepożądanych przy stosowaniu produktu. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi [Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa].

PRZECHOWYWANIE

W suchym, niewidocznym i niedostępny dla dzieci miejscu. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 15°C do 25°C. Po otwarciu produkt powinien być zużyty w ciągu 3 miesięcy. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.



NEOTAC Pharma Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 148a/1a
30-212 Kraków

Dystrybutor:

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 148a/1a
30-212 Kraków



TACTICA
PHARMACEUTICALS

Data ostatniej aktualizacji instrukcji używania: 2024.10

W opakowaniu

20 ml butelka z dozownikiem.

Zawartość netto: 20 ml



Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu zewnętrznym:



- Dane producenta.



- Należy zapoznać się z treścią instrukcji używania.



- Należy zapoznać się z ostrzeżeniami zamieszczonymi w instrukcji używania.



- Zakres dopuszczalnych temperatur.



- Opakowanie nadające się do recyklingu.



- Wyrób medyczny.