

Pink

Instrukcja obsługi



Digital Fertility Testing System Cyfrowy system monitorowania płodności Digital Test Trio

REF FM-101L, FM-101H, FM-102, FM-103

IVD

CE 0123

Wyrób medyczny do samokontroli

Przed użyciem tego produktu należy przeczytać uważnie poniższe wskazówki

1. Ten produkt wykorzystuje baterię guzikową CR2032. Nie używać innych typów, aby uniknąć uszkodzenia cyfrowego systemu monitorowania płodności Digital Test Trio z powodu problemów z baterią.
2. Nigdy nie wkładać nieużywanego cyfrowego systemu monitorowania płodności Digital Test Trio do jakiegokolwiek cieczy lub umieszczać w miejscu, w którym może znajdować się ciecz.
3. Cyfrowy system monitorowania płodności Digital Test Trio może być używany tylko przez kobiety do pomiaru hormonu luteinizującego (LH), hormonu folikulotropowego (FSH), ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (HCG). Prosimy nie używać produktu do innych celów.
4. Cyfrowy system monitorowania płodności Digital Test Trio jest kompatybilny tylko i wyłącznie z testami marki Pink, dlatego nie należy stosować z nim wyrobów innych firm.
5. Jeśli monitor nie działa prawidłowo lub został uszkodzony, zaprzestać użytkowania, aby uniknąć uzyskania nieprawidłowych wyników.
6. Nie używać tego produktu w pobliżu lub na gorących powierzchniach, aby uniknąć uszkodzenia cyfrowego systemu monitorowania płodności Digital Test Trio.
7. Nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym.
8. Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworu na testy lub okienka wynikowego testu.
9. Nie używać tego produktu w obecności skroplonych rozpuszczalników organicznych.
10. Pojedynczy test nie powinien być używany więcej niż jeden raz, ponieważ test jest jednorazowy.

Spis treści

1. Nazwa produktu	1
2. Model i specyfikacja	1
3. Budowa	1
4. Przeznaczenie	1
5. Przeciwwskazania	1
6. Zasada testu	1
7. Wygląd produktu.....	2
8. Materiały	3
9. Środki ostrożności i ostrzeżenia	4
10. Kiedy rozpocząć testowanie?	6
11. Wskazówki dotyczące stosowania	7
12. Wynik testu	10
13. Pytania i odpowiedzi.....	11
14. Rozwiązywanie problemów	14
15. Specyfikacja produktu	15
16. Bibliografia.....	15
17. Indeks symboli.....	16

Dziękujemy za zakup

Aby bezpiecznie korzystać z tego produktu, najpierw należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a po przeczytaniu zachować ją, aby w każdej chwili móc z niej skorzystać.

1. Nazwa produktu

Digital Fertility Testing System (Cyfrowy system monitorowania płodności Digital Test Trio)

2. Model i specyfikacja

Dotyczy modeli: FM-101L, FM-101H, FM-102, FM-103

3. Budowa

Cyfrowy system monitorowania płodności Digital Test Trio marki Pink składa się z cyfrowego monitora płodności i testów. Cyfrowy monitor płodności DFT-101 składa się z korpusu, pokrywki korpusu, przycisku PUSH, baterii guzikowej CR2032 i pokrywki baterii.

4. Przeznaczenie

Cyfrowy system monitorowania płodności Digital Test Trio jest przeznaczony do wykrywania hormonów w ludzkim moczu.

5. Przeciwwskazania

Brak

6. Zasada testu

Cyfrowy system monitorowania płodności Digital Test Trio to test immunochromatograficzny z przepływem bocznym. Podczas procedury testowej hCG, LH i/lub FSH w próbce moczu reaguje z koniugatem mysiego przeciwciała ze złotem koloidalnym, tworząc kompleks. Poprzez działanie kapilarne kompleks migruje wzdłuż membrany do linii przeciwciał monoklonalnych (T) i pozostaje wychwycony w linii T. Kompleks, który nie jest wychwycony przez linię T, będzie nadal migrował wzdłuż membrany do linii przeciwciał poliklonalnych (C) i pozostanie wychwycony w linii kontrolnej (C). Obszar kontrolny jest podstawą do stwierdzenia, że proces chromatografii odczynnikowej przebiega prawidłowo [1-3]. Cyfrowy system monitorowania płodności Digital Test Trio wykorzystuje diodę LED jako źródło światła i odbicia światła w celu określenia obecności lub braku kolorowych linii testowych i kontrolnych. Wyrób dokonuje oceny wyników ujemnych i dodatnich oraz wyświetla wyniki testu w formie symbolicznej poprzez diody LED. Zgodnie z kolorem i typem testu, test LH wykazuje wynik ujemny (-), dodatni (+) lub silnie dodatni (++). Test FSH wykazuje wynik ujemny (-) lub dodatni (+). Test hCG wykazuje wynik ujemny (-) lub dodatni (biały symbol ❀). Jeśli wynik był dodatni, wyrób wskaże także tygodnie ciąży (1-2, 2-3 i 3+). Im ciemniejszy jest kolor, tym wyższe jest stężenie odpowiedniego hormonu i tym większa jest intensywność pochłanianego światła, a mniejsza intensywność światła odbitego zbieranego przez wyrób. Błąd wyświetlany jest poprzez czerwony symbol „❀”.

7. Wygląd produktu



Nr i nazwa	Zastosowanie
1. Pokrywa korpusu	Zapobiega przedostawaniu się innych przedmiotów do produktu
2. Korpus	Obudowa produktu
3. Przycisk PUSH	Nacisnąć, aby wysunąć test
4. Wyświetlacz LED	Do wyświetlania wyników pomiarów
5. PINK	Logo marki Pink
6. Pokrywa baterii	Aby włożyć baterię, by zasilala produkt
7. Arkusz izolacyjny	Odizolowanie baterii oszczędza energię przed pierwszym użyciem
8. Miejsce na próbkę	Aby dodać moc do testu
9. Okienko wyniku	Obszar zmieniający barwę
10. Naklejka testu	Typy testów są rozróżniane na podstawie koloru
11. Nazwa testu	Oznaczenie testu
12. Uchwyt	Aby włożyć test do monitora

8. Materiały

Sprawdzić zawartość zakupionego zestawu. Materiały, a szczególnie rodzaj testu, będą zależać od rodzaju zakupionego zestawu.

Materiały dostarczane

FM-101L:

• 1* cyfrowy monitor płodności DFT-101 (bateria w zestawie)	• 1* instrukcja obsługi
• 15* testów LH-103B	• 1* skrócona instrukcja obsługi

FM-101H:

• 1* cyfrowy monitor płodności DFT-101 (bateria w zestawie)	• 1* instrukcja obsługi
• 5* testów HCG-103B	• 1* skrócona instrukcja obsługi

FM-102:

• 1* cyfrowy monitor płodności DFT-101 (bateria w zestawie)	• 1* instrukcja obsługi
• 5* testów HCG-103B	• 15* testów LH-103B
	• 1* skrócona instrukcja obsługi

FM-103:

• 1* cyfrowy monitor płodności DFT-101 (bateria w zestawie)	• 1* instrukcja obsługi
• 5* testów HCG-103B	• 15* testów LH-103B
• 1* skrócona instrukcja obsługi	• 2* testy FSH-103B

Materiały wymagane (opcjonalne)

• Pojemnik do pobierania próbek	Do zbierania próbek
---------------------------------	---------------------

Materiały wymagane, ale nie dostarczane

• Minutnik	Do odmierzenia czasu
------------	----------------------



9. Środki ostrożności i ostrzeżenia

1. Można testować mocz pobrany o dowolnej porze dnia – rano, po południu lub wieczorem.
2. Test znajdujący się w opakowaniu należy zużyć natychmiast po rozpakowaniu, aby uniknąć błędów w odczycie wyników spowodowanych nabraniem wilgoci.
3. Zaprzestać picia wody na 2 godziny przed pobraniem próbki moczu, aby zapobiec jego rozcieńczeniu.
4. W opakowaniu z folii aluminiowej znajduje się środek osuszający, który nie nadaje się do spożycia.
5. Produkt przeterminowany nie może być używany.
6. Test jest jednorazowy i nie może być ponownie użyty.
7. Po zużyciu należy wyrzucić test jak każdy inny odpad domowy.
8. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro.
9. Ten produkt jest tylko pomocniczym wyrobem diagnostycznym. Nie może określić rzeczywistej ilości hormonu w próbce moczu. Wyniki badań nie mogą służyć jako podstawa do postawienia diagnozy.
10. Wyniki testu zostaną wyświetlone za pomocą diod LED. Po zakończeniu testu ikona będzie wyświetlana przez 30 sekund, a następnie będzie migać przez 5 minut, zanim ostatecznie wyłączy się automatycznie. Aby ponownie sprawdzić wynik, wyciągnąć test lub ponownie założyć i zdjąć pokrywę DFT-101, po czym zostanie wyświetlony wynik ostatniego testu.
11. Zużyty test, monitor i baterie muszą być utylizowane zgodnie z przepisami krajowymi i wytycznymi względem ochrony środowiska.
12. W przypadku pojawienia się plam zaleca się przetarcie wacikiem nasączonym alkoholem lub wilgotną ściereczką.
13. Nie demontować ani naprawiać monitora. Może to spowodować niedokładne wyniki.
14. Jeśli ten produkt jest używany w sposób inny niż określony przez producenta, ochrona zapewniana przez produkt może być pogorszona.
15. Prosimy o sprawdzenie dostarczonych elementów, w tym ich kompletność i stanu podczas rozpakowania. Prosimy o kontakt z reklamacje@hydrex.pl w przypadku jakichkolwiek problemów z produktem.

16. Ten wyrób może być używany tylko z testem o odpowiednim numerze partii. Nie można mieszać różnych partii wyrobów i testów.

17. Utylizacja testów: po wyświetleniu wyniku należy wyrzucić test do odpadów domowych. Aby to zrobić, nacisnąć przycisk PUSH w monitorze DFT-101. Test zostanie automatycznie wysunięty. Po wysunięciu testu można zauważyć na nim jedną lub dwie czerwone linie. Należy je zignorować. W celu określenia wyników należy odnieść się tylko do wskazań wyświetlacza DFT-101. Test nie nadaje się do ponownego użycia.



18. Podczas testów nigdy nie trzymać testu końcówką chłonną skierowaną do góry.



19. Wszelkie pomiary wykonane przez ten produkt służą wyłącznie do celów osobistych. Prowadzenie autodiagnostyki i samoleczenia tylko na podstawie pomiarów jest bardzo niebezpieczne dla pacjenta. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
20. Przenośny sprzęt komunikacyjny RF (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) nie powinien być używany bliżej niż 30 cm od jakiegokolwiek części cyfrowego monitora płodności, w tym kabli określonych przez producenta. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności tego sprzętu.
21. W środowisku szpitalnym trzymać produkt z dala od aktywnego SPRZĘTU CHIRURGICZNEGO o wysokiej częstotliwości i SYSTEMU do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, gdzie intensywność ZAKŁÓCEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH jest wysoka.
22. Należy unikać używania tego produktu w sąsiedztwie lub na innym sprzęcie, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie.
23. Używanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone lub dostarczone przez producenta tego sprzętu może spowodować zwiększoną emisję elektromagnetyczną lub zmniejszenie odporności elektromagnetycznej tego sprzętu i spowodować nieprawidłowe działanie.
24. Używanie tego sprzętu w suchym środowisku, zwłaszcza jeśli obecne są materiały syntetyczne (syntetyczna odzież, dywany itp.) może powodować szkodliwe wyładowania elektrostatyczne, które mogą powodować błędne wyniki.
25. Trzymać ekran monitora skierowany do góry i położyć go płasko na stole podczas testu. Nie umieszczać monitora w niewłaściwym położeniu, takim jak odwrotne ustawienie lub brak poziomej powierzchni.

10. Kiedy rozpocząć testowanie?

LH

Dzień wystąpienia wzrostu LH różni się w zależności od kobiety i cyklu. Aby mieć największe szanse na wykrycie wzrostu LH, należy znać typową długość cyklu. Aby obliczyć długość cyklu, należy policzyć dzień rozpoczęcia miesiączki (pierwszy dzień pełnego krwawienia miesiączkowego) jako Dzień 1 i kontynuować odliczanie aż do dnia poprzedzającego początek następnej miesiączki. Liczba dni to długość cyklu. Jeśli nie zna się swojej przeciętnej długości cyklu lub długość cyklu jest różna, należy zapoznać się z pytaniem 1 dotyczącym LH w pytaniach i odpowiedziach.

Można skorzystać z poniższej tabeli, aby ustalić dzień, w którym powinno się rozpocząć testowanie. Test można przeprowadzić o dowolnej porze dnia, ale powinno się go wykonywać mniej więcej o tej samej porze. Ważne jest, aby nie oddawać moczu przez co najmniej 2 godziny przed testem i unikać nadmiernego przyjmowania płynów przed badaniem.

Długość cyklu miesiączkowego

21 lub mniej	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41 i więcej
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Zobacz pytanie 2 w pytaniach i odpowiedziach

FSH

Jeśli pacjentka nadal ma miesiączki, pierwszy test należy wykonać w pierwszym tygodniu jej cyklu miesięczkowego (dni 2-7, przy czym dzień 1 to pierwszy dzień miesiączki). Powtórzyć test tydzień później.

Jeśli pacjentka nie ma już regularnych okresów, pierwszy test należy wykonać w dowolnym momencie w ciągu miesiąca, a drugi tydzień później.

11. Wskazówki dotyczące stosowania

Poniższe czynności odnoszą się do testu HCG-103B, aby przedstawić przykładowe stosowanie.

Krok 1: Usunąć arkusz izolacyjny, produkt wyda sygnał dźwiękowy, a diody zaświecą się na 1 s., co oznacza, że bateria została włożona prawidłowo.



Krok 2: Zebrać mocz do pojemnika przygotowanego przez użytkownika. Można testować mocz pobrany o dowolnej porze dnia - rano, po południu lub wieczorem.




Krok 3: Zdjąć pokrywę korpusu. Jeśli jest to pierwsze użycie, produkt wyda sygnał dźwiękowy i zaświecą się diody (diody gasną po 1 s). Jeśli test został już wcześniej przeprowadzony, ostatni wynik testu zostanie wyświetlany przez 15 sekund. Diody zostaną wyłączone w oczekiwaniu na test. Włożyć test, aż słychać będzie kliknięcie, wszystkie diody zaświecą się na 1 s., a następnie 2 diody będą migać naprzemiennie, co oznacza oczekiwanie na dodanie próbki.



Krok 4. Zanurzyć test w moczu (uwaga: najlepszy kąt nachylenia to 30-45°) na 3-5 sekund, wyjąć go i położyć na płaskiej powierzchni. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a 2 diody zaczną migać naprzemiennie. Następnie 4 diody zaczną migać naprzemiennie, wskazując wejście w tryb testowy.

Uwaga 1: Nie pić nadmiernych ilości wody na dwie godziny przed testem.

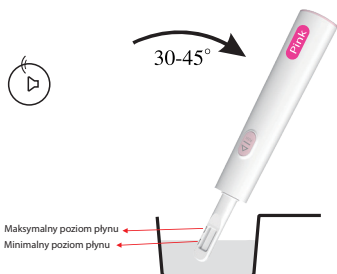

Uwaga 2: Unoszenie monitora do góry pokazane na poniższym rysunku nie może mieć miejsca podczas procesu pobierania próbki moczu i układania produktu na płaskiej powierzchni po dodaniu próbki.



Krok 5: Odczekać około 6-10 minut, aż słyhać będzie trzy sygnały dźwiękowe oznaczające zakończenie testu. Ostatni wynik testu zostanie wyświetlony ponownie po wyciągnięciu testu lub zdjęciu pokrywy korpusu (wyciągnięcie baterii spowoduje, że ostatni wynik testu zostanie wyczyszczony).



12. Wynik testu

Wynik testu będzie wyświetlany przez 30 sekund, a następnie będzie migać przez 5 minut, zanim ostatecznie monitor wyłączy się automatycznie.

LH	
Symbol „-” 	„-” Wskazuje wynik ujemny z niskim prawdopodobieństwem poczęcia
Symbol „+” 	„+” Wskazuje wzrost poziomu LH. Należy kontynuować testowanie codziennie o tej samej porze.
Symbol „++” 	Wykryto wzrost LH. Oznacza to największe prawdopodobieństwo poczęcia. Płodność jest najwyższa w ciągu następnych 48 godzin.

HCG	
Symbol „-” 	„-” Oznacza brak ciąży.
Biały symbol „*” 	Gdy wyświetli się biały symbol „*” prawdopodobnie jesteś w ciąży. Wyświetlają się także tygodnie ciąży: „1-2, 2-3, 3 +”.

FSH	
Symbol „-” 	„-” Oznacza, że jajniki funkcjonują normalnie.
Symbol „+” 	„+” Wskazuje na możliwość przedwczesnej niewydolności jajników. Zaleca się wykonanie jeszcze jednego testu, a jeśli symbol „+” pojawi się ponownie, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

13. Pytania i odpowiedzi

Cyfrowy system testowania płodności

Pytanie 1. Czy mogę używać DFT-101 z dowolnym innym testem?

Odp.: Z tym monitorem można używać wyłącznie kompatybilnych testów marki Pink.

Pytanie 2. Jak zrestartować DFT-101?

Odp.: Zdjąć pokrywę baterii i wyjąć baterię, odczekać 10 minut, a następnie ponownie włożyć baterię i zamknąć pokrywę baterii.

Pytanie 3. Dlaczego czas trwania testów nie zawsze jest taki sam?

Odp.: Czas trwania testu zależy od ilości dodanego moczu i poziomu każdego hormonu. Długość czasu testowania nie wpływa na wyniki testu.

Pytanie 4. Co się stanie, jeśli DFT-101 zostanie zamoczony?

Odp.: Jeśli DFT-101 zamoczy się, należy go wytrzeć. Niektóre zachlapania nie uszkodzą DFT-101, ale jeśli do jego środka dostanie się woda, może ulec uszkodzeniu. Jeśli tak się stanie, diody LED nie będą świecić lub zawsze będzie świecić się czerwony symbol „❀”.

LH

Pytanie 1. Nie znam mojej zwykłej długości cyklu lub długość mojego cyklu jest różna.

Skąd mam wiedzieć, kiedy rozpocząć testowanie?

Odp.: Jeśli nie znasz swojej zwykłej długości cyklu, radzimy odczekać co najmniej jeden cykl menstruacyjny i zanotować długość tego cyklu przed użyciem testu LH.

Po określeniu długości cyklu możesz skorzystać z instrukcji, aby ustalić, kiedy rozpocząć testowanie. Jeśli długość Twojego cyklu różni się o więcej niż 3 dni, wybierz najkrótszy cykl, jaki miałaś w ciągu ostatnich 6 miesięcy, aby ustalić, kiedy rozpocząć testowanie. Możliwe, że będziesz musiała użyć nowego zestawu testów, aby wykryć wzrost LH. Alternatywnie, jeśli chcesz rozpocząć testowanie bez znajomości długości cyklu, zalecamy rozpoczęcie testowania w 10 dniu cyklu. (Jednakże w tym przypadku możliwe jest, że możesz przegapić wzrost LH, ponieważ zaczęłaś testować zbyt późno lub może być konieczne sięgnięcie po nowe opakowanie, aby kontynuować testy.) (Patrz pytanie 5).

Pytanie 2. Długość mojego cyklu jest poza zakresem podanym w tabeli. Skąd będę

wiedzieć, kiedy rozpocząć testowanie?

Odp.: Jeśli Twój cykl trwa 21 dni lub mniej, rozpocznij testowanie w 5 dniu. Jeśli Twój cykl jest dłuższy niż 40 dni, rozpocznij testowanie 17 dni przed spodziewaną kolejną miesiączką.

Pytanie 3. O której porze dnia powinienam wykonać test?

Odp.: Możesz wykonać test o dowolnej porze dnia, ale powinnaś wykonywać go mniej więcej o tej samej porze każdego dnia. Nie należy oddawać moczu przez co najmniej 2 godziny przed testem.

Pytanie 4. Czy muszę korzystać ze wszystkich testów?

Odp.: Nie. Możesz przerwać testowanie, gdy wykryjesz wzrost LH i zachować pozostałe testy do wykorzystania w następnym cyklu, jeśli to konieczne.

Pytanie 5. Nie wykryłam jeszcze wzrostu LH. Co powinnam zrobić?

Odp.: Jeśli długość Twojego cyklu waha się o więcej niż 3 dni, możliwe, że będziesz potrzebować więcej testów, aby wykryć wzrost LH. Niektóre kobiety nie owulują w każdym cyklu i dlatego nie zauważają wzrostu LH w takich cyklach. Jeśli jesteś zaniepokojona wynikami, skontaktuj się z lekarzem.

Pytanie 6. Niedawno przestałam stosować antykoncepcję hormonalną (np. pigułkę antykoncepcyjną). Czy wpłynie to na wyniki?

Odp.: Nie, nie wpłynie to na Twoje wyniki. Jednak Twoja naturalna gospodarka hormonalna jest zaburzona przez antykoncepcję hormonalną, a Ty niedawno przestałaś ją stosować. Zatem Twoje cykle mogą być nieregularne, a stabilizacja może zająć trochę czasu. Możesz chcieć poczekać, aż wystąpią dwa naturalne cykle miesięczne i zanotować długość tych cykli, zanim użyjesz testów LH marki Pink.

Pytanie 7. Czy jakiegokolwiek leki lub schorzenia mogą mieć wpływ na wynik?

Odp.: Zawsze czytaj instrukcje producenta dotyczące przyjmowanych leków przed przeprowadzeniem testu. Niektóre stany medyczne i leki mogą niekorzystnie wpływać na wyniki testu: na przykład, jeśli jesteś w ciąży, niedawno byłaś w ciąży, przeszłaś menopauzę lub masz zespół policystycznych jajników, możesz uzyskać błędny wynik. Może to również wystąpić, jeśli pacjentka przyjmuje leki na płodność zawierające hormon luteinizujący lub ludzką gonadotropinę kosmówkową. Należy w takiej sytuacji skontaktować się z lekarzem.

Pytanie 8. Skoro produkt wskazuje kiedy jestem płodna, czy mogę stosować test LH marki Pink jako środek antykoncepcyjny?

Odp.: Nie. Test LH marki Pink wykrywa wzrost LH, który występuje tylko 24-48 godzin przed owulacją. Ponieważ plemniki mogą przetrwać kilka dni, nadal możesz zajść w ciążę, jeśli stosunek płciowy miał miejsce przed wykryciem wzrostu LH.

Pytanie 9. Używam testów LH marki Pink od kilku miesięcy i nie zaszłam w ciążę. Czy mogę być pewna, że zajdę w ciążę?

Odp.: Zajście w ciążę może zająć wiele miesięcy. Istnieje wiele powodów, dla których możesz nie zajść w ciążę, nawet jeśli dochodziło do stosunków płciowych w najbardziej płodnym okresie. Jeśli po kilku miesiącach nie zaszłaś w ciążę, powinnaś skonsultować się z lekarzem.

Pytanie 10. Podczas wykonania testu uzyskałam tylko wyniki „-” i „++”, bez żadnego wyniku „+”. Czy jest to normalne?

Odp.: Jest to normalne. Niektóre osoby mogą przegapić punkt czasowy progu „+” podczas badania LH, bezpośrednio osiągając szczyt owulacji i obserwując zmiany w wynikach od „-” do „++”.

Pytanie 11. Podczas wykonania testu uzyskałam tylko wyniki „-” i „+”, bez żadnych wyników „++”. Co powinnam zrobić?

Odp.: Po pierwsze, potwierdź, czy Twoje postępowanie w trakcie testu było w pełni zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcji, co dotyczy pobierania próbek itp. Jeśli nie ma żadnych problemów, generalnie zaleca się używanie wyniku „+” przez cały cykl jako szczytowego okresu owulacji lub przeprowadzenie cyklu powtórnych testów. Jeśli powyższe zjawisko nadal występuje, zaleca się konsultację z lekarzem, gdyż niższe od normy poziomy hormonu LH są rzadkie u zdrowych kobiet.

Pytanie 1. Mój wynik jest dodatni. Co powinnam zrobić?

Odp.: Jeśli Twój wynik to biały symbol „✱”, powinnas udać się do lekarza, który doradzi Ci, jakie kroki powinnas podjąć dalej. Monitor DFT-101 to tylko forma szacowania, kiedy nastąpiło poczęcie. Lekarz oszacuje etap ciąży na podstawie pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Poczęcie następuje około 2 tygodnie przed spodziewaną kolejną miesiączką.

Pytanie 2. Mój wynik jest ujemny. Co to znaczy?

Odp.: Możesz nie być w ciąży lub poziom tego hormonu ciążowego może nie być jeszcze wystarczająco wysoki, aby można go było wykryć. Wykonaj test ponownie za trzy dni. Jeśli ten test daje wynik „-”, a miesiączka się spóźnia, skontaktuj się z lekarzem.

Pytanie 3. Czy jakiekolwiek leki lub schorzenia mogą wpływać na wyniki?

Odp.: Zawsze czytaj instrukcje producenta dotyczące przyjmowanych leków przed wykonaniem testu. W przypadku uzyskania nieoczekiwanych wyników należy omówić je z lekarzem. Leki zawierające hCG mogą wpływać na wynik. Ciąża pozamaciczna lub niedawno przebyta, nawet jeśli nie została zakończona terminowym porodem, może powodować błędne wyniki. Na test NIE powinny wpływać zwykłe środki przeciwbólowe, alkohol ani antybiotyki. Jeśli jesteś w okresie menopauzy lub zbliżasz się do menopauzy, możesz uzyskać fałszywie dodatni wynik, nawet jeśli nie jesteś w ciąży.

Pytanie 4. Poprzednio wynik testu wskazał, że jestem w ciąży, ale zrobiłam test ponownie i otrzymałam wynik ujemny lub zaczął się mój okres. Co to znaczy?

Odp.: Możliwe jest uzyskanie wyniku dodatniego, a później stwierdzenie, że nie jesteś już w ciąży. Nazywa się to wczesną utratą ciąży, która niestety nie jest rzadkością i dotyka około 1 na 4 ciąż. Na szczęście większość kobiet może później zająć w zdrową ciążę.

Pytanie 5. Czy jest coś, co powinnam zrobić, jeśli planuję zająć w ciążę?

Odp.: Dobrze jest porozmawiać z lekarzem przed próbą zajścia w ciążę. Wielu lekarzy zaleca przyjmowanie kwasu foliowego lub prenatalnych suplementów witaminowych, unikanie alkoholu, rzucenie palenia, a także utrzymanie zdrowej wagi. Możesz również rozważyć użycie testu owulacyjnego, aby określić swoje najbardziej płodne dni.

Pytanie 6. Czy wskaźnik tygodni ciąży może dawać niedokładne wyniki?

Odp.: Jeśli wykonujesz test po 6 tygodniach od zapłodnienia, wskaźnik tygodni może dawać niedokładne wyniki. Dzieje się tak, ponieważ poziom hCG w moczu jest zbyt wysoki, aby test mógł dokładnie oszacować czas od poczęcia.

14. Rozwiązywanie problemów

Komunikat o błędzie	Problem	Rozwiązanie
Czerwony symbol „❁” świeci na stałe 	Test nie został umieszczony poziomo po dodaniu moczu Dodano za dużo lub za mało próbki. Zabrudzony test lub ponowne użycie testu. Test nie jest całkowicie wsunięty do monitora.	Użyć nowego testu, aby ponownie przetestować i postępować zgodnie z instrukcjami.
Czerwony symbol „❁” miga 	Po włożeniu testu lub założeniu pokrywy diody monitora migają na czerwono.	Bateria jest słaba - należy wymienić ją na nową.
Produkt wyłącza się automatycznie po 5 minutach.	Nie dodano próbki lub dodanie próbki nie powiodło się.	Wyciągnąć test, ponownie włożyć i dodać próbkę lub wymienić na nowy test i przetestować ponownie.

Jeśli po ponownym uruchomieniu produktu nadal występują problemy, należy skontaktować się z producentem lub lokalnym dystrybutorem.

15. Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Digital Fertility Testing System Cyfrowy system monitorowania płodności Digital Test Trio
Model	FM-101L, FM-101H, FM-102, FM-103
Wymiary	127,5mm*26,3mm*15,5mm
Waga	26g (wraz z baterią)
Miejsce użytkowania	Do użytku w pomieszczeniach
Środowisko pracy	Temperatura 10°C~40°C, wilgotność: ≤ 85%
Warunki transportu i przechowywania	Temperatura -20°C~55°C, wilgotność: ≤ 95%
Stopień zanieczyszczenia	Stopień zanieczyszczenia IP 2
Żywotność	2 lata (bez baterii)
Bateria	1* bateria CR2032
Maks. wysokość testowania	Do 10 000 stóp (3048 metrów) nad poziomem morza
Warunki przechowywania testu	Temperatura: 2°C~30°C(36°F~86°F)
Okres przydatności testu	24 miesiące
Dokładność	LH 99,5%, FSH 99,5%, HCG 99,3%
Czułość	LH 10mIU/ml, 20mIU/ml, FSH 25mIU/ml, HCG 25mIU/ml

16. Bibliografia

- [1] Yang X M , Xing G J , Kuan X U , et al. Quantitative detection of human chorionic gonadotrophin using colloid gold immunochromatographic assay [J]. Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences), 2012.
- [2] Chan K W , Lo C , Chu C S , et al. Development of a Colloidal Gold-based Immunochromatographic Test Strip for Detection of Cetacean Myoglobin[J]. J Vis Exp, 2016(113).
- [3] Ju Y , Hao H J , Xiong G H , et al. Development of colloidal gold-based immunochromatographic assay for rapid detection of Streptococcus suis serotype 2[J]. Veterinary Immunology & Immunopathology, 2010, 133(2-4):207-211.
- [4] Gnoth C.and Johnson S.Strips of Hope: Accuracyof Home Pregnancy Tests and New Developments. Geburtshilfe Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.

17. Indeks symboli

Tabela symboli			
	Ograniczenie temperatury przechowywania i transportu		Numer serii
	Prąd stały		Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej
	Producent		Data produkcji
	Zawiera wystarczającą ilość do <n> testów		Nie używać ponownie
	Numer seryjny		Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Ostrożnie		Chronić przed wilgocią
	Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro		Numer katalogowy
	Zapoznać się z instrukcją użytkowania		Termin przydatności
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone i zapoznać się z instrukcją użytkowania		Importer
	Produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy 98/79/WE, „0123” to numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.		



Sejoy Biomedical Co., Ltd.

Area C, Building 2, No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic
Development Zone, 311100 Hangzhou City, Zhejiang, Chiny

www.sejoy.com

Tel.: +86-571-81957767

Email: info@sejoy.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Niemcy



Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.

Aleja Stanów Zjednoczonych 61A

04-028 Warszawa