


# NARIVENT Spray PL

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Nome:       | NARIVENT Spray PL      |
| Codice:     | 30FG041                |
| Tipo Carta: | USOMANO 60gr/mq bianco |
| F.to carta: | 150x200 mm.            |
| Piega:      | SI finito 25 mm        |
| Stampa:     | 1 colore BLU REFLEX    |

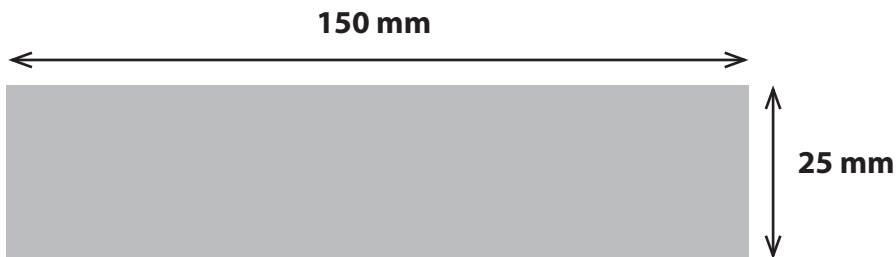

2 bozza  
del  
07-10-2019

# narivent®

PL

## Przeciwobrzękowy aerozol do nosa

**Przed zastosowaniem produktu należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki.**

### 1. Co to jest przeciwobrzękowy aerozol do nosa Narivent® i w jakim celu się go stosuje?


Przeciwobrzękowy aerozol do nosa Narivent® jest wyrobem medycznym o działaniu osmotycznym, wywierającym efekt przeciwobrzękowy i przeciwzapalny, wskazany:

- u pacjentów z przerostem małżowin nosowych w celu zmniejszenia niedrożności nosa,
- w swoistym (alergicznym) lub nieswoistym naczynioruchowym nieżycie nosa,
- w leczeniu obrzęku towarzyszącego ostrym i przewlekłym stanom zapalnym zatok przynosowych i migdałka gardłowego,
- w leczeniu i w profilaktyce pooperacyjnych nawrotów polipów nosa,
- w leczeniu przed- i pooperacyjnym patologii nosa i zatok przynosowych.

### 2. Co należy wiedzieć zanim zastosuje się przeciwobrzękowy aerozol do nosa Narivent®?

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu (wymienionych w punkcie 6).

### 3. Jak stosować przeciwobrzękowy aerozol do nosa Narivent®?

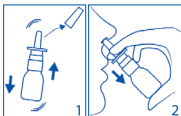

- Usunąć nasadkę ochronną z końcówki rozpylacza (patrz rys. 1). Oprzeć kciuk na podstawie pojemnika, a palec wskazujący i środkowy na skrzydełkach dozownika, następnie nacisnąć je do dołu. Zwolnić nacisk. Powtarzać nacisk do momentu uzyskania pierwszego rozpylenia. Pochylić głowę lekko do przodu i rozpylić aerozol w otworze nosowym, nie wykonując wdechu w czasie aplikacji (patrz rys. 2).
- Dorośli i dzieci: zaleca się dwa rozpylenia do każdego otworu

nosowego dwa razy dziennie lub zgodnie ze wskazaniami lekarza.

### 4. Środki ostrożności.

- Podczas pierwszych zastosowań może wystąpić przejściowy wodnisty wyciek z nosa (katar), połączony z uczuciem swędzenia o niewielkim nasileniu i łagodnym kichaniem. Wynika to ze specyficznego mechanizmu działania produktu.
- W przypadku leczenia przedoperacyjnego należy upewnić się, czy nie występuje nadwrażliwość lub nietolerancja preparatu.
- W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Nie używać produktu, jeśli oryginalne opakowanie jest naruszone lub zmienione (np. w wyniku przepakowania). Ingerowanie w oryginalne opakowanie lub przepakowanie może naruszyć wymogi bezpieczeństwa.
- Unikać kontaktu z oczami.
- Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
- Preparat powinna używać tylko jedna osoba (ze względów higienicznych).
- Nie połykać.
- Nie zanieczyszczać środowiska naturalnego użytym opakowaniem.

### 5. Sposób przechowywania przeciwobrzękowego aerozolu do nosa Narivent®.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Po użyciu nałożyć nasadkę ochronną na rozpylacz.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C.

### 6. Informacje dodatkowe.

**Skład:** Mannitol, glicerynian dwupotasowy, glicerol, kopolimer PEG/PPG, sól dwusodowa EDTA, N-hydroksymetyloglicynian sodu, polisorbát 20, sorbinian potasu, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona, aromaty naturalne.

### Opakowanie.

Butelka 20 ml.

### WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ

**DMG Polska Sp. z o.o.**

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

www.dmgpolska.eu

**Opakowanie przeznaczone na rynek polski.**

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZACH



**DMG Italia srl**

via Laurentina Km. 26,700

Pomezia (Rzym) - WŁOCHY

www.dmgit.com



Aktualizacja: 09/2019 30FG041 2-07/10/2019