

Należy przeczytać uważnie całą instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu wyrobu SUPERSEPTIN żel na rany, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.

Instrukcja używania

SUPERSEPTIN żel na rany
żel na skórę, tuba 30 g

WSKAZANIA

SUPERSEPTIN żel na rany to wyrób medyczny wspomagający w leczeniu niezakażonych zmian skórnych, powierzchniowych ran od otarć, ran ciętych, ran chirurgicznych, oparzeń, a także owrzodzeń naczyniowych (podudzi), owrzodzeń cukrzycowych, odleżyn i podrażnionej skóry po radioterapii. Specjalna formuła żelu, dzięki jego właściwościom bioadhezyjnym, zapewnia długotrwały kontakt substancji aktywnych w miejscu aplikacji.

SPOSÓB UŻYWANIA

Wyrób medyczny **SUPERSEPTIN żel na rany** należy stosować zgodnie z instrukcją używania. W razie wątpliwości przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Osoby, które nie są w stanie samodzielnie zaaplikować żelu powinny poprosić o pomoc.

SUPERSEPTIN żel na rany należy stosować zewnątrznie. Dokładnie umyć ręce. Przed zastosowaniem dokładnie oczyścić (np. sterylnym roztworem soli fizjologicznej) i osuszyć miejsce aplikacji. Niewielką ilość żelu (warstwę o grubości około 1 mm) nałożyć na całą powierzchnię rany. Nie należy dotykać rany czubkiem opakowania, aby uniknąć możliwości przeniesienia zakażenia. Nie masować. W razie potrzeby założyć gazę, bandaż lub plaster. Aplikację można powtarzać wielokrotnie, w zależności od potrzeb. Skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku dużych, obszernych lub bardzo głębokich ran; w przypadku silnie zakażonych ran; w przypadku wolnego gojenia się rany lub ryzyka powikłań.

PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zamknąć pojemnik po każdym użyciu. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek ze składników. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać produktu, jeśli opakowanie zostało uszkodzone.

Nie są znane zdarzenia niepożądane ani interakcje związane z używaniem produktu.

PRZECZYSZCZANIE

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródła ciepła, w temperaturze poniżej 25°C. Data ważności odnosi się do produktu, którego opakowanie jest w stanie nienaruszonym, przechowywanego w odpowiedni sposób.

SKŁAD WYROBU MEDYCZNEGO

SUPERSEPTIN żel na rany

sukralfat 70 mg/g, poliheksanid (PHMB), glikol polietylenowy 600 (PEG 600), glikol propylenowy, hydroksyetyloceluloza, fenoksyetanol, woda oczyszczona.

OPIS OPAKOWANIA

SUPERSEPTIN żel na rany jest dostępny w postaci żelu (tuba) o pojemności 30 g.

Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, tubę oraz instrukcję używania.

SUPERSEPTIN żel na rany jest wyrobem medycznym.



NEOTAC Pharma Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 148a/1a, 30-212 Kraków

Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu zewnętrznym:



Dane wytwórcy



Należy zapoznać się z treścią instrukcji używania



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



Data ważności



Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C



Numer serii