

Bacterid®

CE
WYRÓB
MEDYCZNY

Co to jest Bacterid®

Bacterid® to wyrób medyczny w postaci kropli do nosa przeznaczony do stosowania we wszystkich stanach zapalnych charakteryzujących się przekrwieniem błony śluzowej powodującej uczucie zatkanego nosa. Dzięki specjalnej recepturze zawierającej olej z owoców drzewa mastyksowego o znaczących właściwościach kojących, produkt ułatwia zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa. Działanie produktu uzupełniają składniki emolientowe, które łagodzą podrażnioną błonę śluzową nosa.

Skład: Olej z owoców drzewa mastyksowego (*Pistacia lentiscus* L.); witamina E (DL-alfa-tokoferyl), masło Shea (*Butyrospermum Parkii*); estry PEG-6 oleju z pestek moreli; trójglicerydy średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

Jak stosować Bacterid®

Usunąć osłonkę z dozownika. Unikać kontaktu z jakąkolwiek powierzchnią, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Włożyć dozownik do butelki.

Do stosowania dla dorosłych i dzieci od 2 roku życia.

Dzieci od 2 roku życia: 3 krople 3 razy dziennie do każdego otworu nosowego.

Dorośli: 5 kropli 2 razy dziennie do każdego otworu nosowego.

O ile lekarz nie zaleci inaczej.

Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na składniki produktu. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Po użyciu dobrze zamknąć butelkę. Nie należy używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone ani po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. Nie wstrzykiwać, nie połykać. Unikać niewłaściwego stosowania produktu.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi (Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa).

Po zużyciu produktu pojemnik należy odpowiednio zutylizować.

Opakowanie: butelka 15 ml z dozownikiem.

	Wytwórca/ producent		Chronić przed promieniowaniem słonecznym
	Data ważności		Zajrzyj do instrukcji używania
	Numer serii		Dopuszczalna temperatura przechowywania
	Nie używać, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone		



PharmExtracta S.p.A.
Via Natta, 28 – 29010 Pontenure

Data ostatniej aktualizacji:
marzec 2025

Dystrybutor:



TACTICA
PHARMACEUTICALS

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 148a/1a, 30-212 Kraków

www.tactica.pl

Na licencji PharmExtracta S.p.A