

# KARPAL AKUT

PL

## INSTRUKCJA UŻYWANIA

**Wskazania:** KARPAL AKUT to wyrób medyczny przeznaczony do masażu w zespole cieśni nadgarstka. Zmniejsza dolegliwości bólowe dłoni i poprawia czucie w palcach.

Dzięki masażom i łagodzącym ekstraktom roślinnym (rozmaryn, skrzyp, świetlik łąkowy i chmiel). KARPAL AKUT zmniejsza dolegliwości bólowe dłoni i poprawia czucie w palcach.

**Sposób użycia:** Preparat przeznaczony do stosowania miejscowego oraz masażu nadgarstków, dłoni i przedramion. Odpowiednią ilość maści nanieść i wmasować okrężnymi ruchami w skórę nadgarstka i wewnętrzną stronę przedramienia.

Zaleca się aplikować 2 razy dziennie lub częściej w ciągu dnia w zależności od nasilenia dolegliwości (maksymalnie 5 razy dziennie).

**Ostrzeżenia:** Nie stosować na uszkodzoną skórę. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Nie stosować wokół oczu, na błony śluzowe i piersi. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Nie stosować po upływie zalecanego terminu przydatności. Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

**Przechowywanie:** Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od +5 do +27°C. Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać poza zasięgiem dzieci!

**Skład:** Woda, etanol, olej z nasion konopii siewnych (*Cannabis sativa*), dimetykon, izostearynian glikolu propylenowego, etyloceluloza, laurynian glikolu

propylenowego, ekstrakt z przetacznika leśnego (*Veronica officinalis*), ekstrakt ze skrzypu polnego (*Equisetum arvense*), ekstrakt ze świetlika łąkowego (*Euphrasia rostkoviana*), ekstrakt z chmielu zwyczajnego (*Humulus lupulus*), trigliceryd kaprylowo-kaprynowy, kaprylan glicerolu, undecylenian glicerolu, glikol kaprylowy, etyloheksylogliceryna, mentol, karbomer, olejek z rozmarynu lekarskiego (*Rosmarinus officinalis*), krosopolimer metakrylanu metylu, wodorotlenek sodu.

Wszelkie poważne zdarzenia niepożądane występujące w związku z danym produktem należy zgłaszać wytwórcy i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym producent i/lub pacjent mają swoją siedzibę.

### Dystrybutor:



Solinea Sp. z o.o.

Elizówka, ul. Szafranowa 6  
21-003 Ciecierzyn, Polska

### Producent:

SYP EUROPE Sp. o.o.  
ul. Motelowa 21

43-400 Cieszyn, Polska



### Wyjaśnienie symboli:

	Przeczytaj instrukcję użytkowania
	Termin ważności
	Wyrób medyczny
	Temperatura przechowywania
	Chronić przed światłem słonecznym
	Numer partii
	Producent
	Wyrzucić puste opakowanie do kosza

Data aktualizacji ulotki: 06.12.2023 3710200032