

# NEBU-dose



## HIALURONIC

### ZASTOSOWANIE

NEBU-dose HIALURONIC to 0,9% roztwór soli fizjologicznej z kwasem hialuronowym, w postaci pojedynczych ampułek, bez konserwantów, przeznaczony do nebulizacji. Działanie preparatu opiera się na wykorzystaniu rozmaitych mechanizmów ułatwiających ruch wydzieliny w drogach oddechowych, poprawiając komfort oddychania poprzez:

- rozbijanie wiązań jonowych wydzieliny śluzowej, dzięki czemu zmniejsza się lepkość i elastyczność wydzieliny;
- absorpcję wody z błony śluzowej i podśluzowej, ograniczając obrzęk ścian dróg oddechowych;

- pobudzenie kaszlu i wykrztuszania jako mechanizmów wspomagających usuwanie śluzu zalegającego w oskrzelach, co prowadzi do udrożnienia dróg oddechowych.

NEBU-dose HIALURONIC do stosowania w terapii inhalacyjnej jest szczególnie zalecany dla pacjentów cierpiących na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Preparat może być również stosowany jako nośnik dla innych leków przeznaczonych do inhalacji.

## SPOSÓB UŻYCIA

Preparat ma optymalne zastosowanie w inhalatorach pneumatycznych. Zaleca się przestrzeganie instrukcji użytkownika określonych przez producenta urządzenia. Do jednorazowej inhalacji używać 4 lub 5 ml roztworu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt nie zawiera konserwantów. Po otwarciu ampułki należy natychmiast zużyć jej zawartość, a po użyciu pozbyć się ampułki celem uniknięcia zanieczyszczeń mogących stanowić źródło infekcji.
- Nie stosować preparatu w połączeniu z innymi lekami bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.
- U pacjentów bardzo wrażliwych, preparat należy podawać zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ w pierwszej kolejności może być konieczne podanie leku rozszerzającego oskrzela.
- W przypadku skurczu oskrzeli lub uporczywego kaszlu należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia ampułki.
- Nie przechowywać w temperaturze przekraczającej 25 °C.

## SKŁAD

Jalowy roztwór chlorku sodu 0,9%,  
hialuronian sodu.



**WYTWÓRCA**

UNOLAB MANUFACTURING, S.L.  
Av/ De las flores 6, 28970  
Humanes de Madrid (Madrid), Hiszpania

## DYSTRYBUTOR



Solinea Sp. z o.o.  
Elizówka, ul. Szafranowa 6  
21-003 Ciecierzyn

Rev.2017/AGO/29



300640