

SEPTIVAG

GLOBULKI DOPOCHWOWE

Globulki dopochwowe SEPTIVAG o działaniu ochronnym, odbudowującym i łagodzącym, zalecane w leczeniu i profilaktyce zakażenia oraz zapalenia pochwy o podłożu bakteryjnym i grzybiczym. Dzięki zawartości bogatego w polifenole naturalnego ekstraktu z propolisu, kwasu mlekowego i kwasu hialuronowego (sól sodowa) globulki SEPTIVAG wspomagają regenerację błony śluzowej pochwy.

Zalecane leczenie:

- w przypadku nawracającego **zapalenia i zakażenia pochwy;**
- w celu złagodzenia uczucia **swędzenia, pieczenia i nieprzyjemnego zapachu;**
- w celu przywrócenia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy, **również w przypadku cukrzycy i/lub stresu;**
- w celu zapobiegania infekcjom **po przebytych zabiegach chirurgicznych.**

Sposób użycia i dawkowanie: umyć dokładnie ręce, wyjąć jedną globulkę i wprowadzić ją głęboko do pochwy w pozycji leżącej na plecach. Zaleca się stosowanie 1 globulki dziennie przed pójściem spać, przez 7 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Skład: kwas hialuronowy (sól sodowa), witamina E, lipofilowy ekstrakt z *Aloe vera* (aloesu zwyczajnego), dichlorowodorek chlorheksydyny, kwas mlekowy, glicerydy półsyntetyczne, ekstrakt z propolisu.

Ostrzeżenia: Unikać kontaktu z oczami, a jeśli produkt dostanie się do oczu, przemyć dużą ilością wody. Nie połykać. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła (w temperaturze poniżej 25°C). Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na spodzie opakowania. Termin ważności obowiązuje w przypadku prawidłowo przechowywanego produktu. Nie stosować produktu, jeśli opakowanie jest otwarte i/lub uszkodzone. Nie przekraczać zalecanej dawki, chyba że lekarz zaleci inaczej. W przypadku wystąpienia uczulenia należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem. Nie stosować na uszkodzone błony śluzowe.



Wyrób medyczny



Wersja 1 z 01/2023

CHOSVPI00110

 Ekuberg Pharma
Via Tito Schipa, 6
73020 Carpignano Salentino (LE)
Włochy

Dystrybutor:



Solinea Sp. z o.o.
Elizówka, ul. Szafranowa 6
21-003 Ciecierzyn, Polska