

Instrukcja używania wyrobu medycznego

DEPROX[®]

CZOPKI

Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego, zarówno bakteryjne jak i niebakteryjne, jest schorzeniem wieloczynnikowym, które może pojawić się jako następstwo wcześniejszych zapaleń gruczołu krokowego lub może być spowodowane przez bakterie, urazy, czynniki psychofizyczne, złe nawyki związane z aktywnością seksualną czy nieprawidłowy styl życia.

Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego może być konsekwencją chorób proktologicznych (przetoki, szczeliny, hemoroidy), jak również może być przyczyną takich schorzeń. Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego często wiąże się z bólem, który cechuje przedłużający się skurcz mięśni dna miednicy z następczym uciskiem i zapaleniem nerwów somowych. Stan ten powoduje powstanie w bańce odbytnicy wysokiego ciśnienia, sprzyjającego przechodzeniu bakterii z bańki odbytnicy do gruczołu krokowego poprzez układ limfatyczny lub poprzez ściany naczyń. Ograniczenie przechodzenia szkodliwych, patogennych czynników z odbytu do gruczołu krokowego stanowi pierwszy krok do przywrócenia prawidłowych warunków fizjologicznych w prostatie. Ponadto działanie nawilżające i łagodzące w strefie odbytu przyczynia się do zmniejszenia typowych zaburzeń zapalnych spowodowanych chorobami proktologicznymi (przetoki, szczeliny, hemoroidy), zapewniając odpowiednie nawilżenie i elastyczność śluzówki. Czopki Deprox[®] to wyrób medyczny zawierający Graminex[®] NAX[™], kwas hialuronowy.

Działanie filmogenne w czopkach Deprox[®] oparte jest o działanie kwasu hialuronowego, wspomaganego przez Graminex[®] NAX[™], który gwarantuje skuteczną barierę dla patogenów. Lipofilne składniki Graminex[®] i kwas hialuronowy pomagają również utrzymać nawilżenie i elastyczność błon śluzowych.

Czopki Deprox[®] to wyrób medyczny do stosowania miejscowego o podwójnym działaniu:

- pomaga stworzyć film o właściwościach barierowych, izolujący miejsce aplikacji i ograniczający penetrację mikroorganizmów;
- dzięki działaniu silnie nawilżającemu i łagodzącemu pomaga przywrócić prawidłowe warunki fizjologiczne błony śluzowej odbytu.

Przeznaczenie:

Czopki Deprox[®] to wyrób medyczny wspomagający w miejscowym leczeniu objawów kanału odbytu (pieczenie, ból), w przebiegu zastoinowej niewydolności związanej z ostrym i przewlekłym zapaleniem gruczołu krokowego. Deprox jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn (w wieku ≥ 18 lat).

Instrukcja użytkowania:

1. Przed zastosowaniem należy umyć ręce;
2. Zgiąć blister wzdłuż przerywanej linii i pociągnąć;
3. Usunąć blister, jak wskazano w nacięciu, rozsuwając jego dwie części na boki i wyjąć czopek;
4. Wprowadzić czopek do odbytu i napiąć pośladki na kilka sekund;
5. Po zaaplikowaniu czopka należy umyć ręce

Dawkowanie i sposób użycia:

1 czopek dziennie, najlepiej wieczorem, przed snem, przez co najmniej 10 kolejnych dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Czas stosowania zależy od natężenia objawów.

Ostrzeżenia:

- Nie należy używać produktu do zastosowań innych niż wskazane w ulotce.

- Produkt należy stosować wyłącznie drogą doodbytniczą.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności wydrukowanego na opakowaniu.
- Termin ważności dotyczy produktu prawidłowo przechowywanego w nieotwartym opakowaniu.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w temperaturze poniżej 25°C.
- Po użyciu opakowanie produktu należy usunąć zgodnie z wymogami środowiskowymi.
- Nie należy używać produktu, jeśli opakowanie wydaje się być naruszone.
- Nie połykać.
- Nie należy stosować produktu w przypadku zmian chorobowych lub poważnych obrażeń.
- Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- Przerwać leczenie w przypadku wystąpienia nieprawidłowej reakcji miejscowej.
- Każdy poważny incydent spowodowany użyciem wyrobu należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

Środki ostrożności:

W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem. W przypadku jednoczesnego stosowania innych leków, przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy używać produktu, jeśli opakowanie jest naruszone.

Przeciwwskazania:

Indywidualna nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Stosowanie produktu przez dłuższy czas powinno odbywać się pod nadzorem lekarza. W przypadku uczulenia należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Warunki przechowywania:

Produkt przechowywać z dala od źródeł ciepła, w temperaturze poniżej 25°C.

Zawartość opakowania:

2 blistry po 5 czopków jednorazowego użycia po 1,65 g.

Zawartość opakowania-próbki:

1 blister z 2 czopkami jednorazowego użytku po 1,65 g.

Skład:

Graminex[®]NAX[™] (ekstrakt z pyłku kwiatowego, pasta 7%; 24,7 mg/czopek), hialuronian sodu (3,3 mg/czopek), rozpuszczalny w tłuszczach ekstrakt z Malva sylvestris L., rozpuszczalny w tłuszczach ekstrakt z Calendula officinalis L., rozpuszczalny w tłuszczach ekstrakt z Aloe barbadensis M., półsyntetyczny Glicerydy C10-18/C12-18, olejek eteryczny z Eugenia caryophyllus, octan witaminy E, palmitynian witaminy A, krzem koloidalny.



Producent: IDI Integratori Dietetici Italiani S.r.l.

Via Goffredo Mameli, 12 - 95020 Acì Bonaccorsi (CT).

Dystrybutor: Hexanova Sp. z o.o.
ul. Brukowa 36, 05-092 Łomianki



PAP21: opakowanie - PAPIER (RECYKLING)

PAP22: ulotka - PAPIER (RECYKLING)

POZOSTAŁE: PLASTIK (RECYKLING)

Należy postępować zgodnie z lokalnymi

przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

