

Instrukcja stosowania wyrobu medycznego AXOBiotic® KATAR KIDS.

Przed użyciem wyrobu medycznego należy zapoznać się z treścią ulotki informacyjnej zawierającej instrukcję użycia, a w razie dodatkowych pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

axobiotic® KATAR Kids

Wyrób medyczny, oczyszczający spray do nosa dla dzieci z formułą aXovelum® wspomagający leczenie infekcji nosa i zatok. Oczyszcza i nawilża błony śluzowe, ułatwia oddychanie, tworzy barierę przed drobnoustrojami.

Wskazania: Dedykowany do łagodzenia podrażnień błon śluzowych, optymalnego nawilżenia przesuszonych błon śluzowych jam nosowych, wspomagania leczenia infekcji nosa i zatok.

Zakres działania: Nawilżające, uelastyczniające, regenerujące, pielęgnujące, powlekające, antybakteryjne.

- oczyszcza i nawilża błony śluzowe
- łagodzi podrażnienia nosa i zatok
- ułatwia oddychanie
- tworzy barierę przed drobnoustrojami.

Sposób działania: Wyrób medyczny aXobiotic® Katar Kids wykazuje wysoką skuteczność dzięki innowacyjnej formule aXovelum®, łączącej działanie chitozanu oraz cząstek metali szlachetnych aXonnite®. Spray tworzy na śluzówce jam nosowych naturalną powłokę ochronną izolującą błony śluzowe przed działaniem bakterii, wirusów i grzybów i tym samym zapobiega ich kolonizowaniu. Obecne w preparacie miedź oraz złoto aXonnite® zabezpieczają wyrób przed rozwojem mikroorganizmów chorobotwórczych. Preparat udrażnia górne drogi oddechowe, redukuje wydzielinę z nosa i ułatwia oddychanie.

Skład: woda, chitozan, pantenol, miedź aXonnite®, złoto aXonnite®, ekstrakt z liści eukaliptusa, olejek z liści eukaliptusa. **Substancje pomocnicze:** gliceryna, mleczan sodu, kwas mlekowy, kaprylan poliglicerolu-6, kaprylan poliglicerolu-4.

Pojemność: 30 ml.

Instrukcja stosowania: Przed użyciem wstrząsnąć; aplikować do nosa kilka razy dziennie albo według zaleceń lekarza.

Stosować profilaktycznie w celu zapobiegania nawrotom infekcji, szczególnie w okresie wzmożonych zachorowań. Produkt polecany dla dzieci powyżej 1 roku życia.

Przykłady zastosowań: Wspomaga leczenie i łagodzi objawy

- infekcji bakteryjnych nosa, zatok i błon śluzowych
- podrażnionych błon śluzowych
- kataru
- zatkanego nosa
- trudności w oddychaniu.

Przeciwwskazania: Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek składnik sprayu.

Działania niepożądane: Nie są znane żadne działania niepożądane oprócz ewentualnej nadwrażliwości na składniki sprayu.

Środki ostrożności: Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Opakowanie: 30 ml.

 **Wytwórca:** Nano-Tech Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wał Miedzeszyński 203, 04-987 Warszawa
www.nanobiotic.pl; www.nano-tech.pl

aXovelum®
POWERED BY AXONNITE® TECHNOLOGY