

REINNERVA®

Sterylnie krople do oczu

Kwas hialuronowy (HA)
Palmitoiloetanoloamid (PEA)
Omega 3 (DHA)

**1 butelka wielodawkowa 10 ml
- bez konserwantów**

SKŁAD

Sól sodowa kwasu hialuronowego (NaHA 0,15%), hydroksypropylometyloceluloza (0,10% HPMC), wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 (0,01% DHA), palmitoiloetanoloamid (0,01% PEA), tauryna, glicerol roślinny, metylo-β-cyklodekstryna (MBCD), chlorek sodu, glicerol, EDTA disodowy dwuwodny, dodekahydrat dwuzasadowego fosforanu sodu, woda oczyszczona, izotoniczny roztwór oftalmiczny o fizjologicznym pH.

OPAKOWANIE

REINNERVA® 1 butelka wielodawkowa zawierająca 10 ml sterylnych kropli do oczu bez konserwantów, umieszczona w tekturowym pudełku.

WSKAZANIA

REINNERVA® nawilża, stabilizuje i chroni powierzchnię oka we wszystkich przypadkach suchości, pieczenia i zmęczenia oczu spowodowanych jakościowymi i ilościowymi zmianami filmu łzowego wynikającymi z:

- przewlekłego leczenia hipotensyjnymi kroplami do oczu (krople przeciw jaskrze)
- zabiegów chirurgicznych oka (np. chirurgia refrakcyjna, zaćma)
- powierzchniowych urazów oka
- długotrwałego używania soczewek kontaktowych
- długotrwałej pracy przy ekranie monitora

DAWKOWANIE I SPOSÓB STOSOWANIA

Przy pierwszym użyciu produktu należy usunąć zabezpieczenie ochronne (plombę) (zgodnie z Rys. 2) i zdjąć nasadkę ochronną (zgodnie z Rys. 3).

Trzymając pojemnik wielodawkowy pionowo nad okiem (jak pokazano na rysunku 4), delikatnie opuścić dolną powiekę. Wkraplać 1 lub 2 krople do oka 1 lub 2 razy dziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty, delikatnie naciskając korpus butelki.

REINNERVA® może być stosowana również w trakcie noszenia soczewek kontaktowych.

SPOSÓB PRZECZOWYWANIA I OKRES WAŻNOŚCI

- Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Okres ten dotyczy produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej (25° + 2°C).
- Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.
- Przechowywać produkt z dala od światła, trzymając butelkę wielodawkową w kartonowym pudełku.
- Po użyciu należy szczelnie zamknąć butelkę.

REINNERVA® nie zawiera konserwantów, więc roztwór można stosować przez 3 miesiące od pierwszego otwarcia. Roztwór niewykorzystany w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki należy wyrzucić. W przeciwnym razie sterylność nie będzie gwarantowana, co może wiązać się z ryzykiem infekcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI/OSTRZEŻENIA

- Umyć ręce przed użyciem.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku okulistycznego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować w przypadku szczególnej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- Nie połykać roztworu.
- Aby uniknąć zanieczyszczenia, nie należy dotykać żadnej powierzchni po otwarciu butelki i unikać bezpośredniego kontaktu końcówki butelki z okiem, w takim przypadku butelkę należy wyrzucić.
- W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy zakraplać do oka równocześnie z innymi lekami okulistycznymi, gdyż może to zmienić ich działanie; pomiędzy kolejnymi zakraplaniami należy zachować odstęp co najmniej 15 minut.
- Nie stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Data ważności odnosi się do produktu w stanie nienaruszonym i prawidłowo przechowywanego.
- Stosować u osób dorosłych.
- Wszelkie poważne zdarzenia związane z użytkowaniem wyrobu należy zgłaszać firmie MEDIVIS oraz właściwemu organowi.



Rys. 1.

Wyjąć butelkę
z opakowania



Rys. 2.

Usunąć zabezpieczenie
ochronne (plombę)



Rys. 3.

Zdjąć nasadkę
ochronną



Rys. 4.

Ustawić pojemnik pionowo,
kropłomierzem skierowanym w
stronę powierzchni oka i wdroplić
jedną lub dwie krople do oka.



Wyroby medyczne



Przechowywać
z daleka od światła
słonecznego



Nie przechowywać
w temperaturze
wyższej niż 25°C



Kod kraju
produkcji



Nie sterylizować
ponownie



Wielokrotne użycie
u jednego pacjenta



Nie używać w przypadku
uszkodzonego opakowania



Zapoznać
się z ulotką



Sterylna przy
zastosowaniu
techniki aseptycznej



Zużyte opakowanie
wyrzucić do kosza



Recykling



Medivis S.r.L.
Via Carnazza, 34 C
95030 Tremestieri Etneo,
Catania, Włochy

Dystrybutor:



Solinea Sp. z o.o.
Elizówka, ul. Szafranowa 6
21-003 Ciecierzyn, Polska