

Instrukcja używania wyrobu medycznego

HEXAGYN® żel

Nawilżający i łagodzący żel dopochwowy

Spis treści instrukcji używania:

1. Opis
2. Sposób użycia
3. Skład
4. Ostrzeżenia
5. Przeciwwskazania
6. Opakowanie
7. Producent

1. Opis

HEXAGYN® żel to wyrób medyczny o pH 4,5 zalecany wspomagająco w profilaktyce i leczeniu suchości pochwy i sromu. Dzięki swojej szczególnej formule działa nawilżająco, odświeżająco i kojąco na okolice sromu i pochwy. Żel dopochwowy Hexagyn® żel jest wskazany w przypadku suchości pochwy i sromu oraz we wszystkich sytuacjach, w których potrzebne jest skuteczne działanie łagodzące, przynoszące ulgę w dyskomforcie spowodowanym słabym nawilżeniem intymnym, np. w przypadku podrażnienia, świądu, zaczerwienienia, pieczenia i nadwrażliwości, a nawet w przypadku menopauzy lub przyjmowania estrogeny i progestagenu. Kwas hialuronowy działa nawilżająco i emolienyjnynie, zapobiegając suchości pochwy, ułatwiając przywrócenie naturalnego i prawidłowego środowiska pochwy. Kwas mlekowy, składnik naturalnie obecny w pochwie sprzyja natychmiastowej korekcie pH i ułatwia naturalną odbudowę delikatnego ekosystemu sromu i pochwy. Formuła jest wzbogacona obecnością witamin o działaniu antyoksydacyjnym oraz ekstraktów roślinnych,

które ze względu na swoje właściwości mają działanie emolienyjne i łagodzące.

2. Sposób użycia

Zaleca się stosowanie żelu raz dziennie przez 6 dni lub zgodnie ze wskazaniami lekarza. Przed aplikacją należy dokładnie umyć ręce i okolice stosowania.

DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO:

Ścisnąć tubę, aby nanieść niewielką ilość żelu na dotknięty obszar.

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO:

- Wyjąć aplikator z folii i przykręcić go do tuby
- Wprowadzić aplikator do pochwy
- Nacisnąć tubę, aby umożliwić wydostanie się żelu.
- Odkręcić aplikator od tuby.
- Dokładnie umyć i wysuszyć.

W trudniejszych przypadkach należy nasmarować zewnętrzną część aplikatora przed włożeniem jej do pochwy.

3. Skład

Gliceryna, hialuronian sodu, kwas mlekowy, ekstrakt z liści aloesu zwyczajnego, ekstrakt z owoców czarnej porzeczki, hydrolat z kwiatów lawendy wąskolistnej, ekstrakt z rumianku pospolitego, ekstrakt z nagietka lekarskiego, octan tokoferolu, palmitynian retinolu, kwas linolowy, uwodorniony olej rycynowy, hydroksyetyloceluloza, polisorbata 20, mocznik imidazolidynowy, wersenian disodu, sorbinian potasu, woda.

4. Ostrzeżenia

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt należy przechowywać odpowiednio zamknięty i z dala od światła i źródeł ciepła. Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu. Data ważności dotyczy prawidłowo przechowywanego produktu. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Wyrób nie jest sterylny. Nie jest to środek antykoncepcyjny. Nie używać w przypadku uszkodzenia narządów. Nie połykać. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kobiet w ciąży, karmiących piersią i młodych kobiet stosowanie żelu musi być ograniczone do przypadków wynikających z rzeczywistej potrzeby i pod bezpośrednim nadzorem lekarza. Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na składniki produktu. Nie używać produktu w połączeniu z czwartorzędowymi związkami amoniowymi. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń, zaleceń dotyczących metod stosowania, a także stosowanie produktu przez kilka osób może zagrozić skuteczności produktu lub spowodować nasilenie istniejących problemów lub wystąpienie problemów, które wcześniej nie występowały. Nie należy używać samodzielnie produktu przez okres dłuższy niż 30 dni bez przerwy. W przypadku nienaruszonej błony dziewiczej przed użyciem należy skonsultować się z ginekologiem. Wystąpienie działań niepożądanych nieopisanych w niniejszej instrukcji używania wyrobu należy bezwzględnie zgłosić lekarzowi lub farmaceucie.

5. Przeciwwskazania

W przypadku używania w normalnych i racjonalnie przewidywalnych warunkach nie są obecnie znane żadne skutki uboczne związane ze stosowaniem produktu. Kompatybilność produktu została zweryfikowana, ale w przypadku wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznych należy zaprzestać stosowania produktu i skontaktować się z lekarzem/ginekologiem.

6. Opakowanie

Tuba 30 ml.

7. Producent



Producent:

Gruppo Farmaimpresa Srl
Via Cipro,
1 - 25124 Brescia, Włochy

Dystrybutor:

Hexanova®

HEXANOVA Sp. z o.o.
ul. Brukowa 36,
05-092 Łomianki, Polska
www.hexanova.pl

Wyrób medyczny



Wyrobu medycznego nie wolno wyrzucać do śmieci ani odpadów domowych. Zapytaj farmaceutę, jak należy usuwać wyroby medyczne, które nie są już potrzebne. Pomoże to chronić środowisko naturalne.

Hexanova®