

SPRAY DO HIGIENY USZU

pure



WYRÓB MEDYCZNY

- nawilża błony śluzowe
- rozpuszcza i usuwa woskowinę uszną
- powyżej 3 miesiąca życia

**Pomaga w zachowaniu
właściwej higieny uszu**

GLOBAL PHARMA
CM SP. Z O.O.
ul. Berezów 49A,
26-130 Suchedniów

Dystrybutor:
Nature Pharm Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II
23 00-854 Warszawa

Skład: oliwa z oliwek, olejek miętowy.

Wskazania do zastosowania:

- rozpuszczanie i usuwanie złogów woskowiny usznej,
- nawilżanie błon śluzowych zewnętrznych przewodu słuchowego,
- zachowanie higieny uszu u osób noszących aparaty słuchowe, jak również u osób z nadprodukcją woskowiny,
- eliminacja zalegania wody w kanale ucha u osób uprawiających sporty wodne oraz kąpiących się.

Sposób użycia: Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użycia dołączonej do opakowania. Przed pierwszym użyciem opakowania "Spray do HIGIENY USZU pure,, należy wstrząsnąć buteleczkę, a następnie wprowadzić w pionowej pozycji aplikator do zewnętrznego przewodu słuchowego i nacisnąć kilka razy, aż pojawi się płyn. Zaaplikować odpowiednią dawkę wyrobu 1-2 naciśnięciami i delikatnie rozmasować zewnętrzną część ucha.

Środki ostrożności: W celu uniknięcia przeniesienia infekcji, zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę. Nie stosować preparatu w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu. Nie stosować po upływie terminu przydatności do użycia. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować u wcześniaków.

Numer serii i termin ważności znajdują się na spodzie kartonika i etykiecie butelki.

Pojemność: 30 ml

Butelka zawiera około 300 dawek.